

# CAST BOOT

## キャストブーツ 〈ギプスウォーカー〉

### —— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。  
また、お読みになった後もいつでも読めるよう大切に保管してください。

#### 用 途

ギプス・副木等で固定した足部の汚れ・破損・水濡れの防止

#### 特 長

- 安定感のある、歩行しやすい船底型ソールを採用しています。
- ソールの接地面をストライプ形状にする事で、滑りにくくなっています。
- クッション性に優れた三層構造です。
- 面ファスナーで簡単に着脱が出来ます。
- 防水性に優れ、ギプスの水濡れを防ぎます。

## はじめにお読みください


- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は、足部をギプス・副木などで固定した際の汚れ・破損・水濡れ防止以外の用途には使用しないでください。
- 本品は左右兼用です。
- 使用する前にサイズが合っているかどうか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書の巻末にあります。
- 本使用説明書のイラストでは、説明をわかりやすくするため、製品の色を白黒の2色で表現しています。


## ご使用にあたって

- オートクレーブ滅菌は行わないでください。製品をいためるおそれがあります。

## 使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



装着に関する警告



本品の使用に際しては必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が敏感な状態にある場合。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れもの、湿疹、かぶれなど異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、体の動きを妨げたり、過度の圧迫を招いたりして、負傷事故や血行障害の原因となります。


- 足部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください。(巻末のサイズ表を参照すること。)
- 就寝時には使用しないでください。

 装着に関する警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●前後を逆にして使用しないでください。</li> <li>●装着手順に従って正しく使用してください。</li> <li>●装着の際、足部にきつく締めすぎないでください。</li> <li>●使用中にたるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから、正しく装着し直してください。</li> <li>●摩耗・損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。</li> <li>●本品の加工、改造、修理を行わないでください。</li> </ul>
	<p>本品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師の診断と手当てを受けてください。そのまま使用を続けると、症状が悪化する原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●つけごこちが悪いなど本品を使用中に違和感を感じた場合。</li> <li>●本品の使用中に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れもの、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。</li> </ul>
 注意	<p>面ファスナーが衣服につかないように装着してください。</p>
	<p>本品は水濡れ等により色落ちや他の生地に色移りする事がありますのでご注意ください。</p>

## お手入れ方法

- 本品を洗濯する際は、水と中性洗剤でていねいに押し洗いし、日陰で吊り干しにしてください。
- 外出先等で本品の汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を染み込ませた布等で汚れをふき取ってください。
- 乾燥機での乾燥、ドライクリーニングは行わないでください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤の使用はしないでください。製品をいためる原因となります。


## 各部の名称

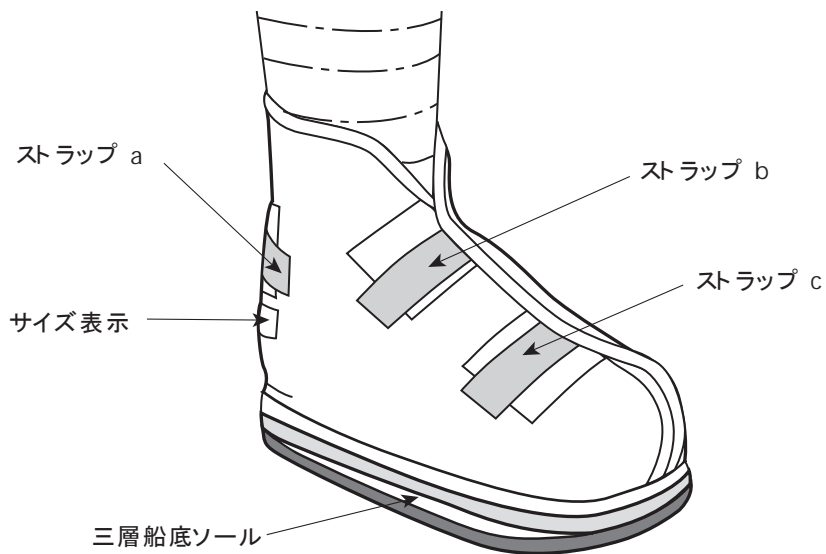


## 装着手順

- 装着前に再度【使用上の注意－必ずお読みください－】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。


- 1 まず、本品の面ファスナーをすべて外し、ブーツの後部に踵を合わせるように履きます。

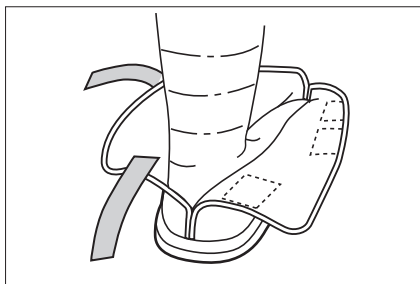


- 2 ブーツ後部のストラップaをとめます。

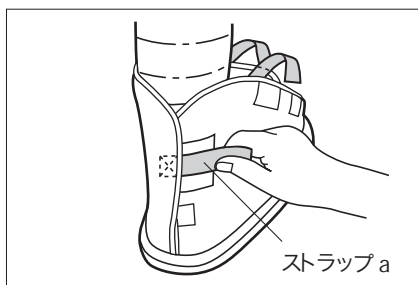

- 3 ブーツの中で足がずれないように、引っ張りながらストラップb、cをとめます。

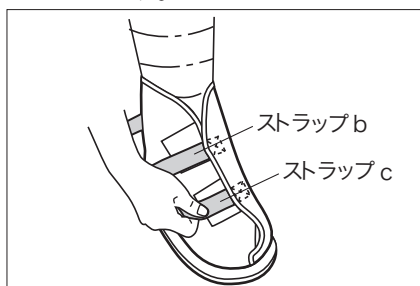

- 4 ストラップが長すぎる場合は、余分なストラップ部分をカットしてください。

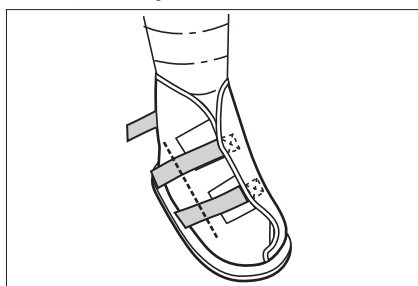

## 装着完了図



## 品質表示

### 素 材

塩化ビニール、EVA、パルプ、ポリウレタン、綿、ナイロン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## サイズ表

サイズ	適用範囲(靴サイズ)	1 函入数
S	19.0cm～ 22.0cm	1コ
M	22.0cm～ 25.0cm	1コ
L	25.0cm～ 28.0cm	1コ

### ●サイズの選び方

靴サイズに合わせてサイズをお選びください。

なお、サイズをお選びになる際は、仮合わせをすることをお勧めします。

※製品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万が一不良等お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

**日本シグマックス株式会社** 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03 ( 5326 ) 3230