

マックスベルト

MAXBELT

腰部固定帯

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く




※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。

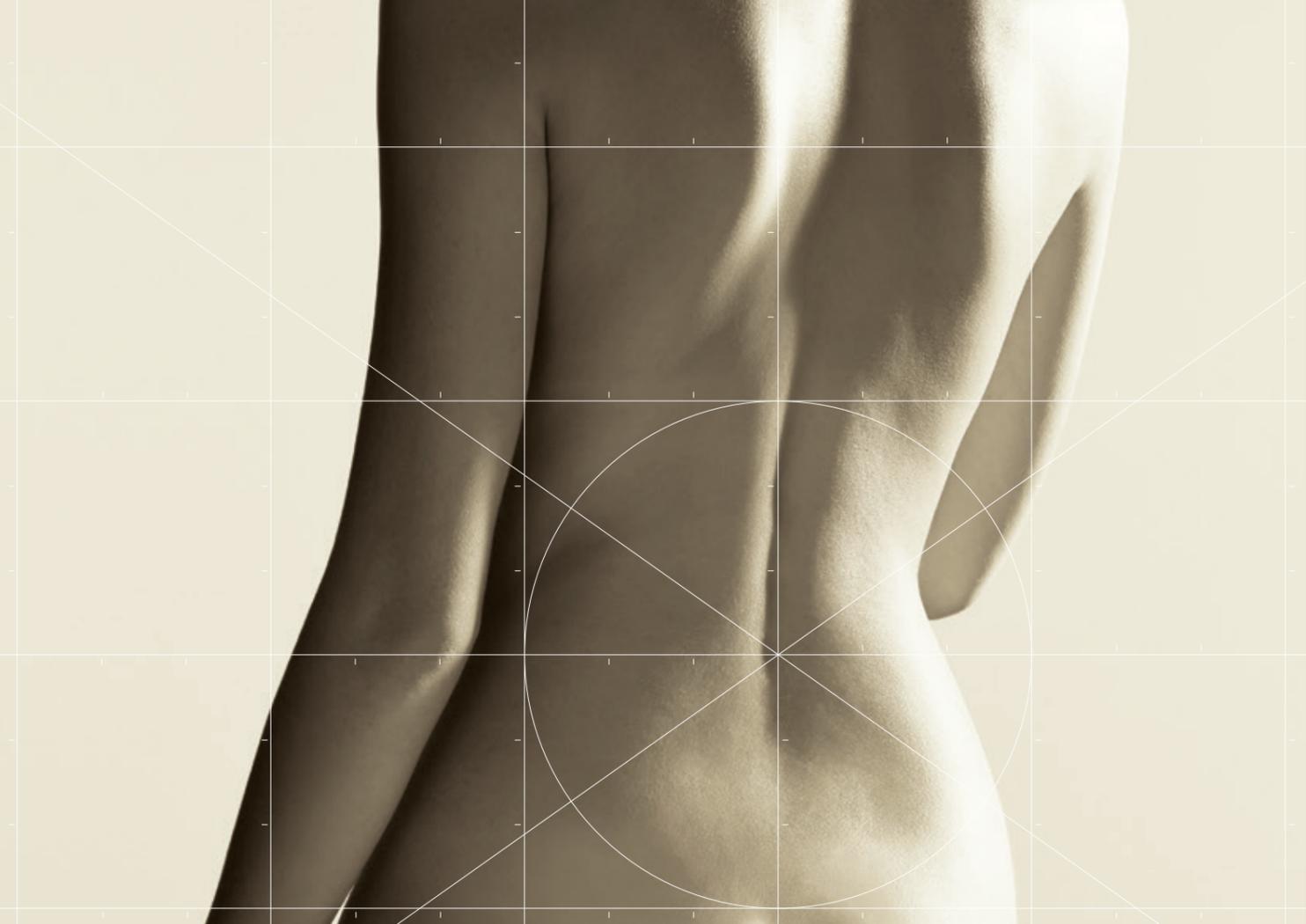

豊富なラインアップで、様々な使用シーンにフィットします。

腰部全体を包み込み、
適度な圧迫と
保温性で腰部をサポート。

R series P7~	R1
	R2
	R3

通気性を重視した
メッシュタイプ。

me series P10~	me1
	me2
	me2 HC
	me black
	me3

機能性を重視し、
サポート対象に特化したタイプ。


Special type P14~	FR
	se
	SHORT

スポーツする体に対応。
快適性と動きやすさを
重視したスポーツタイプ。

S series P17~	S1
	S2
	S3

サポートしたいのは、 活動する喜びです。

腰への不安のない、積極的にカラダを動かせる環境を提供したい。
そして、気持ちまでもポジティブになってほしい。
生活をよりアクティブに楽しむことを
サポートするために開発されたのがマックスベルトシリーズです。
その実現のために固定力を高めること、動きやすいこと、
過ごしやすいくことの総合的な向上を目指しています。
素材、構造、サイズなど豊富なラインアップを揃えているのも、
多くの人の様々な使用シーンにおいてサポートしたいという思いからです。
進化し続ける医療現場において、高い期待に応えるためにも、
品質・機能の向上に磨きをかけ、さらなる充実を目指していきます。

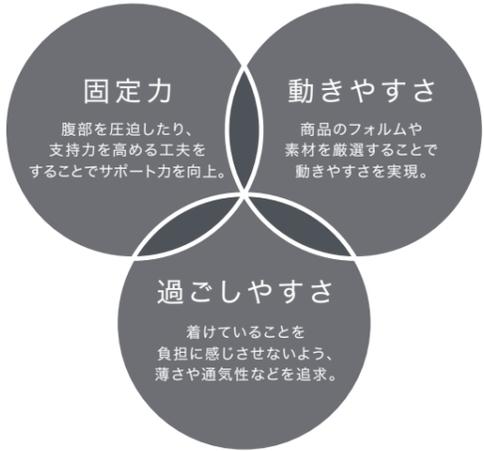

↓
生活をポジティブに
楽しむことを実現

製品共通特長

ステー 各製品の機能に合わせ、各種ステーを背部に配置しています（FRは前面にステーを配置）。

腰にフィットするS字軽量ステー

対象商品：R1、R2、R3、me2、me black、me3、se

腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。ステー各部の厚さを変えることで、支持力と軽量化の両立を図りました。



me2 HC用のS字軽量ステー

対象商品：me2 HC

背部には2本のS字軽量ステーを配置。弊社従来品のS字軽量ステーより約1.7倍※1厚くし、強度が約2倍※2アップ。よりしっかりと腰部をサポートします。

※1 弊社従来品との比較。ステーの最も厚い部分での図面上での比較。
※2 弊社従来品との比較。

従来のS字軽量ステー 腰の曲線にフィットするS字型で支持力の高い長尺タイプです。

me2 HC用のS字軽量ステー 厚さと強度をアップし、製品丈に合わせて短くしています。

〔S字軽量ステー 弊社従来品との比較〕

	従来品に対する差
3点曲げ強度	約220%

〔3点曲げ強度試験概要〕 左図矢印の方向にステーを押し込んだ際の最大強度を計測

ソフトタイプのプラスチックステー

対象商品：me1

装着時の活動性を損なうことがないように、適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵しています。



対象商品：S1、S2


運動時のサポートを目的としたマックスベルト S1、S2は、しなやかで耐久性に優れたフラットなプラスチックステーを内蔵しています。



FRの前合わせ部のステー

対象商品：FR

マックスベルト FRの前合わせ部にはプラスチック製のステーを2本内蔵し、前屈の動きを抑えます。背部には4本のソフトステーを内蔵し、フィット性を高めています。

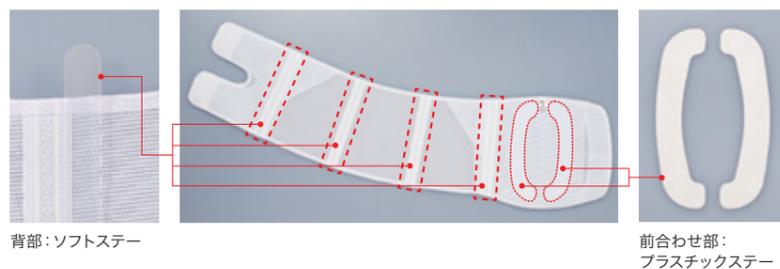

S3の長尺アルミステー

対象商品：S3

背部には、耐久性に優れた幅の広いフラットなプラスチックステーを内蔵し、長尺のアルミステー4本を配置。丈の長い背当て部、固定ストラップと合わせて腰部の伸展の動きを制限します。アルミステーは必要に応じて取り外しが可能です。



補助ベルト

圧迫力を補強する補助ベルト付き

対象商品：R2、R3、me1、me2、me black、me3、se

背部から体によって圧迫力を補強する補助ベルトを装備しています。



R2


一体型補助ベルトで簡単装着

対象商品：me2 HC、S1、S2、S3

補助ベルト連結ゴムにより、補助ベルトの背面への垂れ下がりを防ぎ、背部に腕を回すことなく補助ベルトをとめることができます。また、S2は非伸縮素材と連結させ、かさばりを抑えた形状になっています。



me2 HC

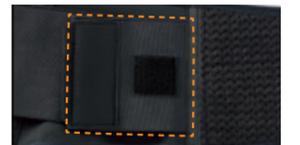

S1



S2




S3

折り返し二重構造

対象商品：me2、me black、S1、S3

骨盤部分の伸縮メッシュ素材を折り返して二重構造にすることで圧迫力を高めています。

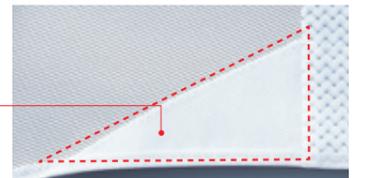

me2

ラテックスフリー

対象商品：マックスベルトシリーズ全商品

より多くの方にご利用いただけるよう製品の資材は、天然ゴム（ラテックスを含む）を使用せず、全製品ラテックスフリーにしました。



上側表示

対象商品：マックスベルトシリーズ全商品

製品のサイズタグに矢印を入れ、製品の上下を分かりやすく表示しました。



腰部全体を包み込み、
適度な圧迫と保温性で腰部をサポート



ソフト
サポート

マックスベルト
R1
アール・ワン



補助ベルトなしの
シンプルタイプ
・S字軽量ステータ2本

マックスベルト
R2
アール・ツー



汎用性の高い
スタンダードタイプ
・S字軽量ステータ2本
・補助ベルト付き

ハード
サポート

マックスベルト
R3
アール・スリー



腰部全体を覆う
しっかりサポートタイプ
・S字軽量ステータ4本
・補助ベルト付き

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
適用範囲(胴囲)	55cm~65cm	65cm~75cm	75cm~85cm	85cm~95cm	95cm~105cm	105cm~115cm	115cm~125cm	125cm~135cm
R1		●	●	●	●			
R2	●	●	●	●	●	●	●	
R3		●	●	●	●	●		

MAXBELT R2 マックスベルト アール・ツー

S字軽量ステータ
2本


補助ベルト
付き

汎用性の高いスタンダードタイプ

S字軽量ステータと補助ベルトによる適度な固定力と幅広いサイズ展開で腰部をサポートします。

腰にフィットするS字軽量ステータ。

腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプです。ステータ各部の厚さを変えることで、支持力と軽量化の両立を図りました。

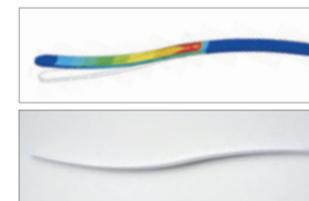

圧迫力を高める補助ベルト。

背部から体にそって圧迫力を補強する補助ベルトを装備しています。



快適な吸湿性素材を採用。

伸縮部分には、肌触りのよい吸湿性素材を使用した通気性ストライプ構造を採用しています。吸水拡散性に優れ、ムシにくく、快適な装着感です。



ストライプのパワー強化。

上下それぞれ2本のストライプのパワーを強化。S字軽量ステータを腰部にしっかりとフィットさせ、支持力を向上させています。



マックスベルト R1

品番	種類	適用範囲(胴囲)
321101	S	65cm ~ 75cm
321102	M	75cm ~ 85cm
321103	L	85cm ~ 95cm
321104	LL	95cm ~ 105cm

マックスベルト R2

品番	種類	適用範囲(胴囲)
321200	SS	55cm ~ 65cm
321201	S	65cm ~ 75cm
321202	M	75cm ~ 85cm
321203	L	85cm ~ 95cm
321204	LL	95cm ~ 105cm
321205	3L	105cm ~ 115cm
321206	4L	115cm ~ 125cm

マックスベルト R3

品番	種類	適用範囲(胴囲)
321501	S	65cm ~ 75cm
321502	M	75cm ~ 85cm
321503	L	85cm ~ 95cm
321504	LL	95cm ~ 105cm
321505	3L	105cm ~ 115cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

MAXBELT R1

マックスベルト アール・ワン

S字軽量ステー
2本

補助ベルトなしのシンプルタイプ

補助ベルトがなく、サポーター本体を巻いてとめるだけのシンプル設計です。


快適な吸湿性素材を採用。

背部の伸縮部分には、肌触りのよい吸湿性素材を使用した通気性ストライプ構造を採用しています。吸水拡散性に優れ、ムレにくく、快適な装着感です。



ストライプのパワー強化。

上下それぞれ2本のストライプのパワーを強化。S字軽量ステーを腰部にしっかりとフィットさせ、支持力を向上させています。

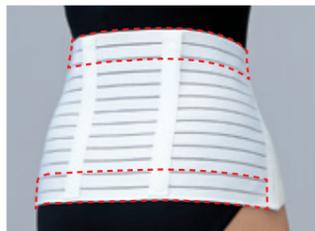

MAXBELT R3

マックスベルト アール・スリー

S字軽量ステー
4本

補助ベルト
付き

腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ

サポーター本体の素材に厚みとコシのある生地を採用。S字軽量ステーを4本内蔵しサポート力を高めました。


しっかりとした生地で固定力を向上。

厚みとこしのある伸縮素材を本体に採用。しっかりとした生地で腰部全体を覆いサポート力を高めました。



S字軽量ステーを4本内蔵。

背部にS字軽量ステーを4本内蔵し、支持力を高めています。サポーター本体のしっかりとした生地と合わせ腰部全体をサポートします。

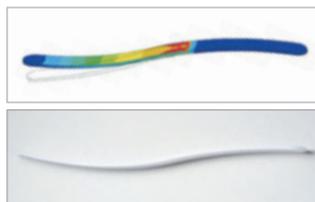

通気性を重視したメッシュタイプ



ソフト
サポート

マックスベルト
me1
エムイー・ワン



かさばらず丈の短い
薄型タイプ
・プラスチックステー2本
・補助ベルト付き

マックスベルト
me2
エムイー・ツー



メッシュタイプの
スタンダードモデル
・S字軽量ステー2本
・補助ベルト付き

マックスベルト
me2 HC
エムイー・ツー エイチシー



me2をベースに
支持力をアップ
・me2 HC用S字軽量ステー2本
・補助ベルト付き

マックスベルト
me black
エムイー ブラック



スポーティなブラックの
メッシュタイプ
・S字軽量ステー2本
・補助ベルト付き

ハード
サポート

マックスベルト
me3
エムイー・スリー



背面立体構造でフィット性のよい
しっかりサポートタイプ
・S字軽量ステー2本
・補助ベルト付き

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
適用範囲(胴囲)	55cm~65cm	65cm~75cm	75cm~85cm	85cm~95cm	95cm~105cm	105cm~115cm	115cm~125cm	125cm~135cm
me1	●	●	●	●	●	●		
me2	●	●	●	●	●	●	●	●
me2 HC	●	●	●	●	●	●	●	
me black	●	●	●	●	●	●	●	
me3	●	●	●	●	●	●	●	●


MAXBELT me2 マックスベルト エムイー・ツー

メッシュタイプのスタンダードモデル

固定力と装着感のバランスがとれた汎用性の高いメッシュタイプです。



2種類のメッシュ素材で快適な装着感。

背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮性メッシュ素材を採用。ムレにくく快適な装着感です。

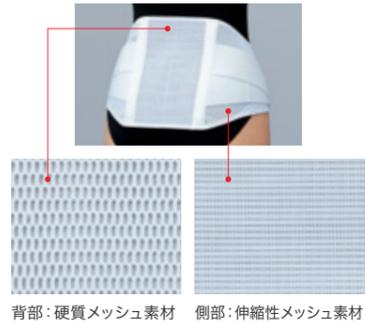

圧迫力を高める折り返し二重構造。

骨盤部分の伸縮性メッシュ素材を折り返し二重構造にし、圧迫力を高めています。

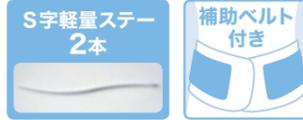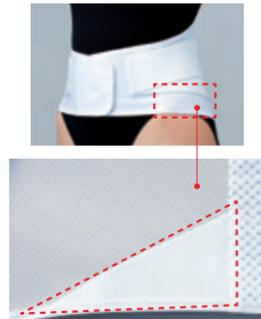

MAXBELT me black マックスベルト エムイー ブラック

スポーティなブラックで日常生活を快適に

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を採用し、腰部をしっかりサポートします。

硬質メッシュ素材で腰部をしっかりサポート。

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。しっかりした生地で支持力を上げています。




スポーティなブラック色。

活動的な日常生活の中で装着していても目立ちにくいブラックです。また、着用時のかさばりを軽減し、洋服を着てもラインがひびかないように配慮しています。




ムレにくいメッシュタイプ。

製品全体にメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適な装着感です。

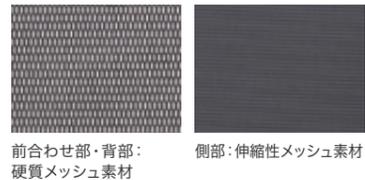

圧迫力を高める折り返し二重構造。

骨盤部分のメッシュ素材を折り返し二重構造にし、圧迫力を高めています。

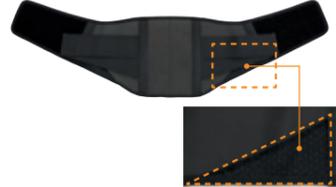


MAXBELT me2 HC マックスベルト エムイー・ツー エイチシー

マックスベルト me2がベースのしっかりサポートタイプ



製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプです。

厚くなった背部のS字軽量ステー。

背部には2本のS字軽量ステーを配置。弊社従来品のS字軽量ステーより約1.7倍^{※1}厚くし、強度が約2倍^{※2}アップ。よりしっかりと腰部をサポートします。

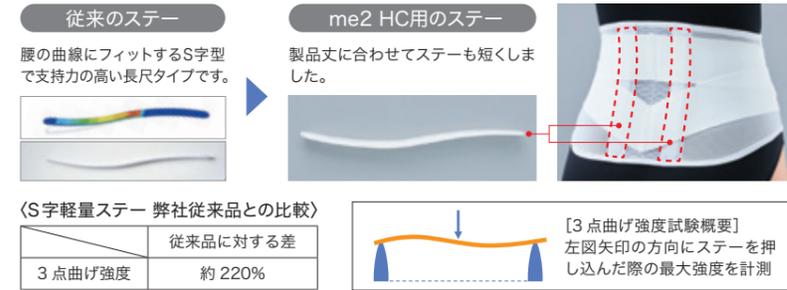

※1 弊社従来品との比較。ステーの最も厚い部分での図面上での比較 ※2 弊社従来品との比較

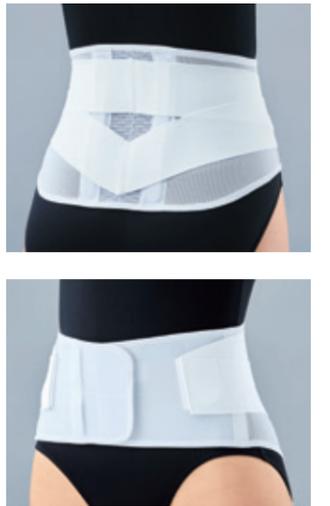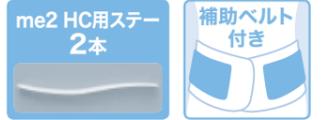

補助ベルトがパワーアップ

圧迫力が調整できる補助ベルトは、パワーの強いゴム素材を採用し、より圧迫力を高めました。




硬質メッシュ素材で腰部をしっかりサポート

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。しっかりした生地で支持力を上げています。



コンパクト設計

背当て部の丈は約20cm。装着しても動きやすいコンパクト設計です。

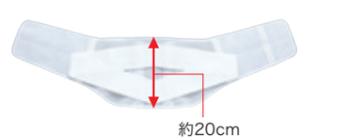

装着しやすい設計

前合わせ部にループをつけます。指を掛けたり、手を入れたりして前合わせ部を引っ張りやすい形状にしました。




補助ベルト連結ゴムにより、補助ベルトの背面への垂れ下がりを防ぎ、背部に腕を回すことなく補助ベルトをとめることができます。



ムレにくいメッシュタイプ

製品全体にメッシュ素材を使用。ムレにくく、さわやかな装着感です。

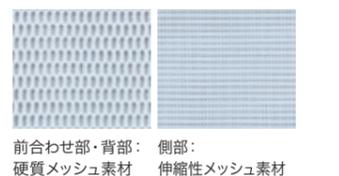

マックスベルト me2

品番	種類	適用範囲(胴囲)
322200	SS	55cm ~ 65cm
322201	S	65cm ~ 75cm
322202	M	75cm ~ 85cm
322203	L	85cm ~ 95cm
322204	LL	95cm ~ 105cm
322205	3L	105cm ~ 115cm
322206	4L	115cm ~ 125cm
322207	5L	125cm ~ 135cm

マックスベルト me black

品番	種類	適用範囲(胴囲)
322400	SS	55cm ~ 65cm
322401	S	65cm ~ 75cm
322402	M	75cm ~ 85cm
322403	L	85cm ~ 95cm
322404	LL	95cm ~ 105cm
322405	3L	105cm ~ 115cm
322406	4L	115cm ~ 125cm

マックスベルト me2 HC

品番	種類	適用範囲(胴囲)
322700	SS	55cm ~ 65cm
322701	S	65cm ~ 75cm
322702	M	75cm ~ 85cm
322703	L	85cm ~ 95cm
322704	LL	95cm ~ 105cm
322705	3L	105cm ~ 115cm
322706	4L	115cm ~ 125cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

MAXBELT me1 マックスベルト エムイー・ワン



かさばらず丈の短い薄型タイプ

薄くかさばらないメッシュ素材を採用し、装着のしやすさを考慮した形状です。

柔軟性のあるプラスチックステー。

装着時の活動性を損なうことがないように、適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵しています。



通気性のある薄いメッシュ素材を採用。

製品全体に通気性に優れた薄いメッシュ素材を採用し、ムシに近く快適な装着感です。



装着のしやすさを考慮した形状。

活動時の違和感や動きやすさを考慮し、製品の丈を短くしています。



MAXBELT me3 マックスベルト エムイー・スリー



フィット性を高めたしっかりサポートタイプ

背面に立体裁断した硬質メッシュ素材を使用し、ホールド感を高めています。


腰にフィットしやすい背面立体構造。

背部には立体裁断した硬質メッシュ素材を採用。S字軽量ステーと合わせて腰にフィットしやすい形状です。また、meシリーズの中では前合わせ部の幅も広く、腰部全体を覆うしっかりサポートタイプです。



2種類のメッシュ素材で快適な装着感。

背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮性メッシュ素材を採用。ムシに近く快適な装着感です。

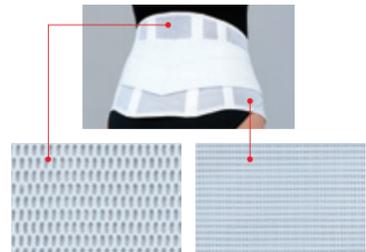

背部：硬質メッシュ素材 側部：伸縮性メッシュ素材



機能性を重視し、サポート対象に特化したタイプ

MAXBELT Special type

スペシャルタイプ

マックスベルト
FR
エフアール



前面から
体幹をサポート

- ・前合わせ部：プラスチックステー2本
- ・背部：ソフトステー4本

マックスベルト
se
エスイー



腰部全体を覆い、
骨盤部分も圧迫する
しっかりサポートタイプ

- ・S字軽量ステー2本
- ・補助ベルト付き/骨盤ベルト付き

マックスベルト
SHORT
ショート



骨盤部分を圧迫する
幅の狭いタイプ

- ・ステーなし
- ・骨盤ベルト付き

マックスベルト me1


品番	種類	適用範囲(胴囲)
322600	SS	55cm ~ 65cm
322601	S	65cm ~ 75cm
322602	M	75cm ~ 85cm
322603	L	85cm ~ 95cm
322604	LL	95cm ~ 105cm
322605	3L	105cm ~ 115cm

マックスベルト me3

品番	種類	適用範囲(胴囲)
322300	SS	55cm ~ 65cm
322301	S	65cm ~ 75cm
322302	M	75cm ~ 85cm
322303	L	85cm ~ 95cm
322304	LL	95cm ~ 105cm
322305	3L	105cm ~ 115cm
322306	4L	115cm ~ 125cm
322307	5L	125cm ~ 135cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

サイズ	S	M	L	LL	3L
適用範囲(胴囲)	55cm~70cm	70cm~85cm	85cm~100cm	100cm~115cm	
FR	●	●	●	●	
適用範囲(胴囲)	65cm~75cm	75cm~85cm	85cm~95cm	95cm~105cm	105cm~115cm
se	●	●	●	●	●
適用範囲(下腹囲)	75cm~83cm	83cm~91cm	91cm~99cm	99cm~107cm	107cm~115cm
SHORT	●	●	●	●	●

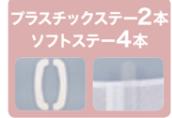


体幹の前屈の動きを抑えて腰部をサポート

前合わせ部に支持機構のプラスチックステーと硬質メッシュ素材を配置し、体幹を前面からサポートします。

前合わせ部に2本、背部にソフトステー4本を配置。

前合わせ部にはプラスチック製のステーを2本内蔵し、前屈の動きを抑えます。背部には4本のソフトステーを内蔵し、フィット性を高めています。

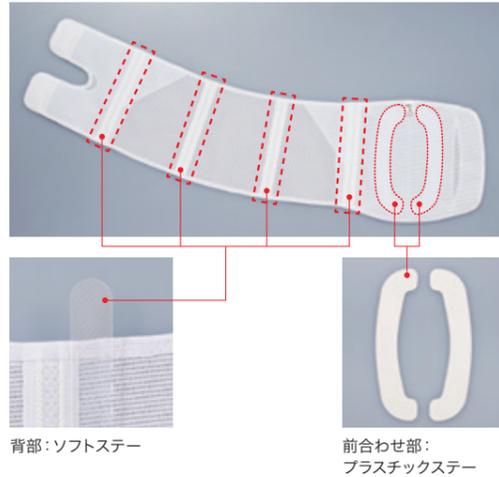

背部：ソフトステー

前合わせ部：プラスチックステー



ステー&硬質メッシュによる支持機構を体幹前面(腹部側)に

前合わせ部にプラスチック製のステーと硬質メッシュ素材を配置し、前屈の動きを抑えて、体幹を前面からサポートします。



前合わせ部 丈：約24cm

硬質メッシュ素材


前合わせ部両端にポケット状の装着機構

製品の両端にポケット状の指を挿入できる機構を配し、指を引っ掛けてつかみやすくすることで、力の弱い方でも引っ張りやすい形状です。



前合わせ部のクッション素材であたりを軽減

前合わせ部の上下に、胸部および鼠径部へのあたりを軽減するクッション性の高いダブルラッセル素材を使用しています。

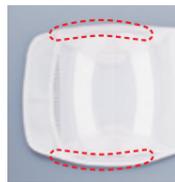

通気性に優れたメッシュ素材を採用

製品全体に通気性に優れた伸縮性メッシュ素材を採用。快適な装着感です。



伸縮性メッシュ素材

サイズタグに矢印で上側表示

前合わせ部のサイズタグに矢印を入れ、製品の上下をわかりやすく表示しました。また、装着位置(体の中心)の目安となるようサイズタグを前合わせ部の中心に配置しました。



マックスベルト FR

品番	種類	適用範囲(胴囲)
324601	S	55cm ~ 70cm
324602	M	70cm ~ 85cm
324603	L	85cm ~ 100cm
324604	LL	100cm ~ 115cm

マックスベルト se

品番	種類	適用範囲(胴囲)
324001	S	65cm ~ 75cm
324002	M	75cm ~ 85cm
324003	L	85cm ~ 95cm
324004	LL	95cm ~ 105cm
324005	3L	105cm ~ 115cm

マックスベルト ショート

品番	種類	適用範囲(下腹囲)
324101	S	75cm ~ 83cm
324102	M	83cm ~ 91cm
324103	L	91cm ~ 99cm
324104	LL	99cm ~ 107cm
324105	3L	107cm ~ 115cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。



※下腹囲(上前腸骨棘の位置)に合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

S字軽量ステー
2本



骨盤部分も圧迫し、腰部全体をカバー

腰部全体を覆うサポーター本体と骨盤ベルトでしっかりサポートします。

サポーター本体で腰部全体をカバー。

前合わせ部、背当て部ともサポーター本体でしっかりと覆い、腰部全体をカバーします。前合わせ部は胃への圧迫を軽減するよう設計された形状で、しっかりサポートタイプでも快適な装着感です。



胃への圧迫を軽減する設計

補助ベルトと骨盤ベルト付き。

圧迫力を調節できる補助ベルトと骨盤部分を圧迫する骨盤ベルト付き。補助ベルトには伸縮性のあるゴム、骨盤ベルトは非伸縮性の生地を使用しています。




補助ベルト

骨盤ベルト



ムレにくい快適な装着感。

サポーター本体には、ムレにくい通気性素材を採用しています。

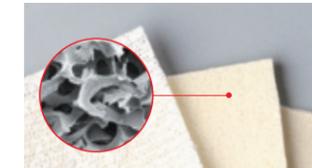

骨盤部分を圧迫する幅の狭いコンパクトタイプ

非伸縮性の骨盤ベルトで圧迫し、装着しやすい形状です。

骨盤ベルト付き。

製品丈の短いサポーター本体に、非伸縮性の生地を使用した骨盤ベルトを配置。骨盤部分を圧迫します。




長時間でも装着しやすい形状。

サイズごとに設計を変更し、日常生活を送る上で動きを妨げることなく、無理なく装着できる形状です。



ムレにくい快適な装着感。

サポーター本体には、ムレにくい通気性素材を採用しています。

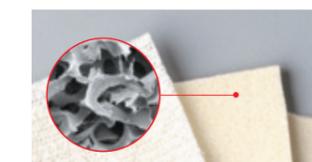

スポーツする体に対応。快適性と動きやすさを重視したスポーツタイプ

MAXBELT
S
series
エス シリーズ

ソフトサポート ↑

マックスベルト S1 エス・ワン
幅の狭いスポーツタイプ
・プラスチックステー4本
・補助ベルト付き

マックスベルト S2 エス・ツー
かさばりを抑え、動きやすさを重視したスポーツタイプ
・プラスチックステー6本
・補助ベルト付き

ハードサポート ↓

マックスベルト S3 エス・スリー
機能性と実用性を兼ね備えたハードタイプ
・アルミステー4本、プラスチックステー4本
・補助ベルト付き/固定ストラップ付き

サイズ	SS	S	M	L	LL
適用範囲(胸囲)	55cm 65cm	65cm 75cm	75cm 85cm	85cm 95cm	95cm 105cm
S1	●	●	●	●	●
S2	●	●	●	●	●
S3	●	●	●	●	●


MAXBELT S3 マックスベルト エス・スリー

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ

長尺のアルミステーと丈の長い背当て部でしっかりサポートします。

機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。

より一層の支持力を求められる状況に対応。長尺のステーと製品丈の長い背当て部で伸展の動きを抑えて腰部をサポートします。また、前合わせ部の丈は短くし、動きを妨げない形状です。

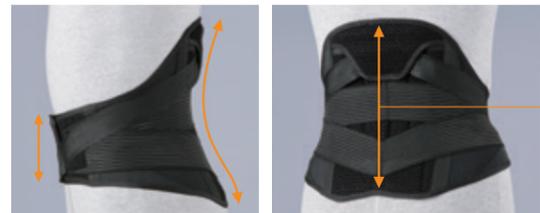

SS、Sサイズ:約27cm
M、L、LLサイズ:約30cm
※SS、Sサイズは丈の長さが短い仕様です。

圧迫力を高める補助ベルトと固定ストラップ。

圧迫力を高める補助ベルトと上部には固定ストラップを付属。固定ストラップは必要に応じて取り外しができます。



耐久性と支持力を追求したステー。

内蔵されたプラスチックステー4本と状況にあわせて取り外しができるアルミステーを4本付属しています。



通気性に優れた素材を採用。

運動してもムレにくい、通気性に優れた素材を採用しています。



●本体の内側には滑り止めテープを装備。スポーツ時でもズレにくくしています。

MAXBELT S1 マックスベルト エス・ワン

幅の狭いスポーツタイプ

耐久性に優れたしなやかなプラスチックステーと伸縮メッシュ素材で快適な装着感です。

耐久性に優れたステー。

耐久性に優れたフラットなプラスチックステーを4本内蔵しています。



装着しやすい一体型補助ベルト。

圧迫力を高める補助ベルト付きです。外しても邪魔にならない一体型です。



動きを妨げない幅の狭いタイプ。

運動時の動きを考慮し、製品丈が短く薄型でかさばりの少ないスポーツタイプです。



通気性に優れた素材を採用。

運動してもムレにくい、伸縮性のあるメッシュ素材を採用しています。



圧迫力を高める折り返し二重構造です。



本体の内側には滑り止めテープを装備。スポーツ時でもズレにくくしています。



プラスチックステー
4本



補助ベルト
付き




MAXBELT S2 マックスベルト エス・ツー

サポート性と動きやすさの両立を重視したスポーツタイプ

製品全体のかさばりを軽減した設計で、運動時の動きを妨げません。

製品のかさばりを軽減。

伸縮、非伸縮素材を組み合わせさせた一体構造で、製品全体のかさばりを軽減しています。

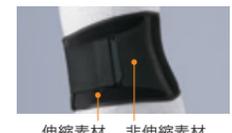

耐久性に優れたステー。

耐久性に優れたしなやかなフラットなプラスチックステーを6本内蔵しています。



圧迫力を高める補助ベルト。

圧迫力を高める補助ベルトを付属。非伸縮素材と連結させ、かさばりの少ない形状になっています。




通気性に優れた素材を採用。

運動してもムレにくい、通気性に優れた素材を採用しています。



本体の内側には滑り止めテープを装備。スポーツ時でもズレにくくしています。

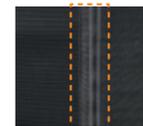

プラスチックステー
6本



補助ベルト
付き



マックスベルト S1

品番	種類	適用範囲(胸囲)
323100	SS	55cm ~ 65cm
323101	S	65cm ~ 75cm
323102	M	75cm ~ 85cm
323103	L	85cm ~ 95cm
323104	LL	95cm ~ 105cm

マックスベルト S2

品番	種類	適用範囲(胸囲)
323210	SS	55cm ~ 65cm
323211	S	65cm ~ 75cm
323212	M	75cm ~ 85cm
323213	L	85cm ~ 95cm
323214	LL	95cm ~ 105cm

マックスベルト S3

品番	種類	適用範囲(胸囲)
323500	SS	55cm ~ 65cm
323501	S	65cm ~ 75cm
323502	M	75cm ~ 85cm
323503	L	85cm ~ 95cm
323504	LL	95cm ~ 105cm

※へその位置を目安に胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。