

ハイブリッドシーネ ニー


使用説明書 (患者様向け)

伸展タイプ

屈曲タイプ

医師による処方後、患者様に本使用説明書をお渡しください。患者様が装着し直す際には、本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

シーネホルダーの各部の名称

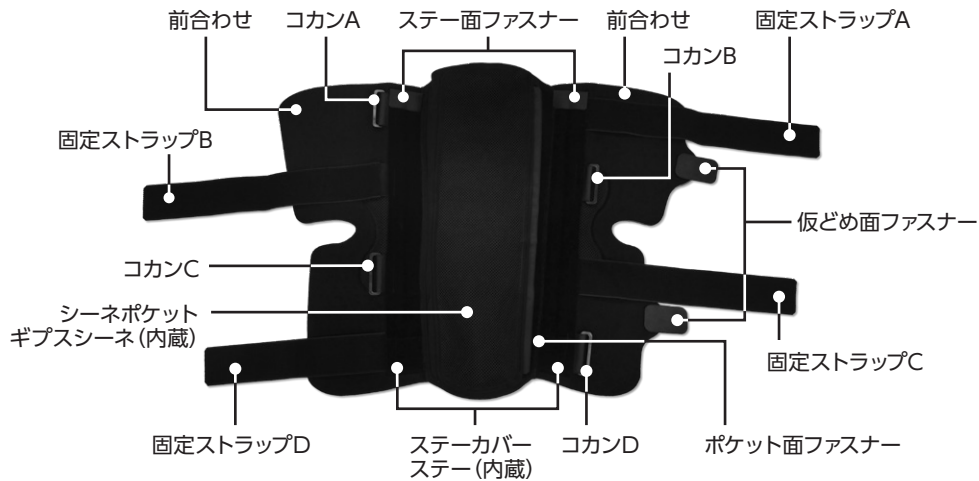

装着手順

※本品は左右兼用です。図は右脚に装着しています。


- 初回は装着前に添付文書をよく読んでから、医師の指示にしたがって手順通りに正しく装着してください。
- 再度、装着し直す場合は、以下の手順にしたがって、正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。

1 仮どめ面ファスナー、固定ストラップをすべて取り外します。本品はタグのある方が上で体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。ギプスシーネおよびステーパーが挿入されていることを確認してください。

4 固定ストラップCをコカンCに通し、折り返してとめます。



2 シーネホルダーに挿入したギプスシーネが脚の中心にくるようにして、シーネホルダーを膝の裏側から当てます。このとき、前合わせの切り込み部が膝蓋骨の中心に合うように位置を合わせます。

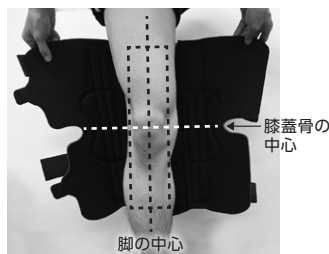

5 固定ストラップBをコカンBに通し、折り返してとめます。



3 前合わせを膝の前面で重ね、仮どめ面ファスナーをとめます。



6 固定ストラップAをコカンAに通し、折り返してとめます。




裏面に続く

- 7 固定ストラップDをコカンDに通し、折り返してとめます。



装着完了時(右脚の場合)

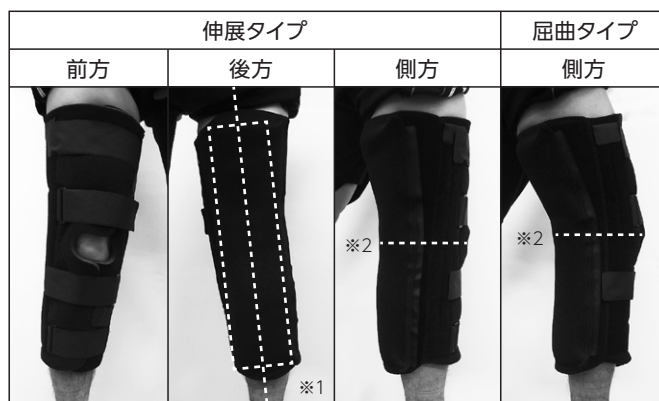

※1: 脚の中心とギブスシーネの中心が合っている。
 ※2: 切り込み部と膝蓋骨の中心の位置が合っている。

- 8 本体のゆるみやズレがないか右図(装着完了時)を参照し、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。固定ストラップが長い場合は、カットしてください。

ステー、ギブスシーネの取り外し


●以下は屈曲タイプを示しています。伸展タイプも同様に取り外してください。

屈曲タイプの例

ステー
 上下はありません。ステーカバーの形状に沿って差し込んでください(伸展タイプのステーに前後はありません)。

ギブスシーネ
 上下、外側・肌側を間違えないようにシーネポケットに挿入してください。水色の面が外側になります。

ギブスシーネを奥まで入れてください。ポケット面ファスナーにフェルトパッドが当たらないように、面ファスナーをとめてください。

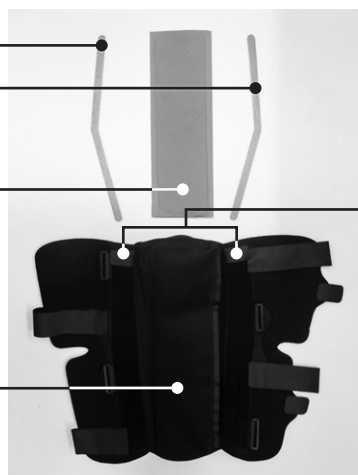

- M・Lサイズは、ステーカバーのステー差し込み口が2ヶ所あります。使用状況に合わせてステーの差し込み口を選んでください。また、再度入れる際は前後の入れ間違いに注意してください。
- ステーカバー上端のステー面ファスナーは、中のステーが飛び出さないようにしっかりとめてください。

注意

洗濯の際に抜いたステー、ギブスシーネを再度入れ直すときは、ステーの向き、ギブスシーネの上下、外側・肌側を間違えないでください。製品が正しく機能しない場合があります。

お手入れ方法

注意

- ・洗濯の際に抜いたステー、ギブスシーネを再度入れ直すときは、ステーの向き、ギブスシーネの上下、外側・肌側を間違えないでください。製品が正しく機能しない場合があります。
- ・色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移りやすくなります。
- ・他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

- ・洗濯の際はステー、ギブスシーネを抜いてください。
- ・シーネホルダーは洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- ・洗濯の際は、面ファスナーを本体、ストラップにとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- ・アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- ・乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- ・本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

※本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分にしたがってください。
 ※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

製造販売業者 **日本シグマックス株式会社** 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料) 受付時間:9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く