

COLLAR KEEPER COLLAR KEEPER・U

**カラーーキーパー
カラーーキーパー・U**

〈頸椎固定用シーネ〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

頸部の固定

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本使用説明書は、カラーキーパーおよびカラーキーパー・Uに共通です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 本体生地に面ファスナーをつけるないでください。生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

**!
警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

**!
注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

● 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

●アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。

●装着部に傷、痛み、しづれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

●頸部以外の部位に使用しないでください。

●サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。

●就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。

●長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。

●上下、表裏、前後を正しく使用してください。

●装着手順に従って正しく使用してください。

●サポートー本体をきつく締めすぎないでください。



 <p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。 ● 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ● 本使用説明書に記載されている方法以外の加工、改造、修理を行わないでください。 ● 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。 <p>本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● つけごちが悪いなど違和感がある場合。 ● 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しづれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
--	--


 <p>注意</p>	<p>面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。</p>
	<p>本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p> <p>面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。</p>

お手入れ方法


 <p>注意</p>	<p>色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p>
	<p>他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。</p>

- 製品本体は手洗いで洗濯できます。ていねいに押し洗いし、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で吊り干しにしてください。
- カバーのみ洗濯機で洗濯できます。洗濯の際は洗濯ネットを使用し、洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーA面をB面にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。またウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称

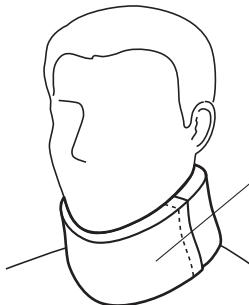


カラーキーパー

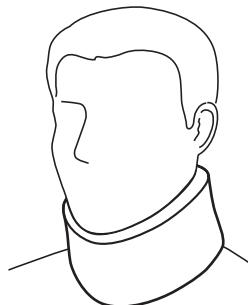


カラーキーパー・U

カラーキーパー

【製品の表側】

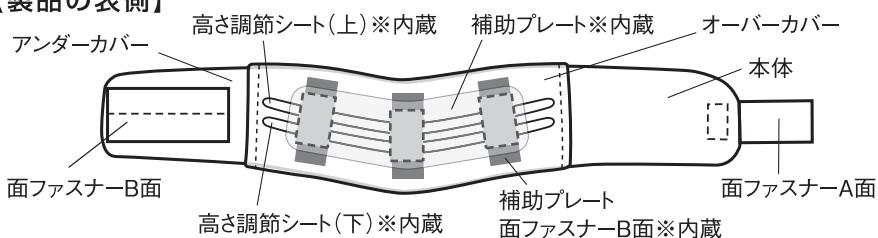


【製品の裏側】

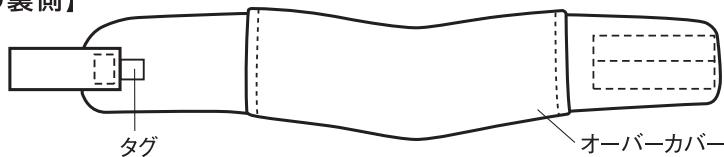


カラーキーパー・U

【製品の表側】

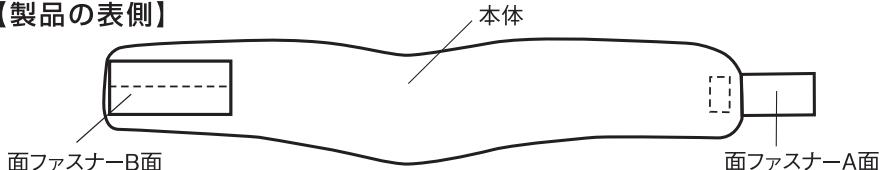

【製品の裏側】

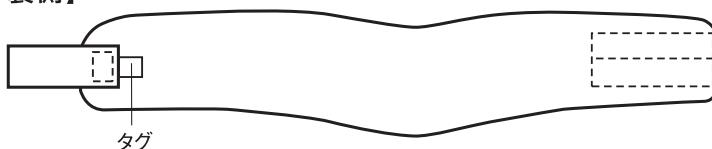


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2~3の【使用上の注意—必ずお読みください】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではカラーキーパーを示していますが、カラーキーパー・Uも同じように装着してください。


<高さの調節について> ※カラーキーパーのみ

- 本品は高さ調節シートを抜くことで、本体の高さが調節できます。高さを調節して装着する場合は、使用前に下記の手順にしたがって、調節してください。
- 必ず医師の指示に従って本体の高さを調節してください。
- 補助プレートは必ず、本体に取りつけてください。


1 オーバーカバーを取り外し、アンダーカバーをめくります。

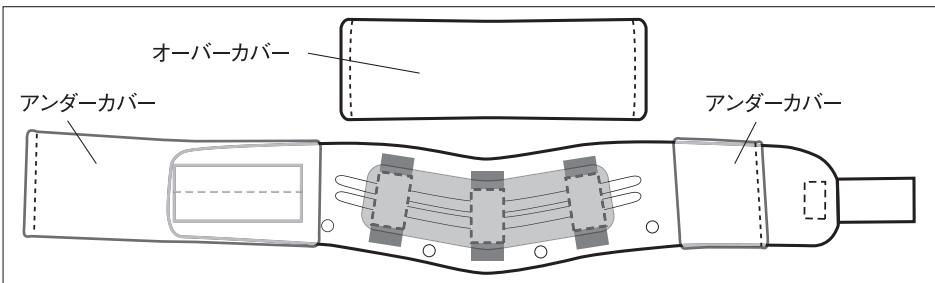


2 補助プレートを取り外します。

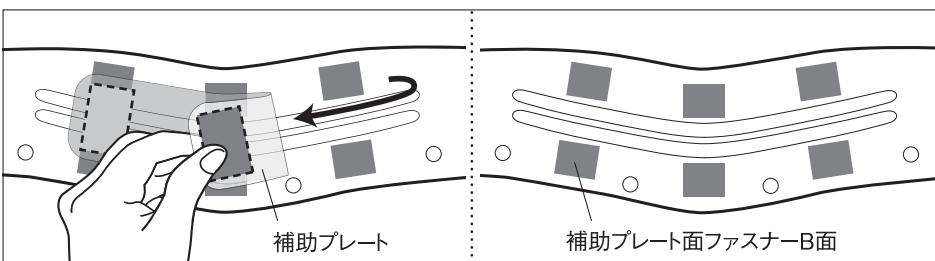


3 高さ調節シートを抜き取ります。高さ調節シートは1つあたり1cmの高さが調節でき、最大で2cmの調節が可能です。
※1cmのみの高さ調節の場合は、高さ調節シート(下)を抜き取ります。

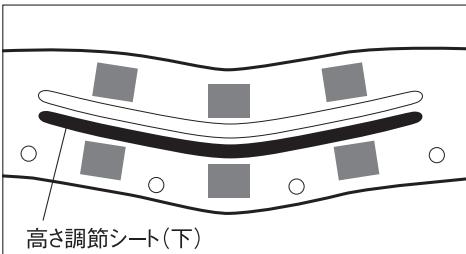

- 4** 本体の高さを低くした状態で、再度、補助プレートを補助プレート面ファスナーB面に取り付けます。
※図は上下の高さ調節シートを抜き取った状態です。

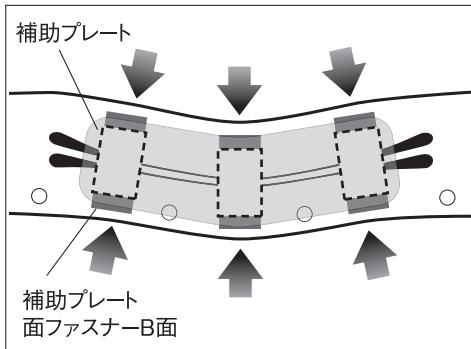

- 5** アンダーカバーを本体に被せ、その上からオーバーカバーを被せます。

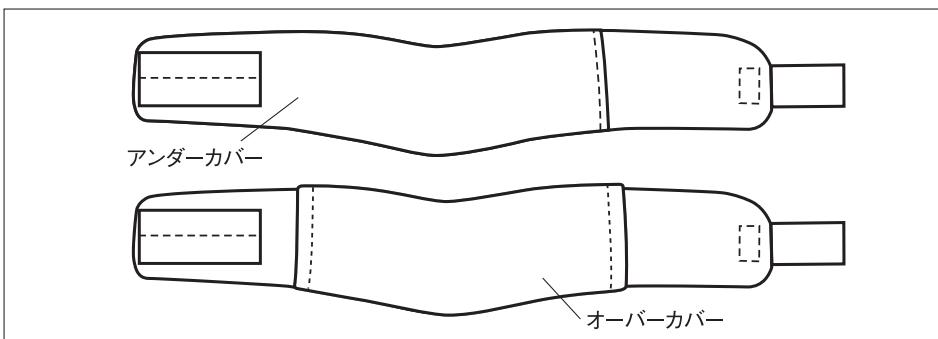


<本体の装着方法>


- 1** 本体の面ファスナーを取り外します。

本品は中央にへこみのある方が上で、タグがある方が裏側（肌に当てる側）になります。


【製品の表側】

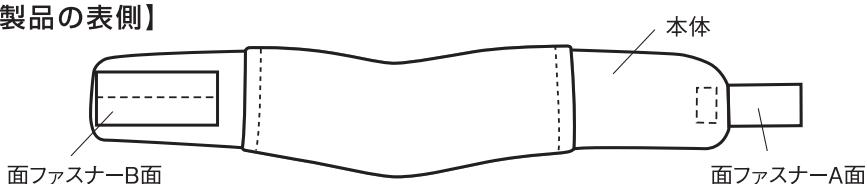


【製品の裏側】

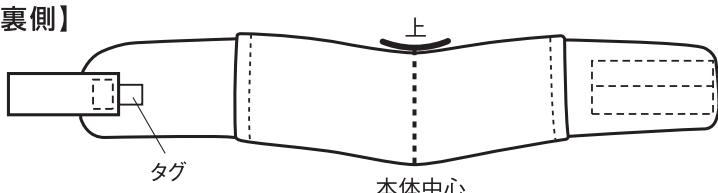


2 本体中心のへこみ部分にあごを合わせます。

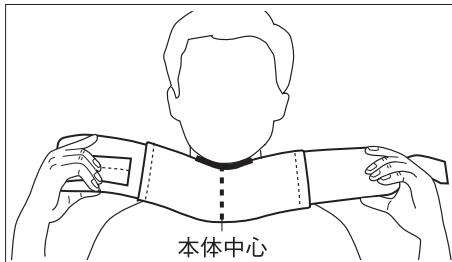

3 あごが本体の上にしっかり乗るように首に巻きます。

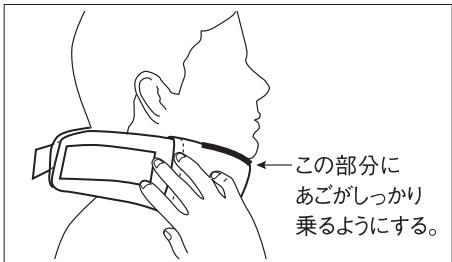


4 後部の面ファスナーをとめます。面ファスナーのA面とB面を重ねてとめてください。
※面ファスナーA面がB面より長い場合は、A面の余る部分をカットしてください。

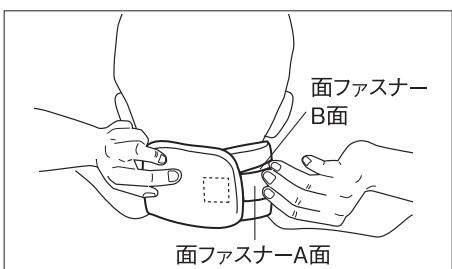


5 本体のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。


装着完了時(カラーキーパーの場合)

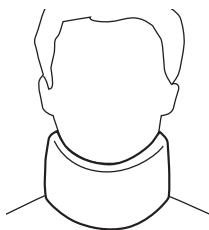

【前から見た図】

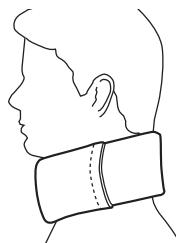


【横から見た図】

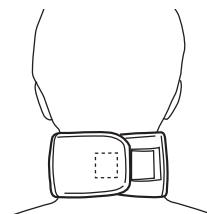


【後ろから見た図】


装着完了時(カラーキーパー・Uの場合)

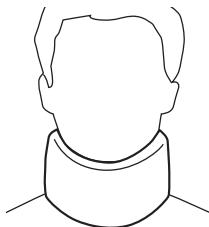

【前から見た図】

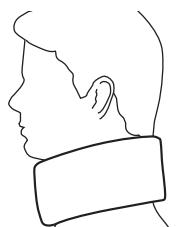

【横から見た図】

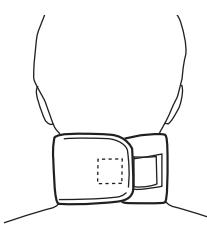

【後ろから見た図】

素 材

<カラーキーパー>

素 材	
繊維	ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
繊維以外	ポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン

<カラーキーパー・U>

素 材	
繊維	綿、ナイロン
繊維以外	ポリウレタン

※ お願い… 本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


サイズ表

<カラーキーパー>

サイズ	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1 箱入数
SS	25cm～30cm	6.5cm～8.5cm	1コ
S	30cm～35cm	7.0cm～9.0cm	1コ
M	35cm～40cm	7.5cm～9.5cm	1コ
L	40cm～45cm	7.0cm～9.0cm	1コ

<カラーキーパー・U>

サイズ	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1 箱入数
S	30cm～35cm	8.0cm	1コ
M	35cm～40cm	8.5cm	1コ
L	40cm～45cm	8.0cm	1コ

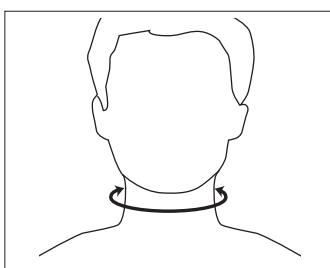

● サイズの選び方

首まわりに合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※ 製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※ 製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シリマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2016.12(改版)
168935