

Faciliaid Supporter

ファシリエイドサポーター

外反母趾

〈外反母趾用サポーター〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 外反母趾のサポート

はじめにお読みください


- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品には右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。


ご使用にあたって

- 生地の特性上、しわがキズのように見える場合がありますが、品質には問題ありません。
- パッドに鋭利なものを当てたり、爪を立てたりしないでください。破損の原因となります。
- 本体生地に面ファスナーをつけないでください。生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告** …… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意** …… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容




本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。


異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。


次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 足部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 各種ストラップをきつく締めすぎないでください。 ● パッドに違和感がある場合は、パッドを使用しないでください。 ● 靴を履く際や使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。 ● 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ● 本品の加工、改造、修理を行わないでください。 ● 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
	<p>本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● つげごちが悪いなど違和感がある場合。 ● 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

 注意	<p>面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。</p>
	<p>本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p>
	<p>面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。</p>


お手入れ方法

 注意	<p>色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。</p>
	<p>他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。</p>


- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯の際は中性洗剤を使用し、洗濯ネットに入れてください。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- パッドは洗濯できます。本体に取りつけたまま洗濯してください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを外側ストラップにとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※本品には右足用・左足用があります。図は右足に装着しています。

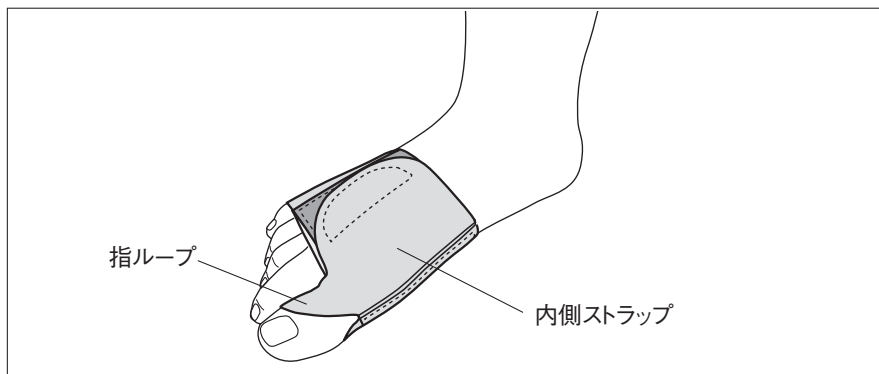


【製品の表側】

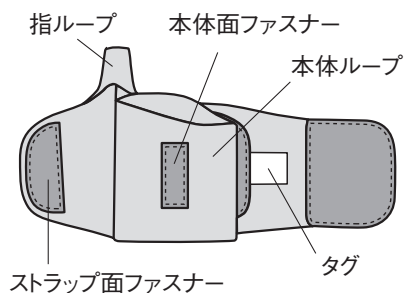

【製品の裏側】

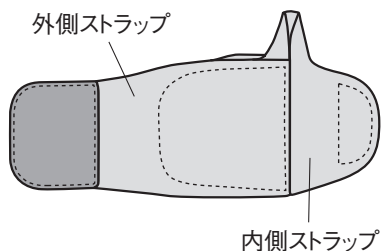

【外側ストラップの内側】

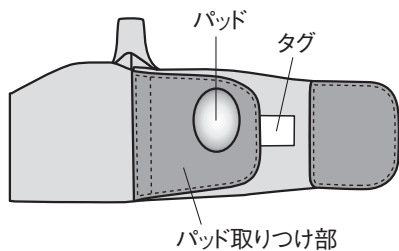


※パッドは取り外し可能です。


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右足の場合です。左足に装着する場合も同じように装着してください。


- 1** サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏を確かめてください。本品は指ループのある方が指側で、本体面ファスナーのある方が足の甲側になります。
タグの矢印の向きで製品の向きを確認してください。

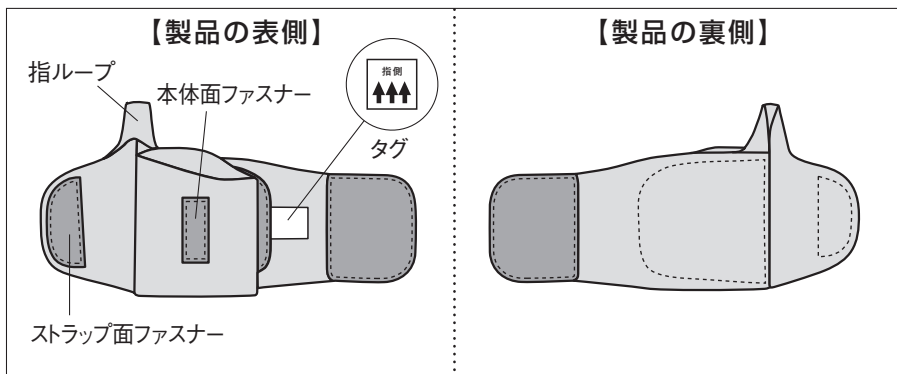


- 2** 本体ループを足に通します。このとき、本体ループの指側の端を指のつけ根に合わせます。

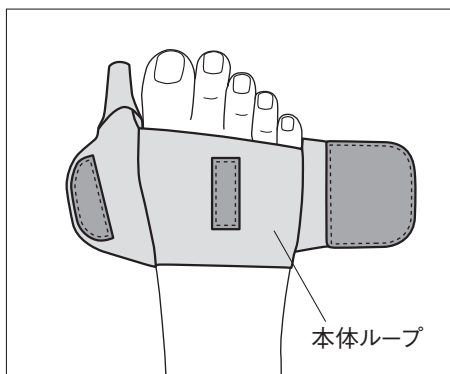


3 足の幅の中心に本体面ファスナーを合わせ、母趾を指ループに通します。

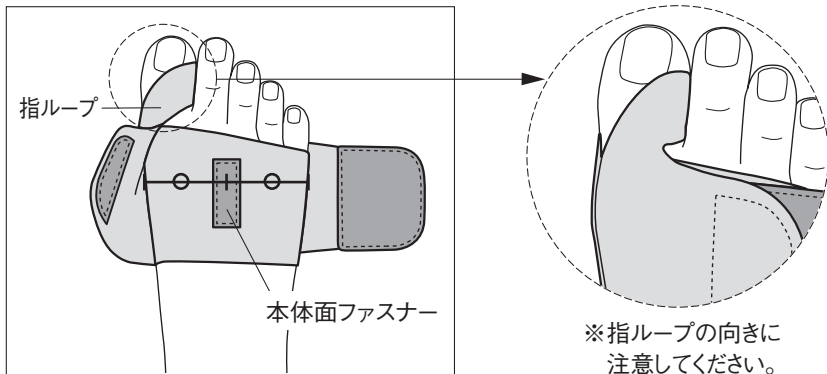


4 パッド取り付け部に、パッドを縦長の向きで取り付けます。パッドは、図の位置を目安に合わせてください。※パッドは取り外し可能です。

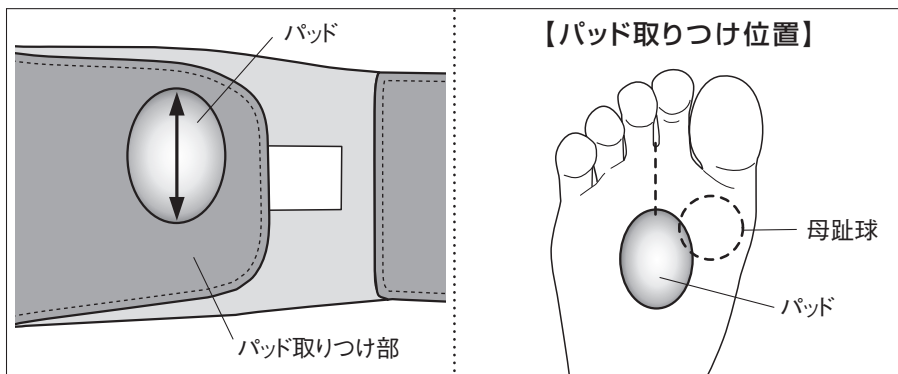


5 外側ストラップを引っ張り、本体面ファスナーにとめます。

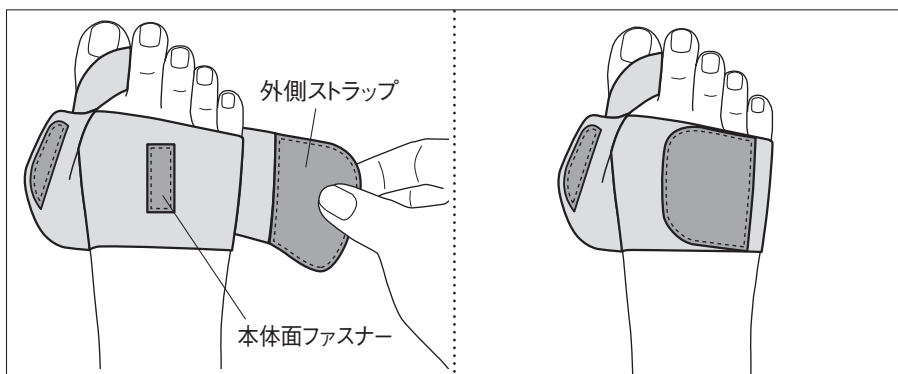

6 内側ストラップを引っ張り、ストラップ面ファスナーを外側ストラップにとめます。

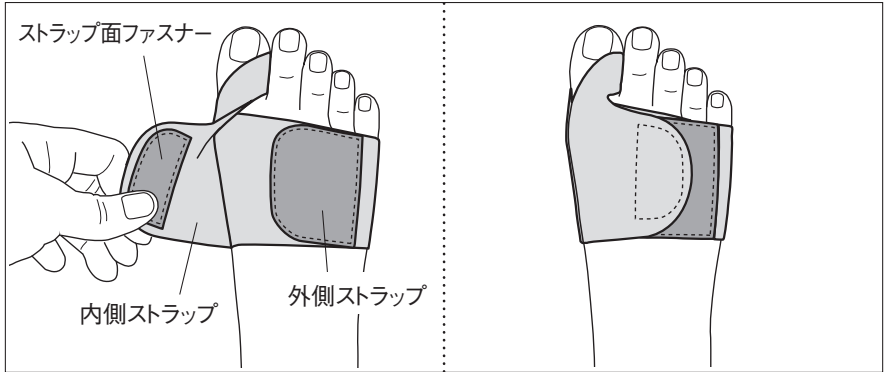

7 サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

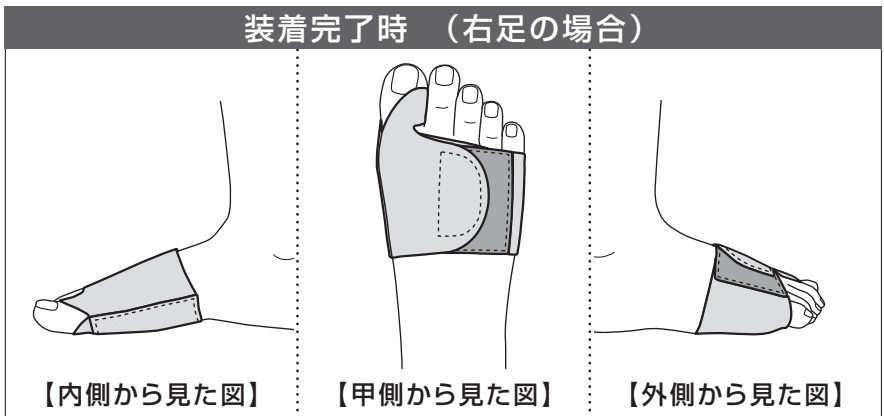


素 材

素 材	
繊維	ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	ポリスチレン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ		適用範囲(足囲)	1箱入数
右S	左S	21cm ~ 23cm	1コ
右M	左M	23cm ~ 25cm	1コ
右L	左L	25cm ~ 27cm	1コ

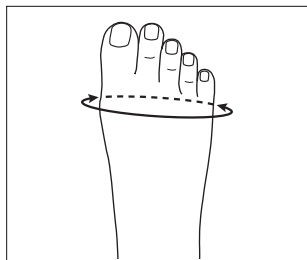

●サイズの選び方

足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。

計測値が2サイズのみになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2018.01(作成)

168655