

Rib Band Fit

リブバンドフィット

〈胸部固定帯〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

胸部の圧迫、固定

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしも圧迫、固定できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 本品は滅菌できません。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 妊娠中または妊娠していると思われる場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 処方された部位以外に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。



警告

- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 表裏を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



注意

面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。

面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

お手入れ方法




注意

他の衣類などと一緒洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。


- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※本品は左右兼用です。図は胸部の左側を圧迫、固定するときを使用する場合です。
※胸部の右側を圧迫、固定するときを使用する場合は、製品の左右が逆になります。

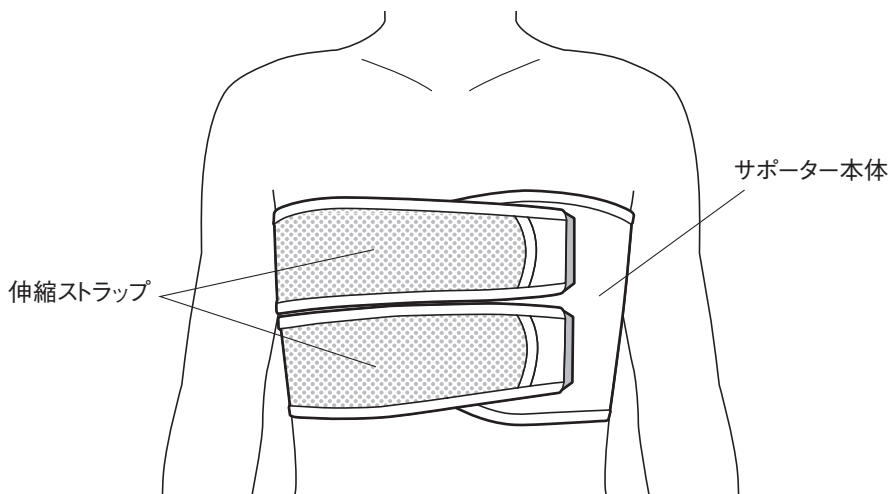

【製品の表側】

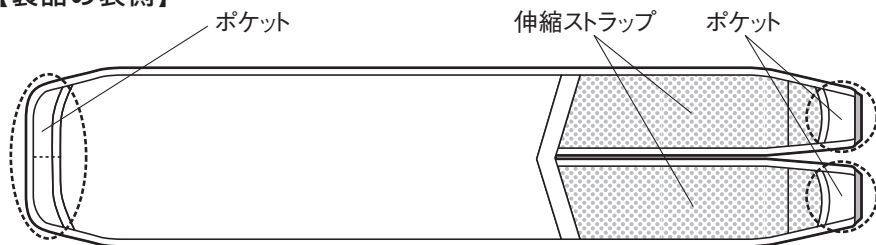


【製品の裏側】

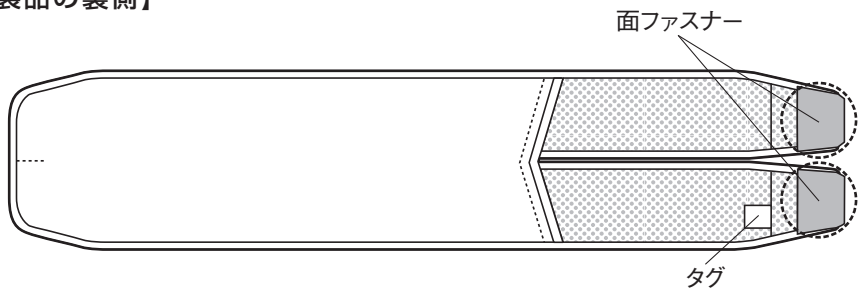


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は胸部の左側を圧迫、固定するときを使用する場合があります。胸部の右側を圧迫、固定するときを使用する場合は製品の向き(左右)をかえて、同じように装着してください。


- 1** サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の表裏を確かめてください。本品はタグのある方を体に向け、サポーター本体を患部に当てて装着します。

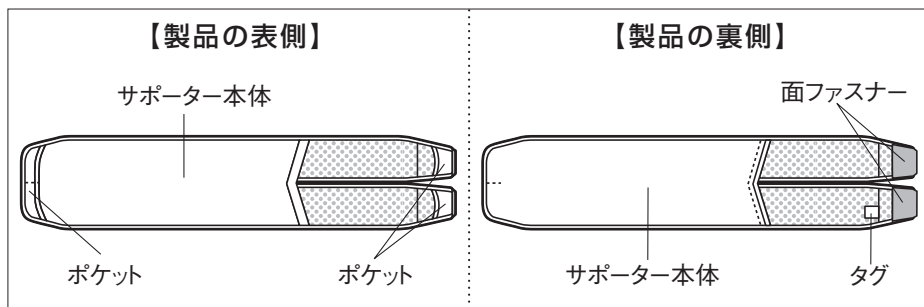


- 2** 患部側の手でサポーター本体を持ち、もう一方の手で下側の伸縮ストラップを持ちます。その際、ポケットに指を引っ掛けると持ちやすくなります。

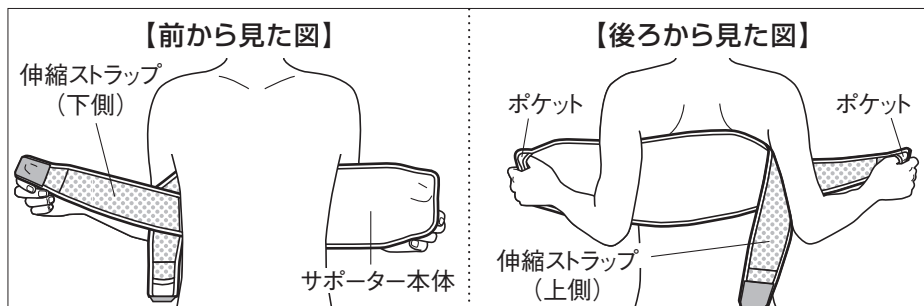


- 3** サポーター本体を患部に当て、息を吐ききった状態で、下側の伸縮ストラップを適度な力で外側へ引っ張りながら体に巻きつけます。

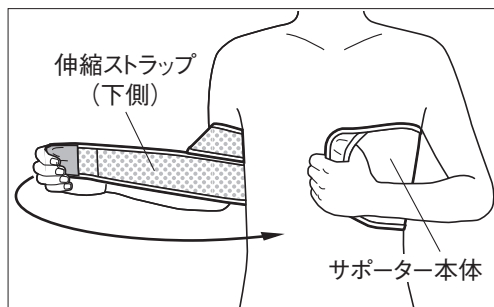

- 4** 体の前で下側の伸縮ストラップをサポーター本体の上へ重ね、面ファスナーをしっかりととめます。

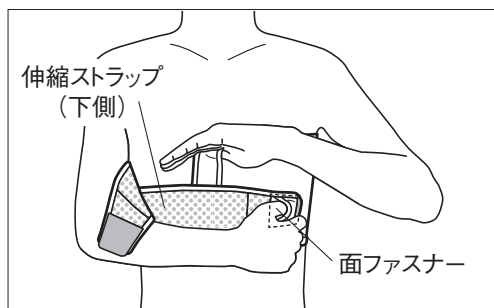


- 5** 次に上側の伸縮ストラップを面ファスナーでしっかりととめます。

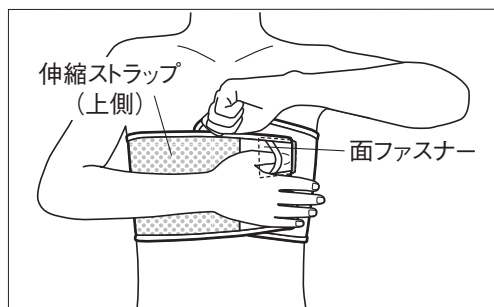


- 6** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時（左側圧迫、固定の場合）

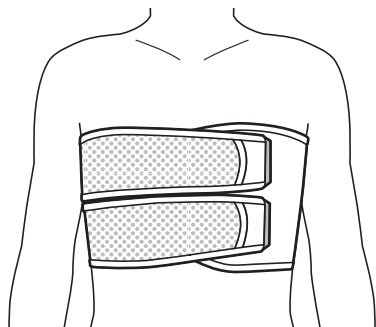

【前から見た図】

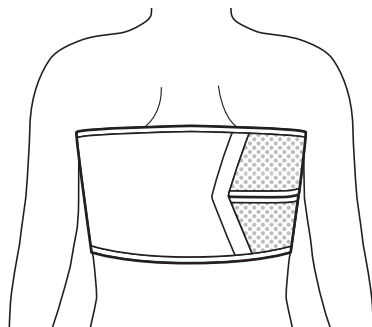

【後ろから見た図】

素 材


素 材

繊維	ポリエステル、ナイロン、綿、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(胸囲)	1箱入数
S	60cm～80cm	1コ
M	80cm～100cm	1コ
L	100cm～120cm	1コ
LL	120cm～140cm	1コ
3L	140cm～160cm	1コ

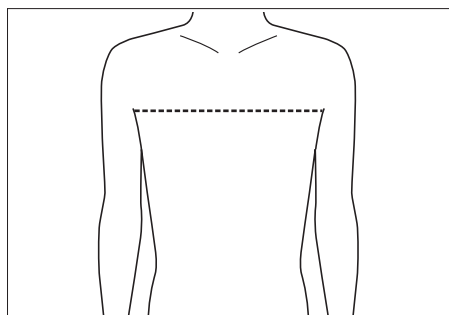

●サイズの選び方

胸囲に合わせて選んでください。胸囲は腋下の高さの胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2017.10(改版)
168916