

# アンダーパッド C

## — 使用説明書 —

### はじめにお読みください

- 本品は未滅菌品です。
- 本品はオートクレーブ滅菌（設定温度：126℃以下）ができます。
- 針、爪などの鋭利なもので本品を傷つけないでください。
- 素材の特性上、保管状態または使用状況により変色する場合がありますが、製品の機能には問題ありません。
- 製品の特性上、しわがある場合や、製品寸法が多少異なる場合があります。

### 使用上の注意



警告

- 本品と接触する部位に痛み、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合は適切な処置をしてから使用してください。
- 本品の使用中に痛み、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が発生したら、ただちに使用を中止し、適切な処置をしてください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。



注意

- 本品は切って使用しないでください。吸収材が飛散する場合や、吸収した水分が漏れる場合があります。
- 本品はディスプレイ製品です。再使用しないでください。

### 保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

### 素材

素 材	
トップシート、ボトムシート	ポリプロピレン
吸収材	パルプ

### 廃棄方法

- 本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。体液などが付着している場合は、汚染された部分を内側にして、衛生的に処理してください。

### 製品規格

種 類	寸法（幅×長さ） ※多少異なる場合があります。	1 ケース入数	備 考
P4360	43 cm × 60 cm	300 枚 (25 枚×12 袋)	
P5888	58 cm × 88 cm	150 枚 (25 枚× 6 袋)	
P7575	75 cm × 75 cm	150 枚 (25 枚× 6 袋)	
SA7575	75 cm × 75 cm	100 枚 (25 枚× 4 袋)	高吸収タイプ
P75178	75 cm ×178 cm	50 枚 (25 枚× 2 袋)	ベッドタイプ

※製品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良等お気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。