

CAST BOOT

キャストブーツ

〈ギプスウォーカー〉

—— 使用説明書 ——

安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
またいつでもお読みになれるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況によって、必ずしも足部の汚れやギプス等の破損、水濡れを防止できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。

ご使用にあたって

- 本品は滅菌できません。
- 本品のしわなどがキズに見える場合がありますが、品質には問題ありません。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

 警告	本品の使用に際しては必ず医師の指示に従ってください。
	異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。 ●アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。 ●装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合。
	次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 ●足部以外の部位に使用しないでください。 ●サイズの合った製品を使用してください。 ●就寝時は使用しないでください。 ●装着手順に従って正しく使用してください。 ●ストラップをきつく締めすぎないでください。



- 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。
- 濡れた床など滑りやすい場所を歩く場合は、滑らないように注意して使用してください。
- 本品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品の使用中に、怪我、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。



面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。


本品は、水濡れや摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

お手入れ方法

- 本品は手洗いで洗濯できます。押し洗いし、絞らずタオルなどで水気を取って、日陰で吊り干しにしてください。
- 簡易的に汚れを落とす場合には、濡らした布などで汚れをふき取ってください。薬品などは本品をいためる原因となりますので使用しないでください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングもウェットクリーニングもできません。


各部の名称

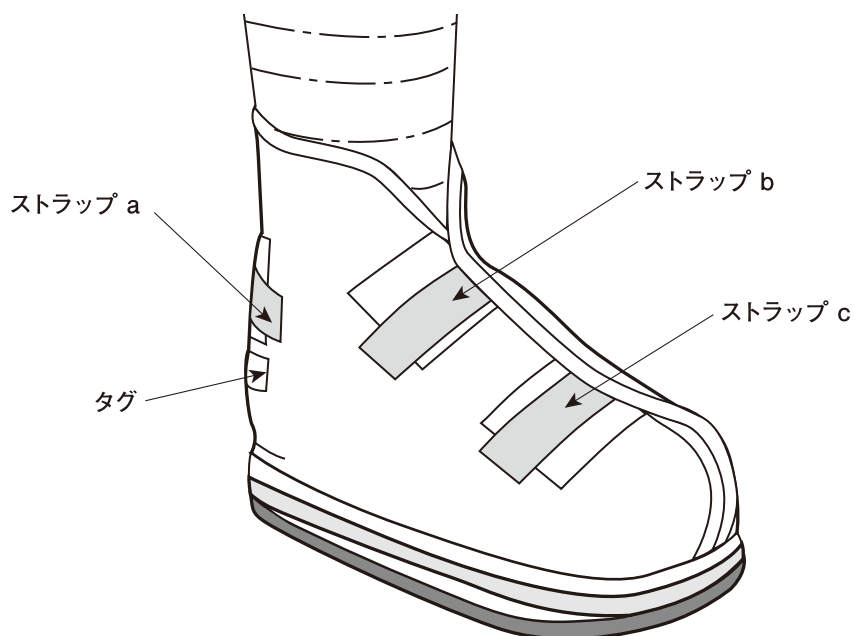


装着手順

- 装着前に本使用説明書のP.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

- 1** 本品の面ファスナーをすべて外し、ブーツの後部に踵を合わせるように履きます。

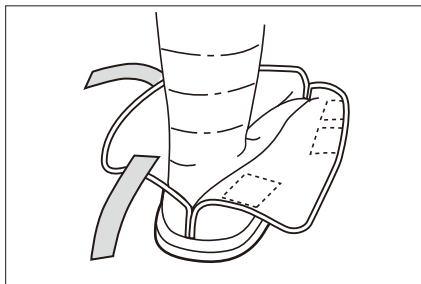


- 2** ブーツ後部のストラップaをとめます。

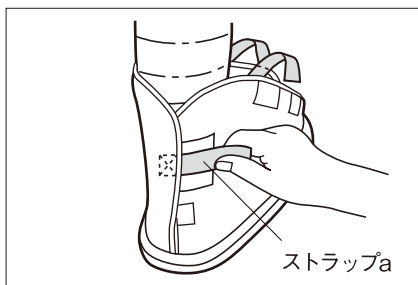

- 3** ブーツの中で足がずれないように、引っ張りながらストラップb、cをとめます。



- 4** ストラップが長すぎる場合は、余分なストラップ部分をカットしてください。

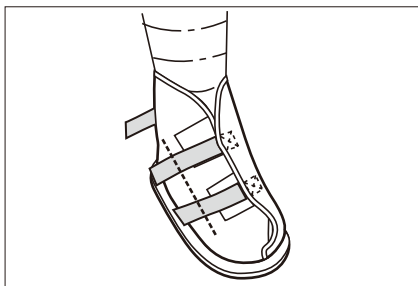

装着完了時



サイズ表

サイズ	適用範囲 (靴サイズ)	1箱入数
S	19 cm ~ 22 cm	1コ
M	22 cm ~ 25 cm	1コ
L	25 cm ~ 28 cm	1コ

●サイズの選び方

靴サイズに合わせて選んでください。

サイズを選ぶ際には、仮合わせすることをお勧めします。

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く