



医療用 弾性ストッキング

AT STOCKING


ATストッキング



弾性ストッキングは安静時、 臥床時の下肢静脈還流をサポートします。

安静を強いられると 下肢の血流にうっ滞が起こります。

人間は普段、歩行や運動などで下腿の筋を動かしたり、足底に圧が加わることで下肢の静脈還流を促進させています。しかし長時間に及ぶ手術や、長期臥床により安静を強いられると、静脈還流が阻害され下肢に血流のうっ滞が起こり血栓ができやすくなります。

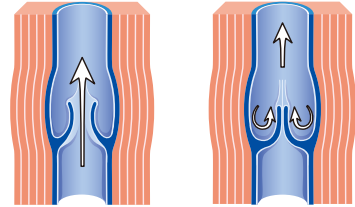


骨格筋の収縮運動が少なくなって弛緩している状態。

下肢の静脈還流を促すためには？

下肢の静脈還流を促すためにはいくつかの方法がありますが、足首から大腿部に向けて段階的に圧を調節した弾性ストッキングの装着は静脈血の還流をサポートすることが知られています。Sigelらの研究*により、適しているといわれる圧迫圧は「足首18mmHg・ふくらはぎ14mmHg・膝窩部8mmHg・大腿下部10mmHg・大腿中間部8mmHg」です。

*Sigel.B.,et al.;Arch.Surg.,110;171,1975

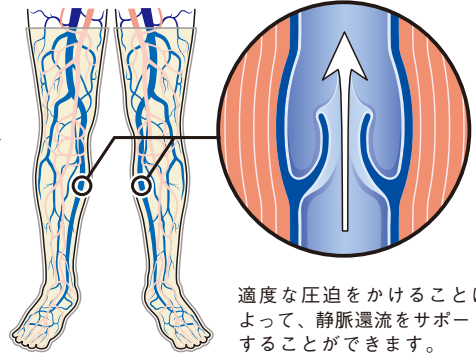

適度な圧迫をかけることによって、静脈還流をサポートすることができます。


ATストッキングは、患者様の履き心地と 医療現場での使いやすさを両立した 弾性ストッキングです。

段階的圧迫法 (Graduated Compression) 設計

ATストッキングの圧迫圧は、足首部分で24.7hPa(18.5mmHg)。

上部に行くにしたがって段階的に圧迫圧を弱めていく

段階的圧迫法 (Graduated Compression) 設計になっています。

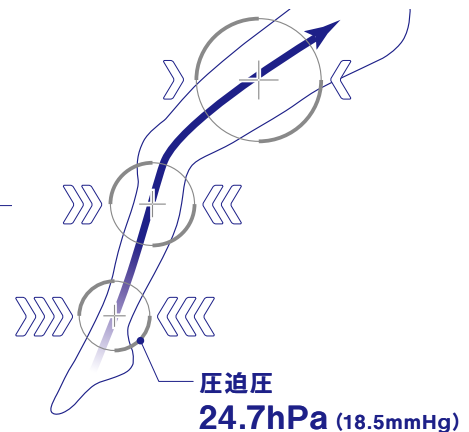

圧迫圧
24.7hPa (18.5mmHg)

用途に応じて選べるタイプと豊富なサイズ構成



脚の太さと長さに対応するため、股下、膝下の2タイプを用意。それぞれ、サイズと丈のバリエーションを取り揃えているため、脚形状に合った製品をお選びいただけます。

足底観察穴、サイズ・長さ識別カラー

足底の観察穴で血流を確認

足底部分に観察穴を設けているので、容易に血流状態を確認できます。



サイズ・長さ識別カラー

足底の観察穴の縁取り部を色分けし、長さを識別できます。また、膝元および大腿部裏側にサイズ識別用の色のついたラインが入っています。

観察穴(足裏部)

| | |
|-------|-----|
| Xショート | あお |
| ショート | ピンク |
| レギュラー | しろ |



※写真はショートの場合

上部(膝元及び大腿裏側)


| | |
|----|------|
| SS | みずいろ |
| S | きいろ |
| M | しろ |
| L | あお |
| LL | みどり |
| 3L | むらさき |



※写真はSサイズの場合

その他の特長

- つま先部分は、不要な圧迫を避けるために編み方を変えています。
- 適正な装着位置を確保できるよう、目印を設けています。
<踵:ブルーゾーン 膝下:ライン>

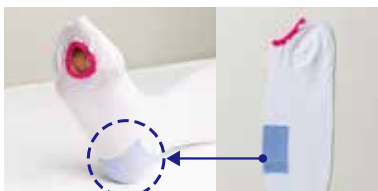

踵をブルーゾーンに合わせて装着してください。



股下の場合：
大腿部の裏側



膝下の場合：
膝元を折り返した部分

肌触りがよく通気性に優れた素材

肌触りが柔らかく、通気性に優れた素材を使用。
長時間の装着でもムレにくく、快適にご使用いただけます。

■ 保険情報


B001-6「肺血栓塞栓症予防管理料305点」

注1：病院（療養病棟を除く。）又は診療所（療養病床に係るものを除く。）に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの（結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。）に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

注2：肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
(2022年4月現在 厚生労働省告示および関連通知より一部引用)

脚の太さと長さにフィットする広い適用範囲と充実のサイズ構成。

膝下

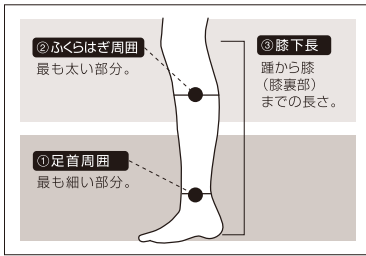


左図の3ヶ所を計測し、「①足首周囲」、「③膝下長」を基準にして製品を選んでください。

| 品番 | 長さ・サイズ | 適用範囲 | | | サイズの色分け | |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| | | ①足首周囲 | ②ふくらはぎ周囲 | ③膝下長 | 膝元 | 足裏 |
| 554101 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 30.5cm~36.0cm | きいろ | ピンク |
| 554102 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 33.0cm~38.0cm | しろ | |
| 554103 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 35.5cm~41.0cm | あお | |
| 554104 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 35.5cm~41.0cm | みどり | |
| 554105 | ショート3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 35.5cm~41.0cm | むらさき | しろ |
| 554200 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 31.0cm~36.5cm | みずいろ | |
| 554201 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 36.0cm~40.5cm | きいろ | |
| 554202 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 38.0cm~43.0cm | しろ | |
| 554203 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 41.0cm~45.5cm | あお | |
| 554204 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 41.0cm~45.5cm | みどり | |
| 554205 | レギュラー3L | 27.5cm~30.5cm | 47.0cm~52.0cm | 41.0cm~45.5cm | むらさき | |

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
 <差が1サイズ以内の場合>----- 「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
 <差が2サイズ以上の場合>----- 適用できません。
- 「①足首周囲」が30.5cm、「②ふくらはぎ周囲」が52.0cm、「③膝下長」が45.5cmを超える場合は適用できません。

股下

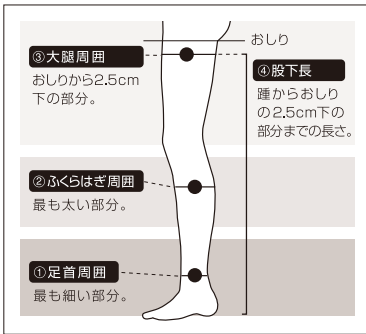

左図の4ヶ所を計測し、「①足首周囲」、「④股下長」を基準にして製品を選んでください。

| 品番 | 長さ・サイズ | 適用範囲 | | | | サイズの色分け | |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| | | ①足首周囲 | ②ふくらはぎ周囲 | ③大腿周囲 | ④股下長 | 大腿 | 足裏 |
| 555001 | XショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | 58.5cm~66.0cm | きいろ | あお |
| 555002 | XショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | | しろ | |
| 555003 | XショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | 66.0cm~73.5cm | あお | ピンク |
| 555100 | ショートSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | | みずいろ | |
| 555101 | ショートS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | | きいろ | |
| 555102 | ショートM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | | しろ | |
| 555103 | ショートL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | | あお | |
| 555104 | ショートLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | | みどり | |
| 555200 | レギュラーSS | 15.0cm~17.5cm | 23.0cm~30.0cm | 33.0cm~48.0cm | 73.5cm~78.5cm | きいろ | しろ |
| 555201 | レギュラーS | 17.5cm~20.0cm | 25.0cm~32.0cm | 40.5cm~55.5cm | | みずいろ | |
| 555202 | レギュラーM | 20.0cm~22.5cm | 32.0cm~37.0cm | 48.5cm~63.5cm | | しろ | |
| 555203 | レギュラーL | 22.5cm~25.0cm | 37.0cm~42.0cm | 58.5cm~73.5cm | | あお | |
| 555204 | レギュラーLL | 25.0cm~27.5cm | 42.0cm~47.0cm | 63.5cm~78.5cm | みどり | | |

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
 <差が1サイズ以内の場合>----- 「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
 <差が2サイズ以上の場合>----- 適用できません。
- 「①足首周囲」が27.5cm、「②ふくらはぎ周囲」が47.0cm、「③大腿周囲」が78.5cm、「④股下長」が78.5cmを超える場合は適用できません。
- 寸法が適用外になってしまった場合は「膝下」をご参照ください。

販売名: ATソッキング
 一般的名称: 弾性ソッキング (JMDNコード: 31724000)
 医療機器分類: 一般医療機器
 医療機器届出番号: 13B2X0018700002

製造販売業者:

日本シグマックス株式会社

本社: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
 受付時間: 9時~17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。