



HS404-000

# **CAST SAW** **C400**

Compact & Safety 超軽量ギブスカッタ



# キャストソーC400が生み出す「4つの 」で、ギプスカッターはさらなる進化を始めます。

コンパクト(簡易性)、コンフォート(快適性)、コンフィデンス(信頼性)、コンビネーション(組合せ選択性)。  
この4つのキーワードを徹底的に追求した結果、まさに理想的な電動式ギプスカッターが誕生しました。  
本体約400gの超軽量コンパクト設計とCSブレードにより、低温で安全、快適な操作性を実現。  
それが、「CAST SAW C400」。ギプスカッターの次なるステージを切り拓きます。



## 約400gという超軽量設計で優れた操作性を実現

カッター本体は、約400gという超軽量ハンドピース。使いやすさを追求したコンパクト設計なので、手の小さな方でもラクに使用できます。



## 保管や移動に便利なキャリアケース付き

必要なものをすべて収納できるオリジナルケースをご用意。移動のときはもちろん、保管時にも確実に製品を守ります。




## スピーディーに作業できるフローティングカット

従来品のように切断位置を変えながらカットするのではなく、最後まで一気にカットできる「フローティングカット」が可能。高速回転で、よりスピーディー&シャープに切断できます。また、ハンドピース本体にスイッチがあるので、作業がスムーズに行えます。



## 細かなカットも自由自在

徹底した軽量化と握りやすいハンドル設計により、これまで難しかった細かなカットも簡単にできるようになりました。トリミングや窓開けなど、微妙なカットも自在。オペレーターへの負担も小さく、効率的です。

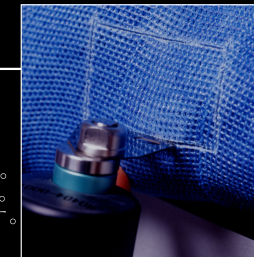

## ショルダーストラップを付ければどこでも作業可能

バッテリーにはショルダーストラップを取り付けることができるので、作業中も邪魔になりません。



## 低温&安全にカットできるCSブレード

CSブレードは、冷却ホールによって、発生した熱を素早く拡散・冷却。いつでも低温でカットできます。また、CSブレードの角を丸くしているため、万一肌に触れても傷つけることはありません。




## 扇型ブレードだから、患者さんの不安を解消

円型ブレードは回転しているように見えてしまうため、どうしても患者さんは不安になりがちでした。これを解消するために、キャストソーC400は扇型ブレードを採用。視覚的にも安心感を与えます。



## バッテリー&パワーサプライで電源切れの心配なし

バッテリーとパワーサプライの2つをご用意。バッテリー充電によりどんな場所でも使える方法と、電池切れの心配がないパワーサプライをつなげての使用のどちらも可能になりました。使用条件や好みに合わせて選択できます。

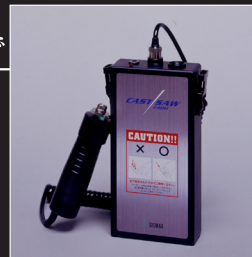

## ニーズに合わせた3つのセット

「フルセット」(ハンドピースとパワーサプライ、バッテリー)、「パワーサプライセット」(ハンドピースとパワーサプライ)、「バッテリーセット」(ハンドピースとバッテリー)の3タイプを選択できます。いずれのセットも収納ケースをご用意しています。



# キャストソー C400

## フルセット

内容：  
ハンドピース、バッテリー、  
パワーサプライ、CSブレード×2



## バッテリー セット

内容：  
ハンドピース、  
バッテリー、  
CSブレード×2



## パワー サプライ セット

内容：  
ハンドピース、  
パワーサプライ、  
CSブレード×2

品番	種類	1箱入数
603500	フルセット	1セット
603501	バッテリーセット	1セット
603502	パワーサプライセット	1セット

### <別売品>

品番	商品名	1箱入数
603510	ハンドピース	1台
603511	バッテリー	1台
603512	パワーサプライ	1台
603513	キャリアケース	1コ
603514	CSブレード	1枚

ハンド ピース	本体の寸法	長さ150mm×Ø38
	本体の質量	約0.4kg
	切削速度	14,000サイクル/分
	騒音レベル	約64dB(A)
	定格時間	10分
バッテ リー	本体の寸法	220mm×45mm×110mm
	本体の質量	約0.8kg
	定格入力	DC 31.9V
	消費電力	8VA(無負荷運転時)
	充電時間	約16時間
	電撃に対する保護の形式及び程度	内部電源機器 BF形
パワ ーサ プ ラ イ	本体の寸法	170mm×54mm×150mm
	本体の質量	約0.7kg
	定格入力	AC100V 50-60Hz
	消費電力	12VA(無負荷運転時)
	電撃に対する保護の形式及び程度	クラスI 機器 BF形

キャストソーC400 届出番号 13B2X00187000030  
CSブレード 届出番号 13B2X00187000034

**【警告】**  
本品の周辺での携帯電話、無線機器、電気メス、除細動器等、高周波を発生する機器、その他の医療機器等を近づけないこと。またこれらの機器とは別系統の電源を使用すること。  
【本品及び上記の機器等に誤作動が生じるおそれがあるため】

**【禁忌・禁止】**  
本品はギブス材を切断するものであり、この用途以外での使用はしないこと。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3200

■北海道営業所：〒060-0806 札幌市北区北6条西1-4-2 TEL.011(738)5881  
 ■東北営業所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 TEL.022(298)0871  
 ■北関東営業所：〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-169-2 TEL.048(657)3950  
 ■東日本営業所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3210  
 ■南関東営業所：〒231-0023 横浜市中区山下町51-1 TEL.045(663)0261  
 ■中部営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 TEL.052(219)0851  
 ■西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 TEL.06(6398)0290  
 ■中国営業所：〒732-0824 広島市南区の場町1-2-16 TEL.082(264)4701  
 ■四国営業所：〒790-0005 松山市花園町3-21 TEL.089(933)5515  
 ■九州営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-1 TEL.092(474)7821

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>

※本製品に関するお問い合わせは、最寄りの各営業所までお願いいたします。

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。