

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

キュータスα


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 粘着部を創傷に当てないこと。

※【形状・構造及び原理等】

本品の構造は下記のとおりです。
本品は滅菌済みの製品です。

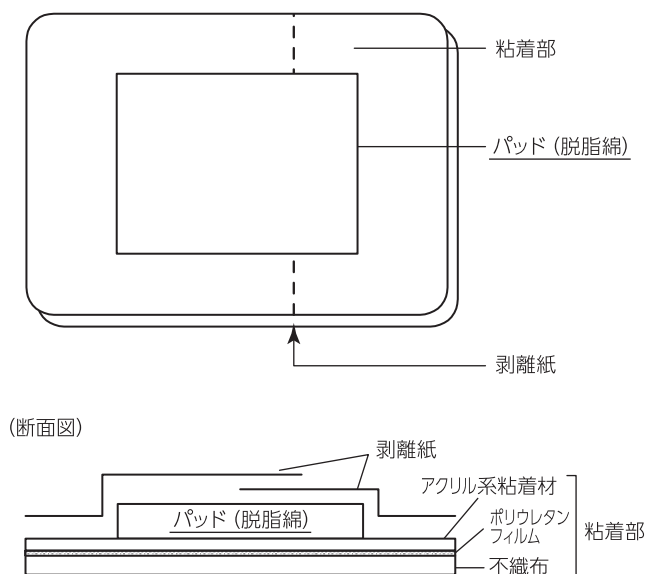

	パッド	粘着部
1号	2.5cm × 3cm	5cm × 5.0cm
2号	3.0cm × 4cm	5cm × 7.2cm
3号	3.0cm × 6cm	6cm × 10.0cm
4号	5.0cm × 7cm	10cm × 12.5cm
5号	5.0cm × 10cm	10cm × 16.0cm
6号	5.0cm × 15cm	10cm × 20.0cm
7号	5.0cm × 20cm	10cm × 25.0cm
8号	5.0cm × 25cm	10cm × 30.0cm

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

1. 創傷とその周囲を清潔にします。
2. 創傷に合うサイズを選び、滅菌バッグから取り出して、パッドに触れないように剥離紙を剥がします。
3. パッドを創傷面に当て周囲の粘着部で固定します。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

皮膚の非常に弱い患者。

2. 重要な基本的注意

- ・滅菌バッグや本品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・本品の使用中に発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が現れた場合には、ただちに使用を中止してください。
- ・本品使用前に、必要に応じて止血処理等を行ってください。
- ・創の観察を十分に行い浸出液の量や創の状態に応じ、適切な交換及び処置を行ってください。
- ・滅菌バッグ開封後は、早急に使ってください。

3. その他の注意

- ・粘着部の一部がパッドまで剥がれた場合は、新しいものに貼り替えてください。
- ・使用中に本品が破損したり、浸出液、血液等が染み出してきた場合は新しいものに貼り替えてください。
- ・本品は滅菌済みで、包装材の破損等がない限り無菌性は保証されていますが、使用時に包装材が破損または汚損している場合には使用しないでください。
- ・本品を再滅菌しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・滅菌バッグの破損に注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。

2. 有効期間

- ・有効期間はバーコードラベルと滅菌バッグに記載されています。使用期限の切れたものは使用しないでください。
- ・有効期間は製造日より3年間です（自己認証による）。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本シグマックス株式会社

連絡先 住所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

電話：0800-222-6122

製造業者：新タック化成株式会社