

MAXBELT

me1/me2/me3

マックスベルト

me1(エムイー・ワン) me2(エムイー・ツー) me3(エムイー・スリー)

〈腰部固定帯〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

腰部のサポート

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本使用説明書は、マックスベルトme1、マックスベルトme2およびマックスベルトme3に共通です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。

※この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックス・アレルゲンを含み、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 妊娠中または妊娠していると思われる場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 腰部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。





- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体や補助ベルトをきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。

本品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。

面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

お手入れ方法




他の衣類などと一緒洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。


- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤を使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称

【製品の前面】

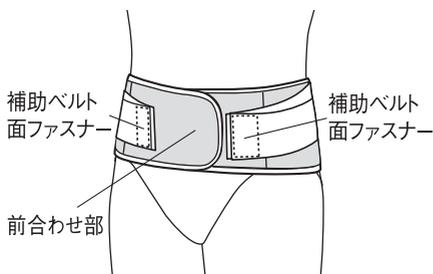


【製品の後面】

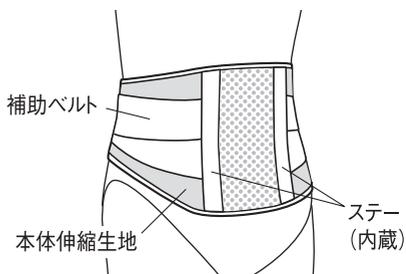


※図はマックスベルトme2です。

マックスベルトme1

【製品の表側】

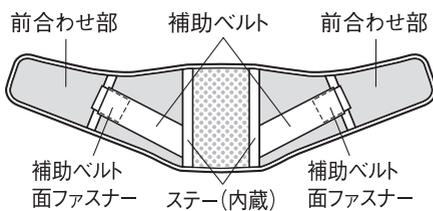


【製品の裏側】

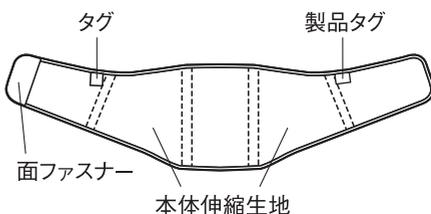


マックスベルトme2

【製品の表側】

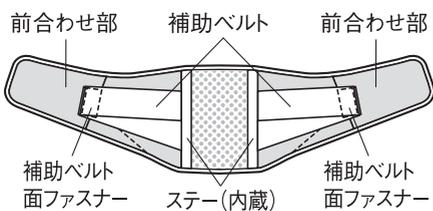


【製品の裏側】

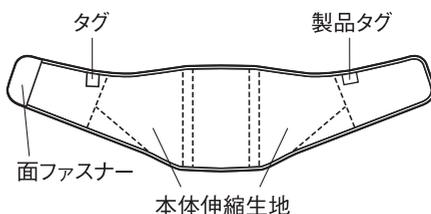


マックスベルトme3

【製品の表側】

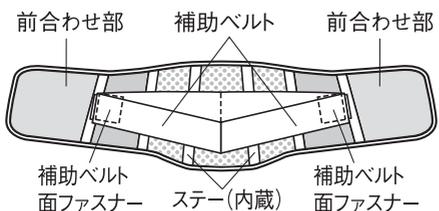


【製品の裏側】

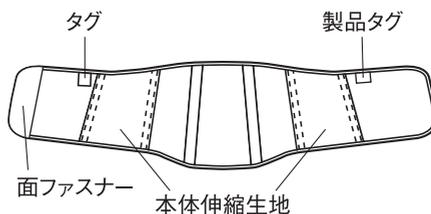

装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではマックスベルトme2を示していますが、マックスベルトme1およびマックスベルトme3も同じように装着してください。


- 1** サポーター本体と補助ベルトの面ファスナーをすべて取り外します。
本品はタグのある方が上で体に当てる側になります。

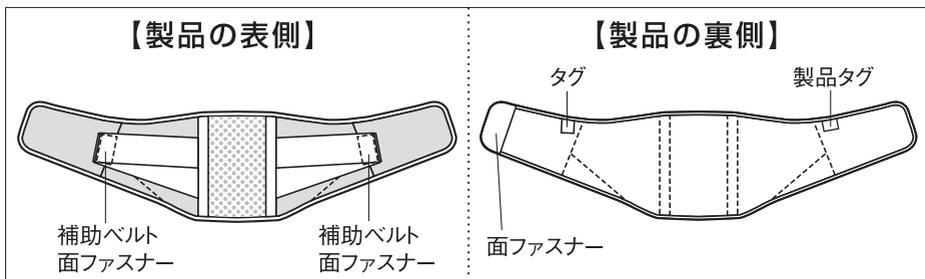

- 2** タグのある方を上にして両手で持ち、2本のステーの中心に背骨がおさまるように腰部に当てます。


※マックスベルトme1 およびme2 の場合

本体前合わせ部の上端とへその高さが同じになるように当ててください。

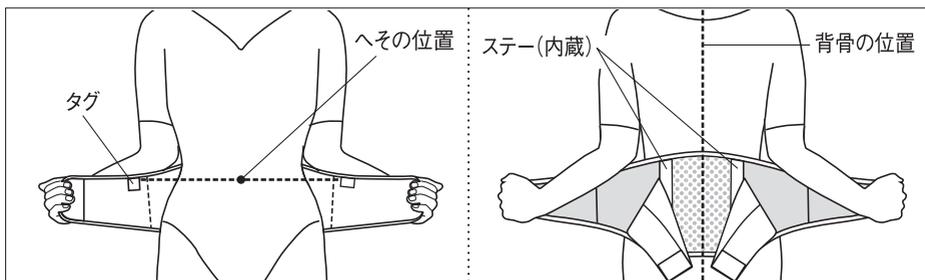


※マックスベルトme3 の場合


本体前合わせ部の上端がへその高さから約3cm上にくるように当ててください。

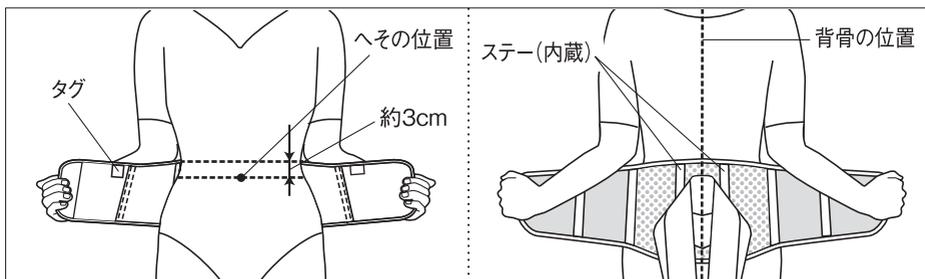


- 3** 本体伸縮部が十分伸びるように本体両端部を外側へ引っ張りながら、体に巻きつけてください。

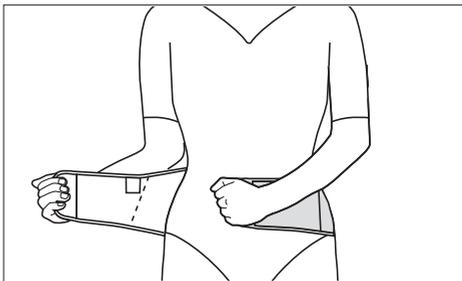

- 4** 本体両端部を体の前で重ね、面ファスナーをしっかりととめます。


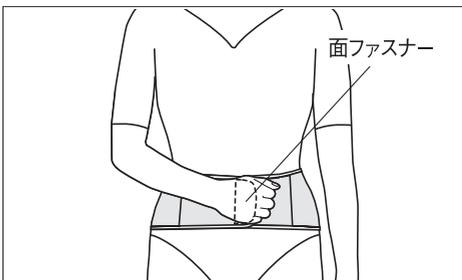


- 5** 補助ベルトを引っ張り、前合わせ部に面ファスナーをしっかりととめます。

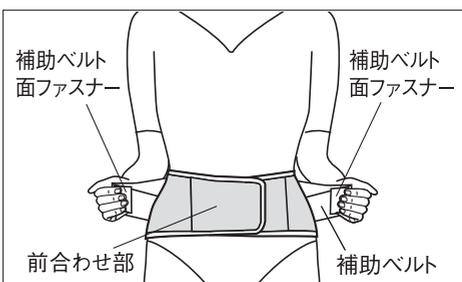


※マックスベルトme1 の場合

補助ベルトポケットに指を引っ掛けると持ちやすくなります。
(ポケットに指を引っ掛けて引っ張る際に、ケガなどにご注意ください。)

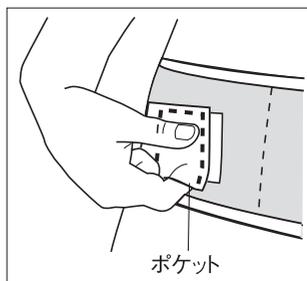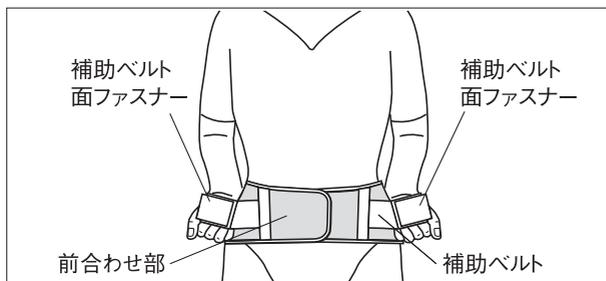


- 6** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時 (マックスベルトme1の場合)

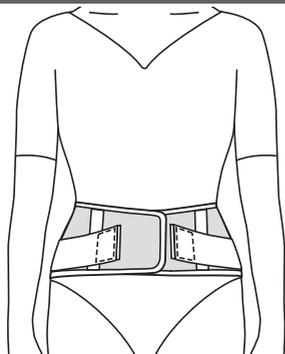


【前から見た図】

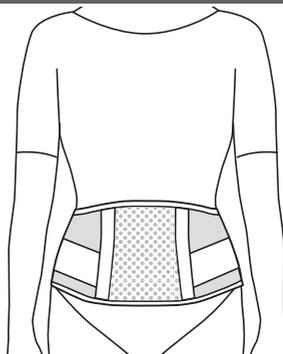


【後ろから見た図】

装着完了時 (マックスベルトme2の場合)

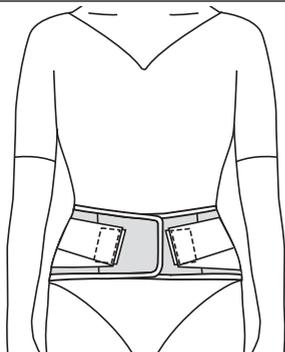


【前から見た図】

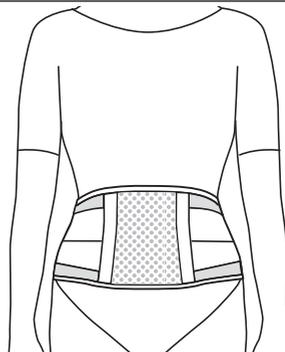


【後ろから見た図】

装着完了時 (マックスベルトme3の場合)

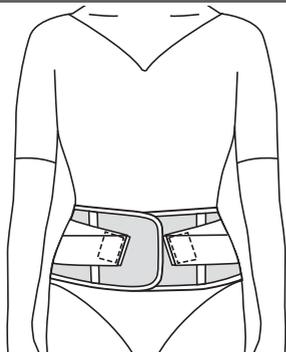

【前から見た図】

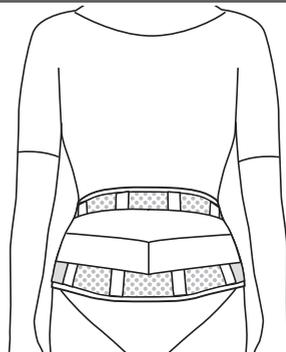

【後ろから見た図】

素 材

<マックスベルト me1>

素 材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	天然ゴム(ラテックス含む)、ポリプロピレン、EVA

<マックスベルト me2>

素 材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	天然ゴム(ラテックス含む)、ポリアセタール、EVA、ポリプロピレン


<マックスベルト me3>

素 材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他
繊維以外	天然ゴム(ラテックス含む)、ポリウレタン、ポリアセタール、EVA、ポリプロピレン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(胴囲)	1箱入数	マックスベルト me1	マックスベルト me2	マックスベルト me3
SS	55cm～ 65cm	1コ	○	○	○
S	65cm～ 75cm	1コ	○	○	○
M	75cm～ 85cm	1コ	○	○	○
L	85cm～ 95cm	1コ	○	○	○
LL	95cm～105cm	1コ	○	○	○
3L	105cm～115cm	1コ	○	○	○
4L	115cm～125cm	1コ	—	○	○
5L	125cm～135cm	1コ	—	○	—

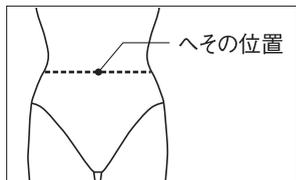

●サイズの選び方

胴囲に合わせて選んでください。胴囲はへその位置を目安に計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2016.11(改版)

168831