

# COLLAR KEEPER・HARD COLLAR KEEPER・me

カラーキーパー・ハード  
カラーキーパー・me(メッシュタイプ)

〈頸椎固定用シーネ〉

——使用説明書——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。  
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

## 用 途

頸部の固定

## はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしも固定できない場合があります。
- 本使用説明書は、カラーキーパー・ハードおよびカラーキーパー・me(メッシュタイプ)に共通です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

## ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

## 使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



**警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



**注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 頸部以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- 本体をきつく締めすぎないでください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。</li> <li>●本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。</li> <li>●本使用説明書に記載されている方法以外の加工、改造、修理を行わないでください。</li> <li>●本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。</li> </ul>
	<p>本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●つけごこちが悪いなど違和感がある場合。</li> <li>●装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。</li> </ul>


 <b>注意</b>	<p>面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。</p>
	<p>面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。</p>

## お手入れ方法


- 本品は洗濯できません。汚れた場合には、濡らして固くしぼった布などで汚れをふき取ってください。薬品などの使用は、本品をいためる原因となりますので使用しないでください。
- 本品はドライクリーニングもウェットクリーニングもできません。

## 各部の名称

### カラーキーパー・ハード

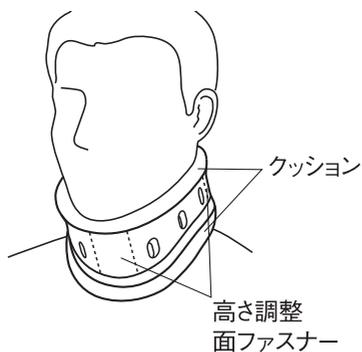


### カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

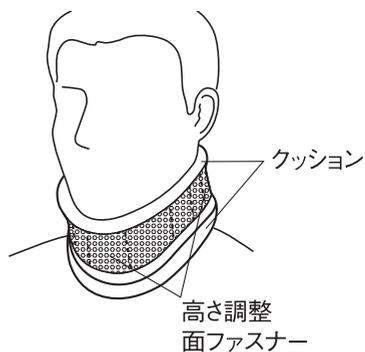


### カラーキーパー・ハード

#### 【製品の表側】

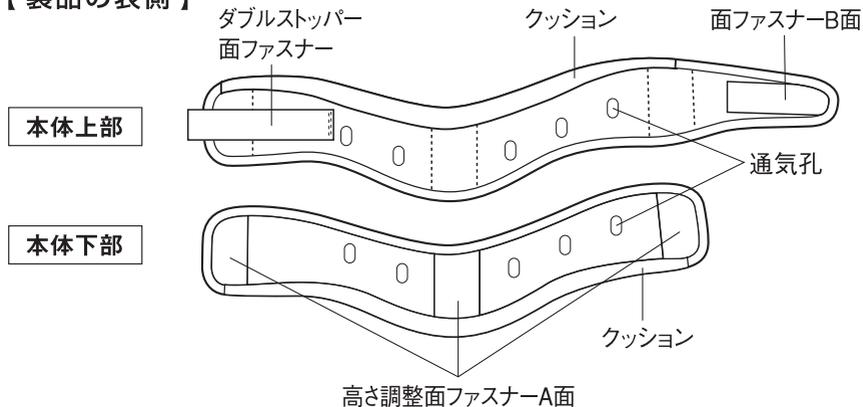

#### 【製品の裏側】

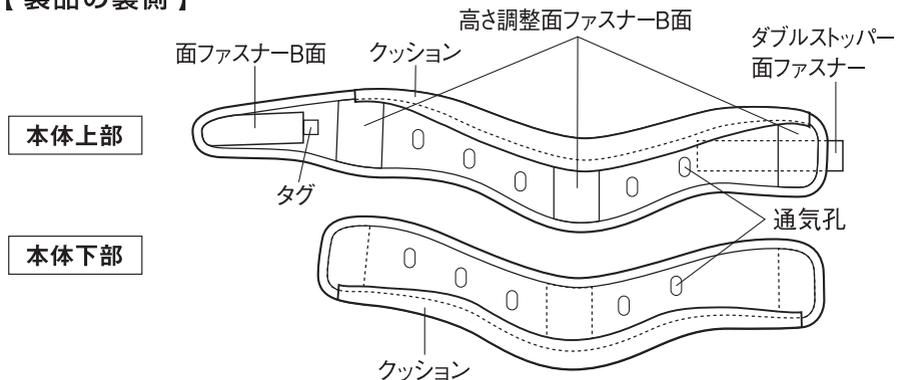


## カラーキーパー・me (メッシュタイプ)


### 【製品の表側】

ダブルストッパー面ファスナー クッション

本体上部

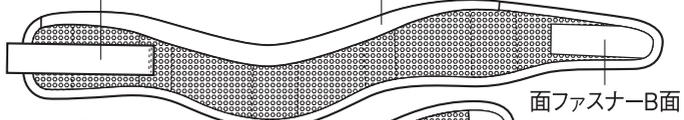

本体下部

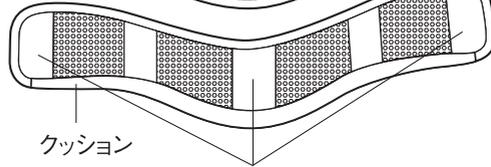


高さ調整面ファスナー-A面


### 【製品の裏側】

面ファスナー-B面 高さ調整面ファスナー-B面 クッション

本体上部

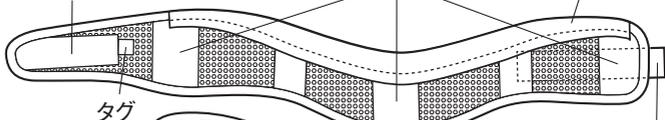

本体下部

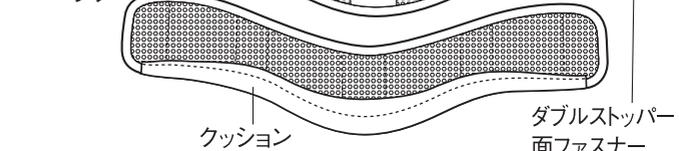

ダブルストッパー面ファスナー

## 装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 装着手順ではカラーキーパー・ハードを示していますが、カラーキーパー・me (メッシュタイプ)も同じように装着してください。

1

本体の面ファスナーをすべて取り外します。

本品は中央にへこみのある方が上でタグのある方が体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

### 【製品の表側】

ダブルストッパー面ファスナー

本体上部




面ファスナー-B面

### 【製品の裏側】

面ファスナー-B面


上

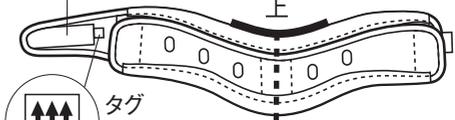


タグ

本体中心


**2** 製品本体中心のへこみ部分にあごを合わせます。  
このとき、高さが合っているか確認してください。高さが合わない場合は、高さ調整面ファスナーを取り外し、調整します。

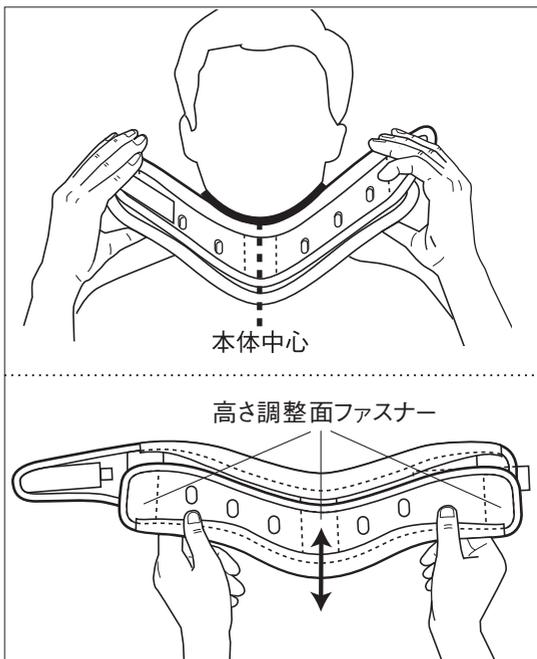


**3** あごが本体の上にしっかり乗るように首に巻きます。

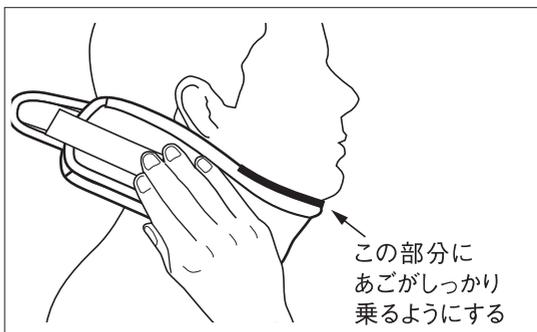

**4** ダブルストッパー面ファスナーを広げ、面ファスナーB面をとめます。



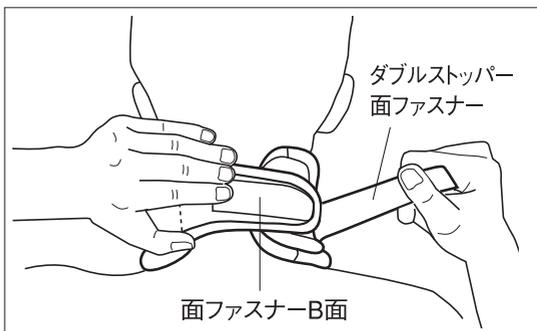


- 5** 面ファスナーB面の上にダブルストッパー面ファスナーを重ねてとめます。



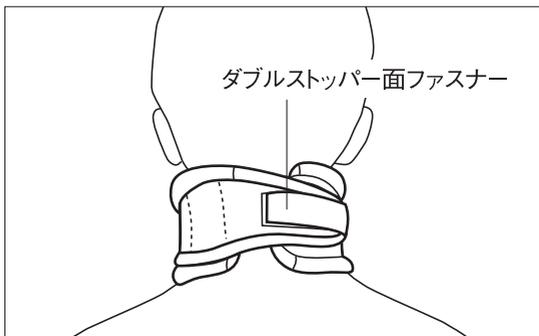


- 6** 本体のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時 (カラーキーパー・ハードの場合)

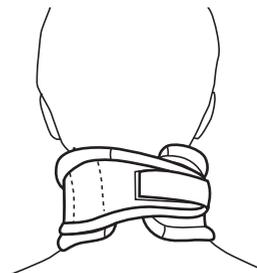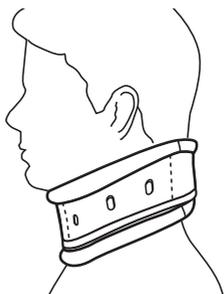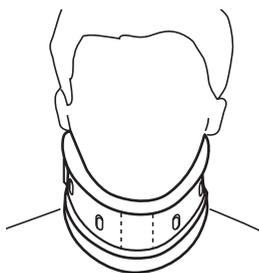

装着完了時 (カラーキーパー・me(メッシュタイプ)の場合)

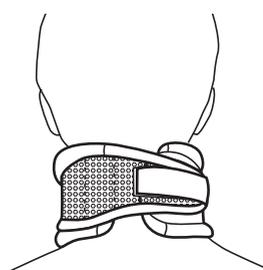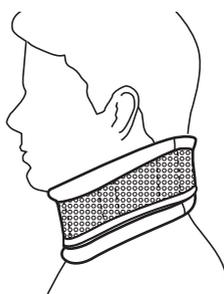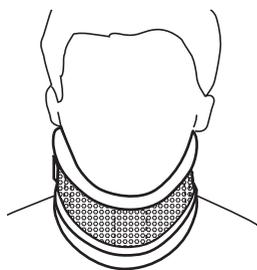

## 素材

### <カラーキーパー・ハード>

素 材	
繊維	綿、ポリエステル
繊維以外	ポリエチレン、合成皮革

### <カラーキーパー・me(メッシュタイプ)>

素 材	
繊維	ポリエステル、綿
繊維以外	ポリエチレン、合成皮革

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。


## サイズ表

サイズ	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
S	30cm~35cm	8.0cm~9.5cm	1コ
M	35cm~40cm	8.5cm~10.0cm	1コ
L	40cm~45cm	8.0cm~9.5cm	1コ

### ●サイズの選び方

首まわりに合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、高さの合う方のサイズを選んでください。

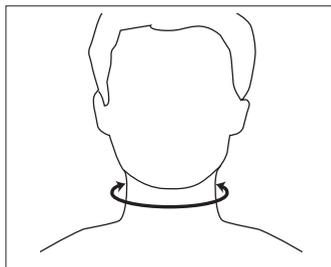

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

**日本シグマックス株式会社**

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2017.02(改版)

168924