

NEOMOTION ACL

ネオモーション ACL

〈膝サポート用スパッツ〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 膝のサポート

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.4にあります。

ご使用にあたって

- 強く引っ張り上げて装着しないでください。ほつれ、伝線、破損の原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

警告 ……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

注意 ……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 妊娠中または妊娠していると思われる場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.4にあります）。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。



本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

お手入れ方法




色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

- 1** 本品の表裏、前後を確認してください。本品はタグのある方が後ろで製品の内側になります。

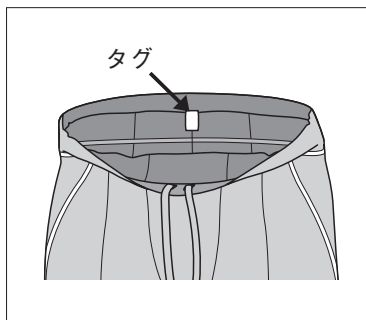


- 2** 本品に足を通して履き上げます。このとき、図のように膝のお皿の下にラインのクロス部分がかかるように装着してください。

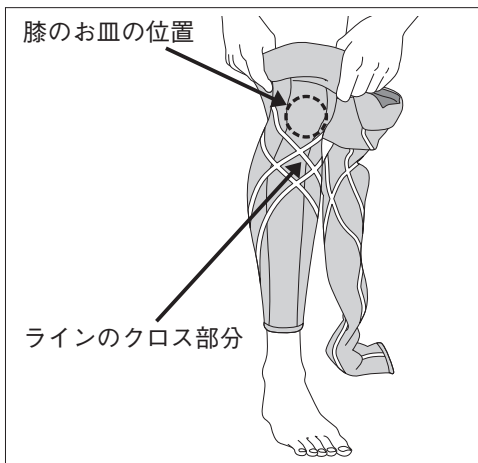

- 3** シワやねじれがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時

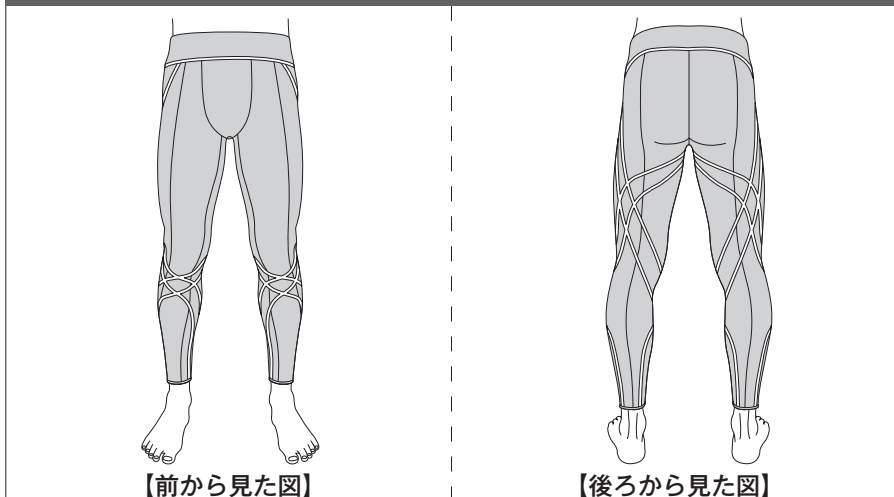

素 材

素 材

繊維

ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(身長)	目安(太ももの周囲)	1箱入数
女性S	145cm~153cm	43cm~49cm	1コ
女性M	153cm~161cm	49cm~55cm	1コ
女性L	161cm~169cm	55cm~61cm	1コ
女性LL	169cm~177cm	61cm~67cm	1コ

サイズ	適用範囲(身長)	目安(太ももの周囲)	1箱入数
男性S	150cm~160cm	39cm~47cm	1コ
男性M	160cm~170cm	47cm~55cm	1コ
男性L	170cm~180cm	55cm~63cm	1コ
男性LL	180cm~190cm	63cm~71cm	1コ

● サイズの選び方

身長に合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。太ももの周囲は目安です。太ももの周囲は、太ももの一番太い部分を計測してください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2017.02(作成)

168706