

医療用品5 副木

一般医療機器 成形副木 35354000

カラーキーパー・ハード

【禁忌・禁止】

1. 創傷に直接当てないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 構造

本品は、ポリエチレンシートと綿製テープでできたカラー本体、合成皮革でカバーされたポリエチレンフォームのクッション材、高さ調整と装着のための面ファスナーで構成された頸部固定用のシーネです。

2. 種類、寸法

種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)
S	30cm～35cm	8.0cm～9.5cm
M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm
L	40cm～45cm	8.0cm～9.5cm

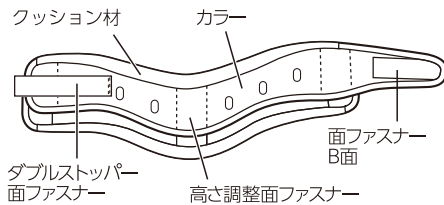

3. 原理


本品は、カラー本体を頸部に沿わせて装着することで、頸部を固定・支持します。

【使用目的又は効果】


捻挫や疼痛時の頸部を固定・支持します。

【使用方法等】


1. 患部の首まわり・高さに応じて適切なサイズの本品を選びます。
2. ダブルストッパー面ファスナーを取り外します。本品は中央にへこみのある方が上で、タグのある方が肌に当てる側にあります。

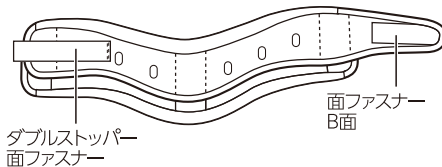


3. カラー本体は上下2枚を高さ調整面ファスナーでとめていきます。高さが合っているか確認してください。高さが合わない場合は、高さ調整面ファスナーを取り外し、適切な高さに調整します。

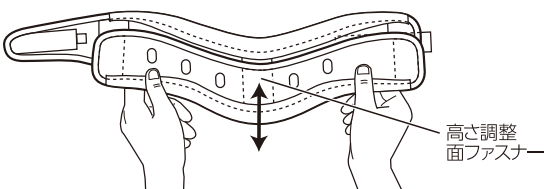


4. 中央のへこみ部分にあごを合わせ、あごが本体の上をしっかり乗るように首に巻きます。

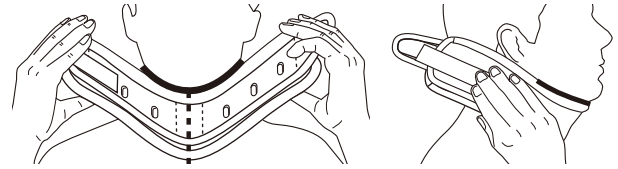

5. ダブルストッパー面ファスナーを広げ、面ファスナー B面をとめ、その上にダブルストッパー面ファスナーを重ねてとめます。

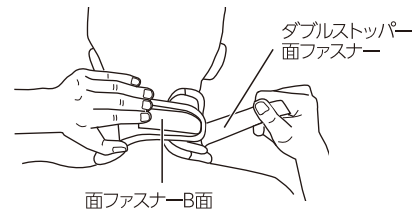

6. 装着完了時

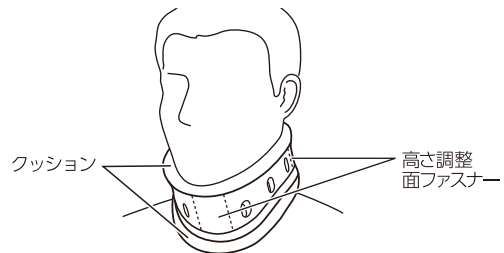

*【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用してください)

- 1) 患部に、腫脹、潰瘍、発疹等がある患者
[症状を悪化させるおそれがあります。局所管理を十分行ってください。]
- 2) 皮膚過敏症、化学繊維アレルギーのある患者
[皮膚障害が発生する可能性があります。]

2. 重要な基本的注意

- 1) 使用時に、高さ調整面ファスナー、ダブルストッパー面ファスナーがしっかりとめられていることを確認してください。
[使用中にずれたり、外れたりする可能性があります。]
- 2) サイズの合った製品を使用してください。また高さが合うようにカラー本体の高さを調節してください。
[使用中にずれたり、神経麻痺や血行障害を起こすおそれがあります。]
- 3) 本体をきつく締めすぎないでください。
[神経麻痺や血行障害を起こすおそれがあります。]
- 4) 就寝時の使用は医師の指示に従ってください。
- 5) 長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意してください。
[皮膚障害や血行障害を起こすおそれがあります。]
- 6) 装着手順に従って正しく使用してください。
[使用中にずれたり、外れたりする可能性があります。]
- 7) 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着しなおしてください。

- 8) 本品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
[使用中にずれたり、固定・支持できない可能性があります。]
- 9) 本品の使用中に、怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合はただちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 10) 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 11) 本品は処方された方以外は使用しないでください。

3. その他の注意

- 1) 本品は洗濯できません。また直接水がかからないように注意してください。
[本品をいためる原因となります。]
- 2) 本品が汚れた場合は、濡らして固くしぼった布などで汚れをふき取ってください。薬品などは使用しないでください。
[本品をいためる原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本シグマックス株式会社

連絡先 電話：0800-222-6122