

■製品基本構成



本体 1 台、AC アダプタ 1 台、電源コード 1 本

品番	商品名	1 箱入数
592011	mobisit グリーン	1 台
592012	mobisit ブルー	1 台
592013	mobisit レッド	1 台
592014	mobisit イエロー	1 台

■製品仕様

販売名	mobisit
本体寸法	長さ 320mm × 幅 335mm × 高さ 90mm
本体質量	5kg
定格入力	AC100-240V 50/60Hz 1.4A
定格出力	DC24V 2.5A 最大 60W
周囲温度	0 ～ 30℃
振動周波数範囲	1-12Hz
振幅	8mm
最大許容荷重	25kg
運送・保管条件	保管温度：-10 ～ 30℃ 保管湿度：30 ～ 95%（結露しないこと）

品番	商品名	1 箱入数
592015	mobisit ホワイト	1 台
592016	mobisit ブラック	1 台
592017	mobisit グレー	1 台



禁忌・禁止

以下の症状のある（または疑いのある）方には使用しないこと。

- ・急性期の血栓症がある方 ・妊娠している方 ・ステントやバイパス手術を行ってから6ヶ月以内の方
- ・心血管系疾患がある方

以下の部位は、振動ペダルに直接乗せないこと。

- ・頭 ・首



注意

以下の症状がある方は医療従事者に相談のうえ、使用してください。

- ・ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内埋め込み型医用電気機器を使用している方
- ・心臓に障害のある方 ・出産直後の方 ・糖尿病等、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・皮膚に創傷のある方 ・安静を必要とする方 ・体温 38℃以上の方 ・骨粗鬆症、脊椎の骨折、疼痛疾患のある方
- ・捻挫、肉離れなどの方（炎症性がある） ・身体の異常を感じている方 ・胆石および腎石がある方
- ・関節炎がある方 ・腫瘍がある方 ・めまいやふらつきがある方

介護が必要な人は、必ず付添人の支援のうえ、使用してください。

- ・怪我をするおそれがあります。

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL:0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。
日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。

振動刺激による運動やリハビリテーションが可能。




振動刺激機器	モビジット
--------	-------



座ったままで楽に運動やリハビリテーションが可能。

振動ペダルに足や手などを乗せ、振動刺激を与えることで、適度な運動やリハビリテーションができます。
着替える必要もなく、椅子に座って足を乗せるだけの楽な姿勢で使用でき、操作も簡単です。

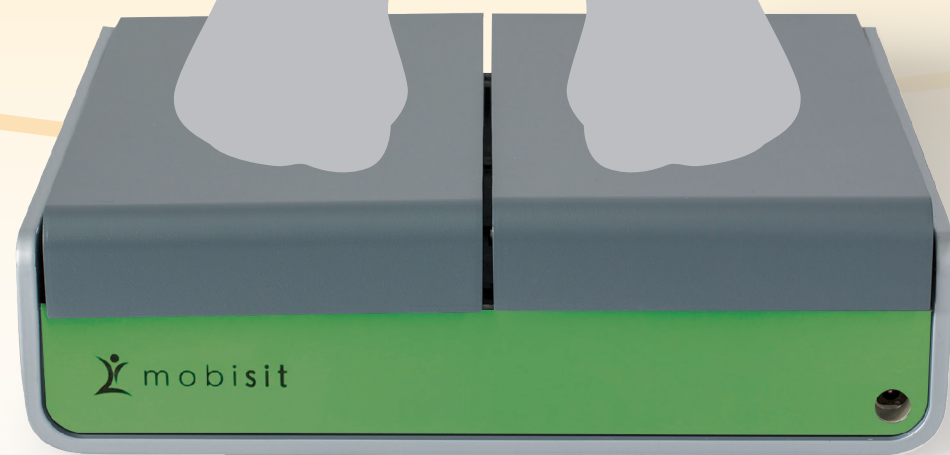

適度な刺激で長時間の使用が可能。

1～12Hzで振動周波数を選択できるので、さまざまな状態に合わせたリハビリテーションや運動を行うことが可能です。また、適度な刺激で長時間の使用が可能です。



簡単な操作

スイッチを入れるだけの簡単操作です。
着替える必要もなく、刺激を与えたい部位を乗せるだけなので無理のない姿勢で気軽に使用できます。



持ち運び可能な 軽量コンパクト設計

持ち運びができる軽量コンパクトサイズのため、場所を選ばずに使用可能。活動量の少ない方でも、ベッドの上に本品を乗せて使用することができます。




アプリによる操作が可能

操作は本体の操作盤のほか、スマートフォンやタブレットでのアプリによる操作が可能です。



選べる カラーバリエーション

施設に合わせた色が選択でき、運動時間を楽しくします。

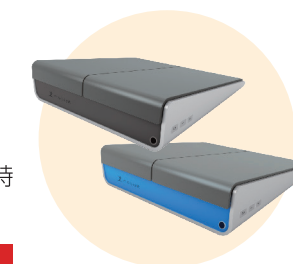

静音設計

作動音が静かなため、使用シーンを選ばずリラックスして使用できます。

コンパクトながらマルチに対応

体位を変えることで、刺激を与える部位を変えることができます。
歩行のトレーニング補助、トレーニングのクールダウンや、脚にだるさを感じる方、むくみやすい方、立ち仕事の多い方のリラックス等を目的として使用することが可能です。

使用例

椅子に座っての使用のほか、ベッド上に乗せて脚に刺激を与えたり、手を乗せて肩や首に刺激を与えることができます。



脚(1)
椅子に深く座り、mobisitに両足を乗せる。



脚(2)
両足を乗せてかかとを上げる。
大腿部に刺激を与える。



脚(3)
両足を乗せ、足の外側に
振動ペダルに乗せる。



肩・首(1)
肘を膝の上に寄せ、肩と首に刺激を
与える。



肩・首(2)
膝をついて、mobisitに手を乗せる。



リラクゼーション
横になり、mobisitに足を乗せる(ベッド使用)。

※頭や首は振動ペダルに直接乗せないでください。※振動ペダルの上へ立つ等、過剰な荷重を掛けて使用しないでください。
※このカタログ画像では、ACアダプタと電源コードを接続していない画像がありますが、実際に使用する際は付属のACアダプタと電源コードを接続してご使用ください。