

ハイブリッドシーネ アンクル

〈ギプス包帯〉

足関節用

—— 使用説明書 ——

(使用者向け)

医師による処方後、使用者に本使用説明書をお渡しください。

製品を装着し直す際は、本使用説明書をお読みください。

またいつでもお読みになれるよう保管してください。

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況によって、固定できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。

ご使用にあたって

- シーネカバーに面ファスナーをつけないでください。シーネカバーをいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 足関節以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- シーネホルダー本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。
また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
- 本品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

 警告	本品のギプスシーネは水硬化性の樹脂でできています。負傷事故を防ぐため、人や物との接触がある場合は使用しないでください。
	本品の使用中に、怪我、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

 注意	面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
	本品は、必ず靴下などの上から装着し、肌に直接当てないでください。
	本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
	面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

お手入れ方法


 警告	抜いたギプスシーネを再度入れ直すときは、向きを間違えないでください。製品が正しく機能しない場合があります。
--	---

 注意	色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
	他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。


- 洗濯の際はギプスシーネを抜いてください。
- シーネホルダーは洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつぎが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※図は右足に装着しています。

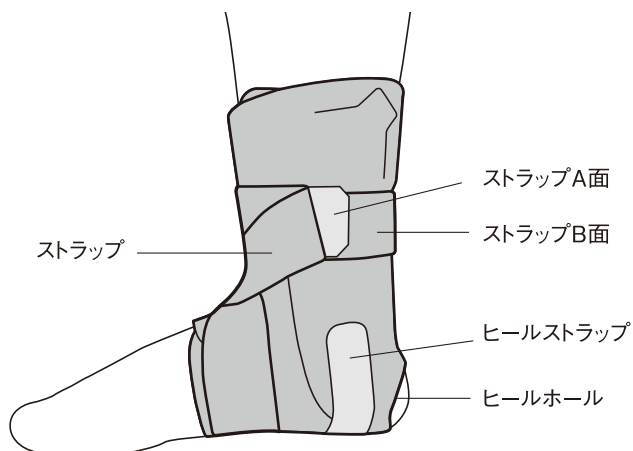


【シーネホルダーの表側】

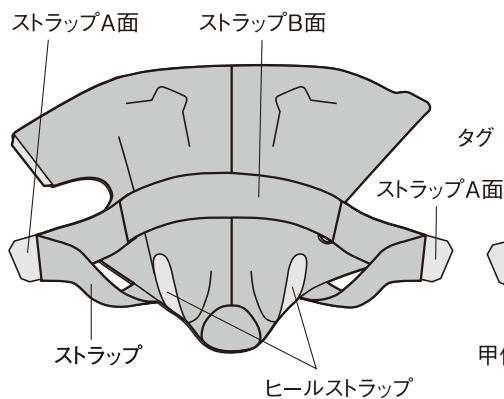

【シーネホルダーの裏側】

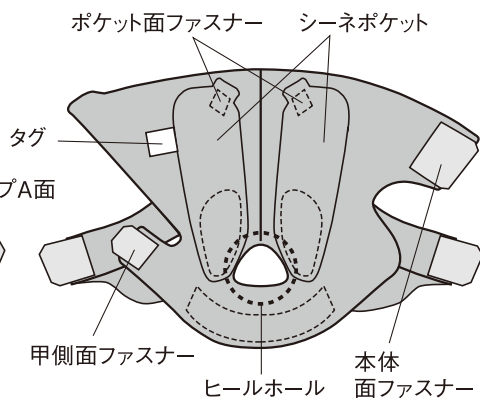


【ギプスシーネ】

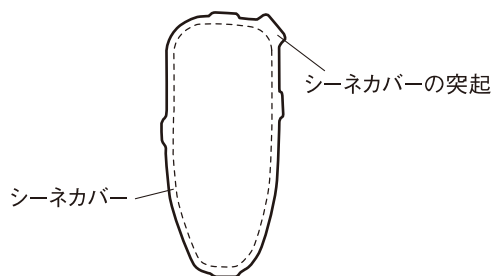


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右足の場合です。


- 1** シーネホルダー本体およびストラップの面ファスナーを取り外します。本品はタグのある方が上で体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

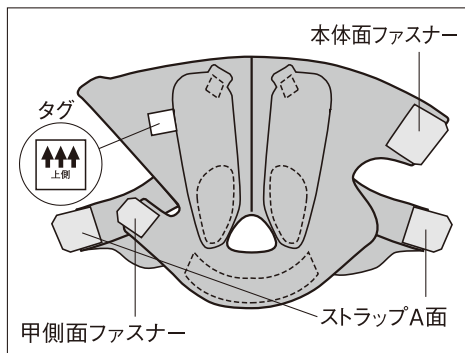


- 2** かかとをシーネホルダーのヒールホールに合わせて履き込みます。その後、足首を直角にして、足の裏全体を床につけた状態で、本体面ファスナーとつまみを持ち、足首に巻きつけるようにしてとめます。

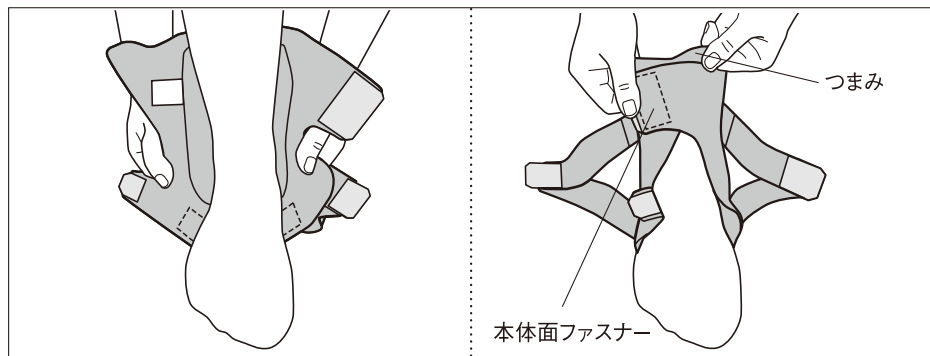


- 3** 足の裏全体を床につけた状態で、甲側面ファスナーを持ち、甲部分に巻きつけるようにしてとめます。このとき、足の裏部分の生地にしわが寄らないように、つま先側にしっかりと引っ張りながらとめます。

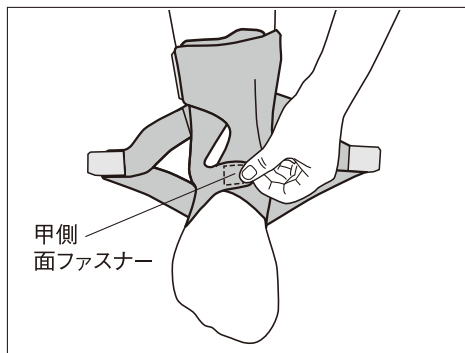


- 4** ヒールストラップを内側のシーネポケット部分の下端にとめ、足底を通し、たるみがないように外側のシーネポケット部分の下端にとめます。

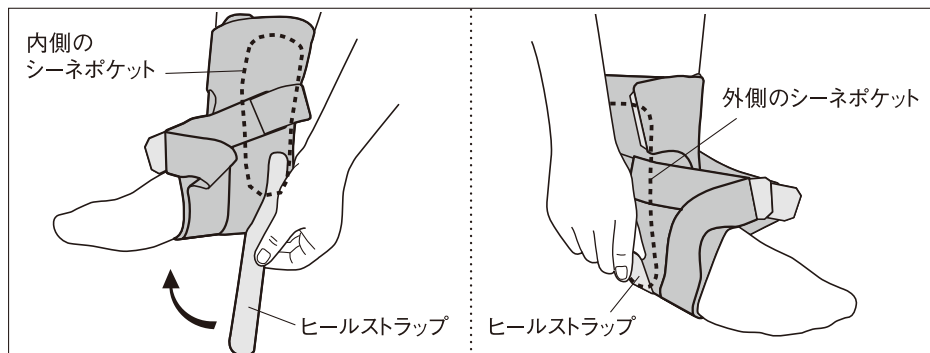

- 5** 足裏全体を床につけた状態で、内側のストラップを足の甲へまわし、外側のシーネポケット部分にストラップA面をとめます。ストラップが地面と平行になるように、ストラップA面を外くるぶしより高い位置にとめます。

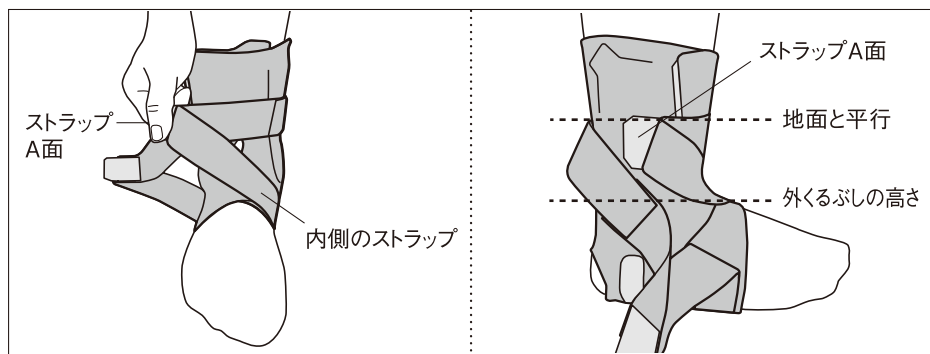

- 6** 外側のストラップを足の甲へまわし、ストラップB面の上にストラップA面をとめます。

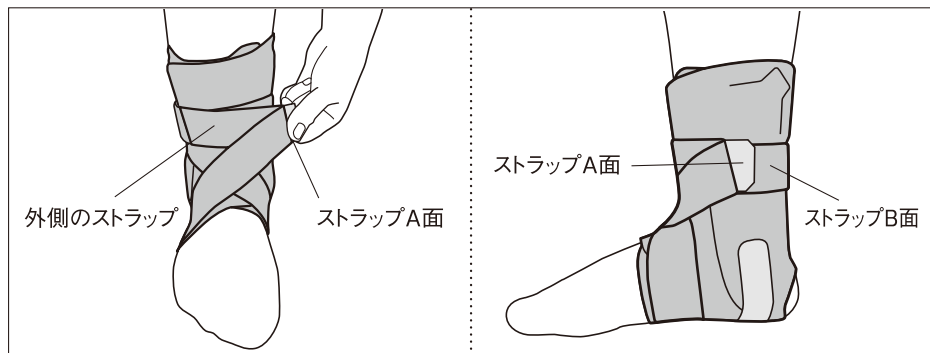


- 7** シーネホルダーのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。


装着完了時（右足の場合）



【前から見た図】

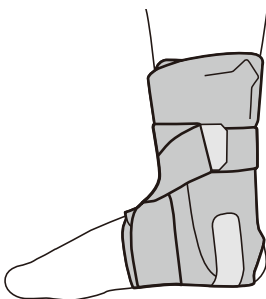

【内側から見た図】

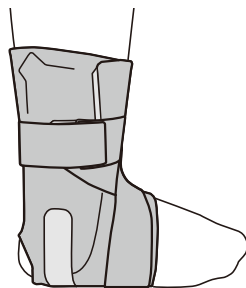

【外側から見た図】

ギブスシーネの取り外しについて




警告

抜いたギブスシーネを再度入れ直すときは、向きを間違えないでください。製品が正しく機能しない場合があります。


- 上下、内側・外側、前後を間違えないようにシーネポケットに挿入してください。シーネカバーの突起をコーナーポケット側に向けてください。
- ギブスシーネはシーネポケットの奥まで入れてください。シーネホルダーのコーナーポケットをシーネカバーの突起部分にかぶせ、ポケット面ファスナーをコーナーポケットにとめてください。

ギブスシーネ コーナーポケット

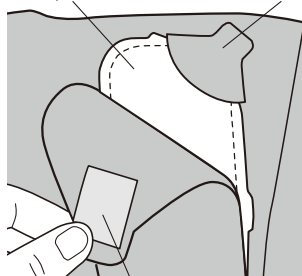


ポケット面ファスナー

ポケット面ファスナー

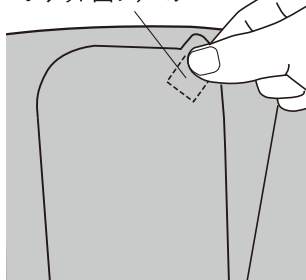

サイズ表

サイズ	適用範囲(ヒール囲)	1 箱入数
S	27cm～30cm	1コ
M	30cm～33cm	1コ
L	33cm～36cm	1コ

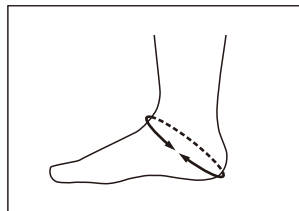

ヒール囲はかかとと足首前方を通る周囲を計測してください。

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2023.05(改版)

169505

L1-10013-01