

Sigmax Arm Sling

シグマックスアームスリング

〈腕つり〉

—— 使用説明書 ——

安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
またいつでもお読みになれるよう保管してください。

はじめにお読みください


- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況によって、安静保持、保護できない場合があります。
- 本品は左右兼用です。


ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 上肢以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.4にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- ショルダーストラップをきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
- 本品が摩耗、損傷した場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- バックルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
- 本品のバックルおよびクリップはポリアセタール製です。負傷事故を防ぐため、人や物との接触がある場合は使用しないでください。

- 本品の使用中に、怪我、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。



注意

本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

お手入れ方法



注意


色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。

- 本品は手洗いで洗濯できます。押し洗いし、絞らずタオルなどで水気を取って、日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称

※本品は左右兼用です。


【製品の表側】

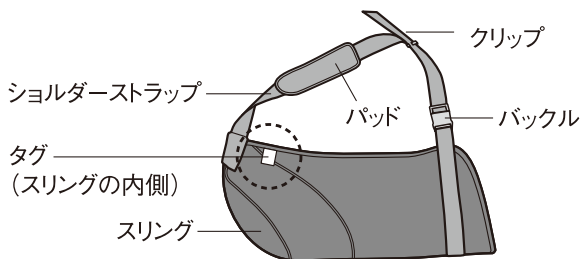


装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意-必ずお読みください-】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右腕の場合です。


1 バックルを取り外します。本品はタグのある方が内側になります。

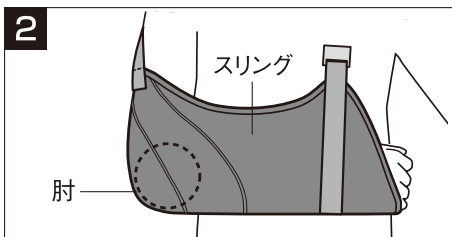


肘をスリングに奥までしっかりと入れます。

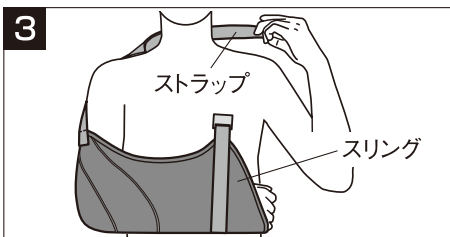

ショルダーストラップを、右肩の後方から背中
にまわし、反対側の肩にかけます。

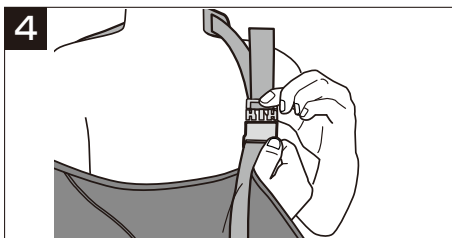

バックルの凸側を、凹側にカチッと音がする
までしっかりと差し込みます。
その際、バックルから出ているショルダース
トラップの先端を前側に向けます。
(本品は左右兼用のため、バックルは表裏
どちらでも差し込むことができます)。

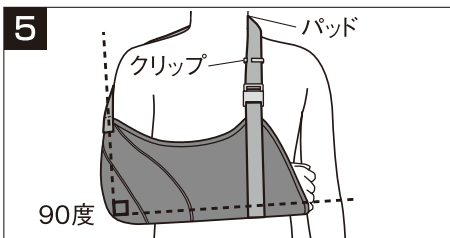

ショルダーストラップの長さを調節し、肘の
角度が90度になるよう調節します。
ショルダーストラップが長い場合は先端をク
リップにはさんでください。
ストラップの当たりが気になる場合は、パッド
の位置を調節してください。


6 本体のゆりみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始め
から装着し直してください。

装着完了時(右腕の場合)



サイズ表

サイズ	適用参考値(前腕長)	1箱入数
一般用	20cm～30cm	1コ
子供用	～20cm	1コ

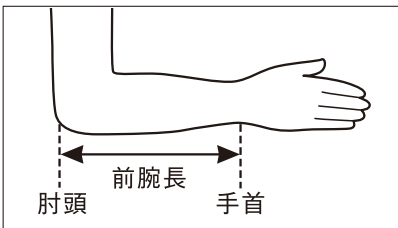

●サイズの選び方

前腕長に合わせて選んでください。前腕長は肘頭から手首までの長さを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2021.05(改版)

168683