

Faciliaid Supporter

ファシリエイドサポーター 手くび

〈手くび用サポーター〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 手くびのサポート

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 本体のメッシュ生地面に面ファスナーをつけないでください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容



注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 手くび以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。

 警告	●ストラップをきつく締めすぎないでください。 ●使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。 ●本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ●本品の加工、改造、修理を行わないでください。
	本品のステーは金属製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。 ●本品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。
	本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 ●つけごこちが悪いなど違和感がある場合。 ●装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
 注意	面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
	本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移りする場合があります。
	面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


お手入れ方法

 注意	色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移りする場合があります。
	他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーをストラップにとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※本品は左右兼用です。図は右手に装着しています。

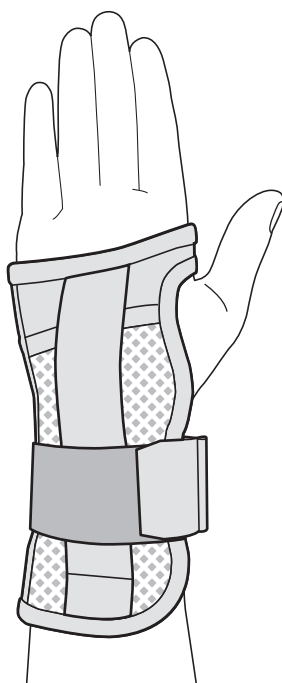

【手の甲側】



【手のひら側】

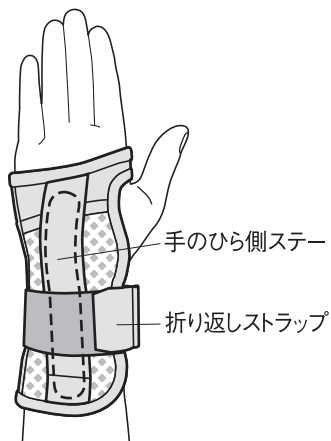

装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右手の場合です。左手に装着する場合も同じように装着してください。

ステアの挿入について


- 装着前にステアを挿入してください。
- 使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

<ステア挿入時のステアの向き>

手のひら側ステアは出っ張りのある方が表側になります。ステアを挿入する際は矢印の方向から挿入してください。甲側ステアには向きはありません。


【手のひら側ステア】		【甲側ステア】
 出っ張りのある方が表側になります。	 矢印の方向から挿入します。 手のひら側 表	 向きはありません。 甲側
<側面図>	<正面図>	

- 1 サポーター本体の面ファスナーを取り外します。折り返しストラップはストッパーがついていますので、抜けにくい仕様になっています。

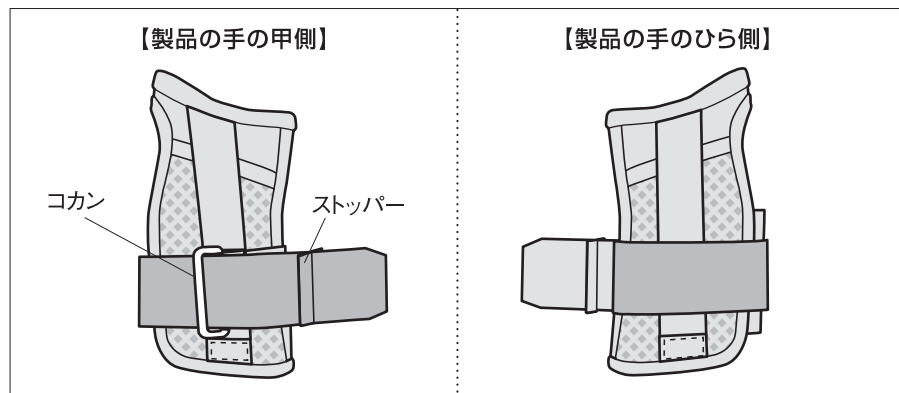


- 2** 手のひら側ステーが、手関節の手のひら側にくるようにし、本体が母指に掛かるまで手を通してください。

その際、手のひらと前腕の中心に手のひら側ステーの位置を合わせます。

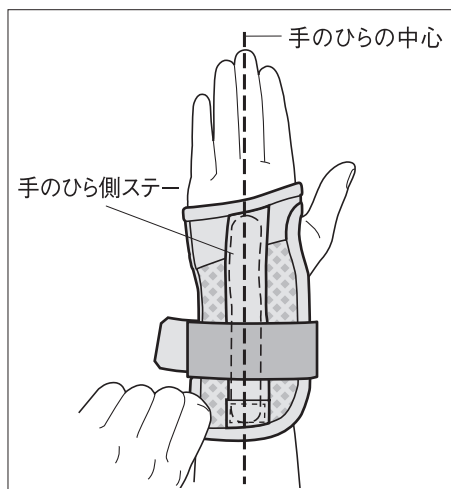


- 3** 折り返しストラップがコカンに通っていることを確認し、引っ張ってとめます。その際に、折り返しストラップを上から強く押し付けてください。

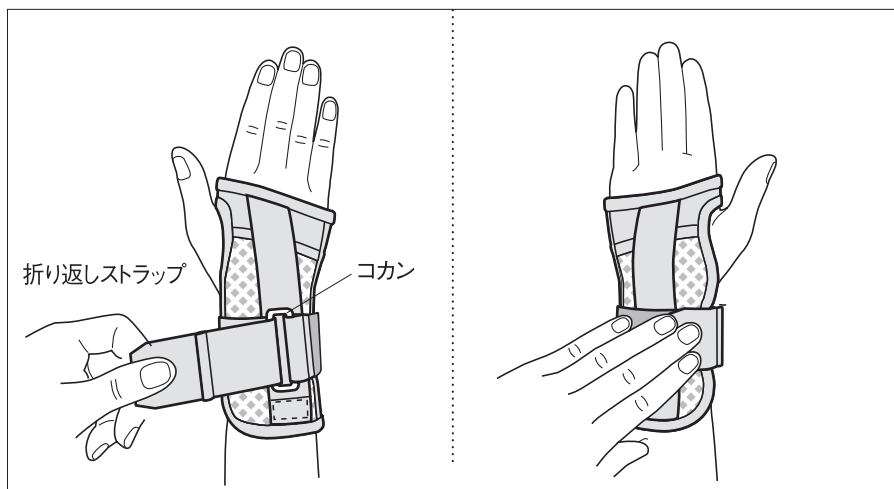


- 4** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時(右手の場合)

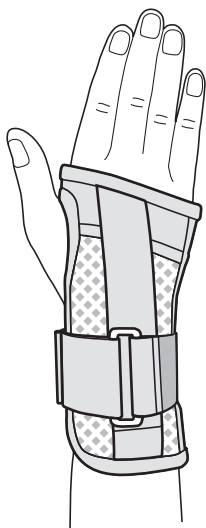

【甲側から見た図】

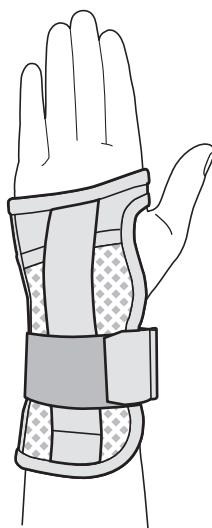

【手のひら側から見た図】

素 材

素 材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン、ポリアセタール、アルミニウム

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(手のひらの周囲)	1箱入数
S	16cm～18cm	1コ
M	18cm～20cm	1コ
L	20cm～22cm	1コ



●サイズの選び方

手のひらの周囲に合わせて選んでください。手のひらの周囲は示指と小指の付け根付近の周囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※ 製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※ 製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2016.08(改版)
168664