

<膝関節用サポーター> -使用説明書-

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

【用途】

膝関節のサポート

【はじめにお読みください】

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度サイズ表で確認してください。

【ご使用にあたって】

- 本品は編物ですので、仕上がり寸法に多少の差が生じることがあります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

【使用上の注意—必ずお読みください—】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

- △ 警告…… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
- △ 注意…… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 膝関節以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏、前後を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
- 本品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。

本品のアクティブ樹脂ステーはプラスチック製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。

- 本品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。

本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。

- つけごちが悪いなど違和感がある場合。
- 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。


【お手入れ方法】

- 本品は手洗いで洗濯できます。ていねいに押し洗いし、絞らないようにタオルなどで水気を取り、日陰で吊り干しにしてください。
- アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【装着手順】

- 装着前に本使用説明書の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。

- ①椅子などに座った状態で装着してください。
- ②本品はタグがある方が上で内側になります。
- ③サポーター本体の側面を両手で持って引き上げ、サポーターの中心を膝蓋骨の中心に合わせます。その際、アクティブ樹脂ステーの位置を脚の側面の中心に合わせます。
- ④サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感のある場合は、再度、始めから装着し直してください。

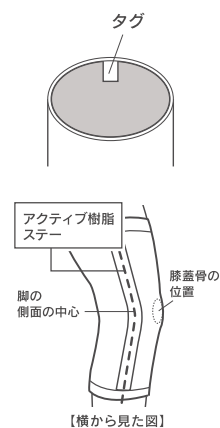


【素材】

素材	
繊維	ナイロン、アクリル、ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他
繊維以外	ポリウレタン、アクリル、ナイロン

【サイズ表】

品番	サイズ	適用範囲（大腿周囲）	1箱入数
303101	S	40cm～43cm	1コ
303102	M	43cm～46cm	1コ
303103	L	46cm～49cm	1コ
303104	LL	49cm～52cm	1コ
303105	3L	52cm～55cm	1コ

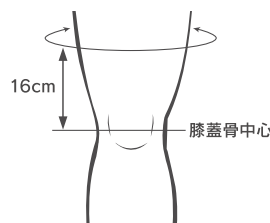

- サイズの選び方
大腿周囲に合わせて選んでください。大腿周囲は普通に立った状態で、膝蓋骨中心から16cm上の周囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
 お客様窓口 TEL:0800-222-6122(通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く