

Faciliaid Supporter

ファシリエイドサポーター

ひじ

〈肘用サポーター〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 肘のサポート

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 本品はフリーサイズです。適用範囲は本使用説明書のP.4にありますので、使用前に再度確認してください。

ご使用にあたって

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつぎが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告** …… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意** …… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



警告

本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

 警告	異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。 ● アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。 ● 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
	次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 ● 前腕以外の部位に使用しないでください。 ● サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.4にあります)。 ● 就寝時の使用については必ず医師の指示に従ってください。 ● 長時間装着する場合は、適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。 ● 表裏を正しく使用してください。 ● 装着手順に従って正しく使用してください。 ● サポーター本体をきつく締めすぎないでください。 ● 使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから、正しく装着し直してください。 ● 本品に摩耗・損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合、エルボーパッドがつぶれた場合は使用しないでください。 ● 本品の加工、改造、修理を行わないでください。 ● 本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
	本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 ● つげごこちが悪いなど違和感がある場合。 ● 装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
 注意	面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
	本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
	面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
	エルボーパッドは必ず正しい位置に取り付けて使用してください。

お手入れ方法

 注意	色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
	他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。


- 洗濯の際はエルボーパッドをサポーター本体から取り外し、別々に洗濯してください(詳細はP.4を参照してください)。
- サポーター本体は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- エルボーパッドは水洗いできます。サポーター本体から取り外し、水ですすいでください。水洗いした後は、タオルなどで水気を取った後、日陰でよく乾かしてから使用してください。
- 洗濯の際は、面ファスナーをサポーター本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称

※本品は左右兼用です。
図は右腕に装着しています。



【製品の表側】

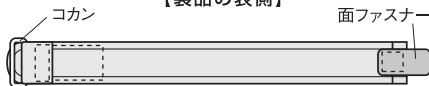

【製品の裏側】



装着手順


- 装着前に本使用説明書P.1～2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右腕の場合です。左腕に装着する場合も同じように装着してください。

- 1 サポーター本体の面ファスナーを取り外します。本品はタグのある方が体に当てる側になります。このとき、パッドが裏側のパイル部に取りつけられていることを確認してください（詳細はP.4を参照してください）。


【製品の表側】



【製品の裏側】

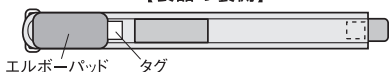


- 2 サポーター本体をコカンに通します。

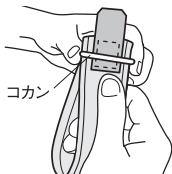


- 3 サポーター本体に腕を通し、エルボーパッドが肘の痛みのある箇所から手くび寄りに4～5cmの位置にくるようにして、サポーターの位置を合わせます。

【時の外側に痛みのある場合】

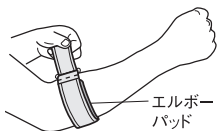


【時の内側に痛みのある場合】

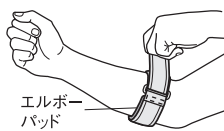

- 4 手を握り、腕に力を入れた状態で、適度な圧迫になるようにサポーター本体を引っ張り、面ファスナーをとめます。

面ファスナー

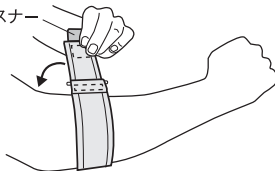


警告

サポーター本体を締め過ぎないでください。

- 5 サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

※サポーター本体をコカンに通したままつけ外しをすることで、より簡単に装着することができます。

装着完了時(右腕の場合)

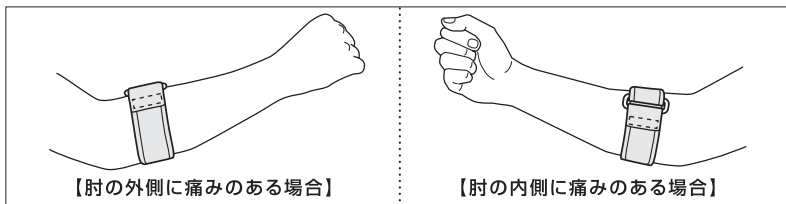


エルボーパッドの取り外しについて



エルボーパッドは必ず正しい位置に取りつけて使用してください。

サポーター本体の裏側にあるパイル部にエルボーパッドが取り付けられています。

洗濯などでエルボーパッドを取り外した後は、必ず正しい位置に取りつけてから使用してください。

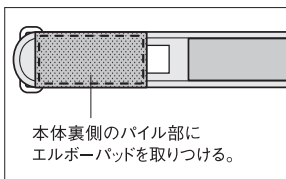

素 材

素 材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
繊維以外	ポリアセタール、ポリエチレン


※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(前腕周囲)	1袋入数
フリーサイズ	19cm～31cm	1コ

●計測の方法

腕の力を抜いた状態で、前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。

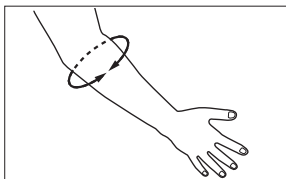

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122

受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

2017.04(改版)

168668