

EXAID ANKLE FO

エクスエイド アンクルFO

〈足関節サポーター〉

—— 使用説明書 ——

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

- 内・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート
- 足関節術後の安静保持

はじめにお読みください


- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品は右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.12にあります。


ご使用にあたって



- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—


本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**… 誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**… 誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

 警告	本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
	異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。 ●アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。 ●装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
	次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 ●足関節以外の部位に使用しないでください。 ●サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.12にあります)。 ●就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。 ●長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。 ●上下、表裏、前後を正しく使用してください。 ●装着手順に従って正しく使用してください。 ●サポーター本体やストラップをきつく締めすぎないでください。 ●使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。 ●本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ●本品の加工、改造、修理を行わないでください。 ●本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
	本品のFRTPガードはプラスチック製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。 ●本品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。
	本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 ●つけごちが悪いなど違和感がある場合。 ●装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。
 注意	面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
	本品は、必ず靴下などの上から装着し、肌に直接当てないでください。
	本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合があります。 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


お手入れ方法

 注意	色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地の色移りする場合があります。
	他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。


- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯の際は洗濯ネットを使用し、洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※本品には、右足用・左足用があります。図は右足に装着しています。

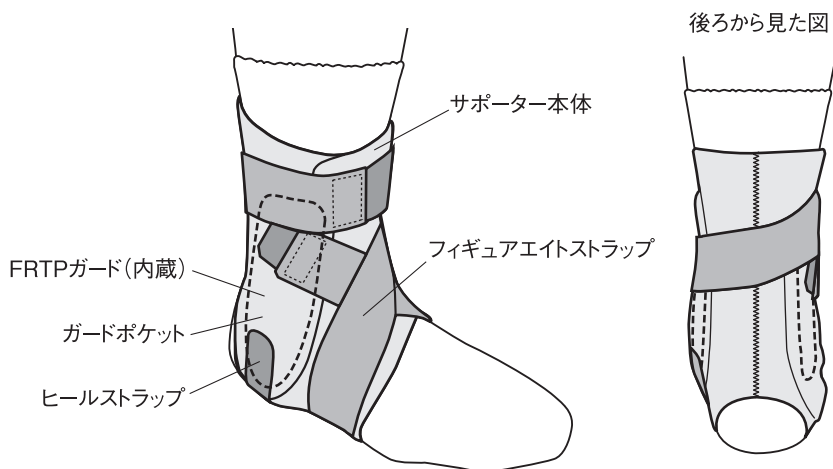

【製品の側側】

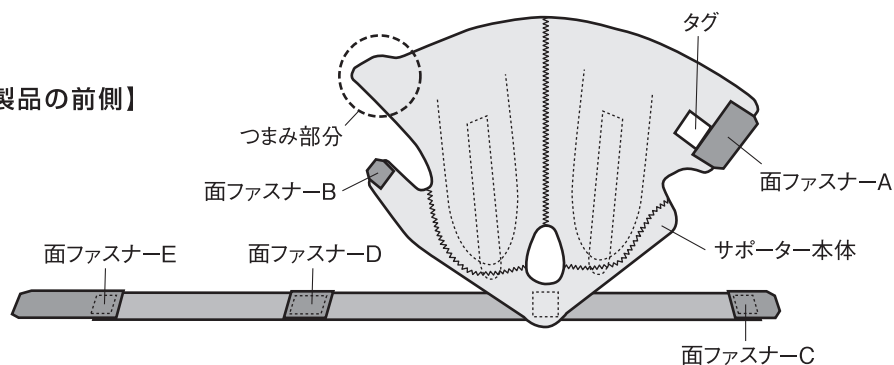

【製品の後側】

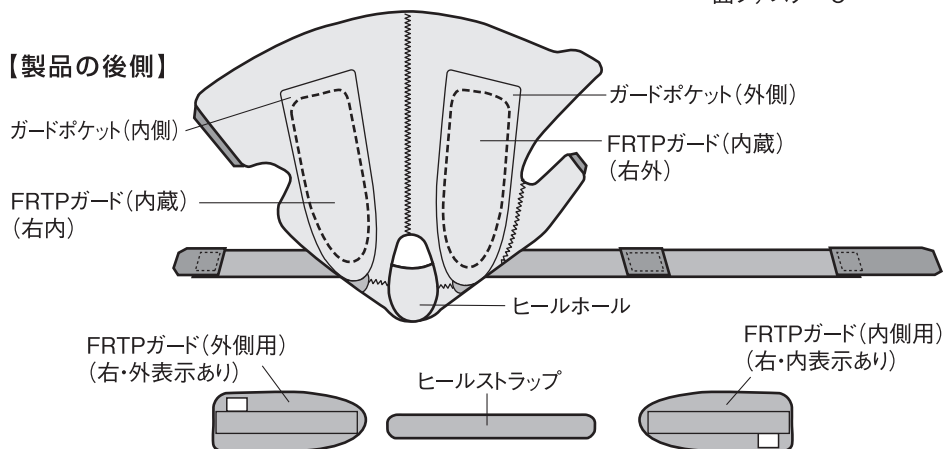


装着手順/右足用(P.4-7)

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。

F RTPガードをガードポケットの中に入れて右足に装着する場合

※通常、F RTPガードはガードポケットの中に挿入された状態で梱包されています。


- 1 サポーター本体およびフィギュアイトストラップの面ファスナーと、ヒールストラップを取り外します。本品はタグのある方が上で体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

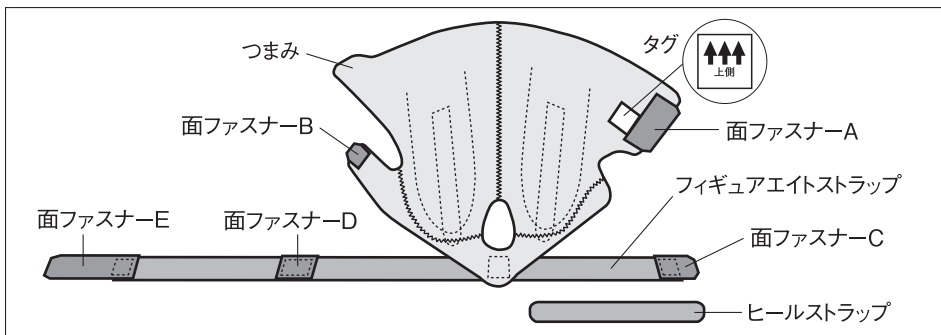

- 2 かかとをサポーター本体のヒールホールに合わせて履き込みます。その後、足首を直角にして、足の裏全体を床につけた状態で、面ファスナーAとつまみを持ち、足首に巻きつけるようにしてとめます。




- 3 足の裏全体を床につけた状態で、面ファスナー-Bを持ち、甲部分に巻きつけるようにしてとめます。この際、足の裏部分の生地にしわがよらないように、つま先側にしっかりと引っ張りながらとめます。

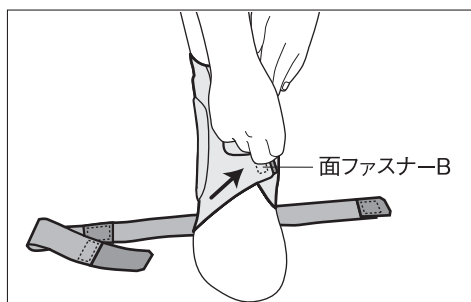


- 4** ヒールストラップを内側のガードポケットの下端にとめ、足底を通し、たるみがないように外側のガードポケットの下端にとめます。この際、ガードポケット下の目印を目安にしてとめます。



- 5** 内側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーCを外くるぶしより高い位置のガードポケットの上にとめます。

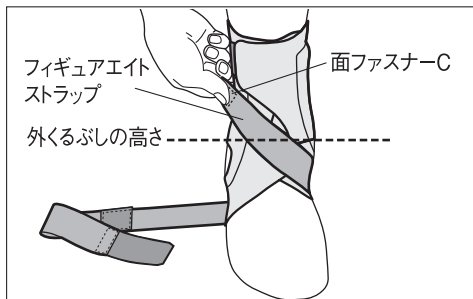

- 6** 外側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーDを内くるぶしより高い位置のガードポケットの上にとめます。そのまま、フィギュアエイトストラップを足首の後ろ側へまわし、面ファスナーEをとめます。

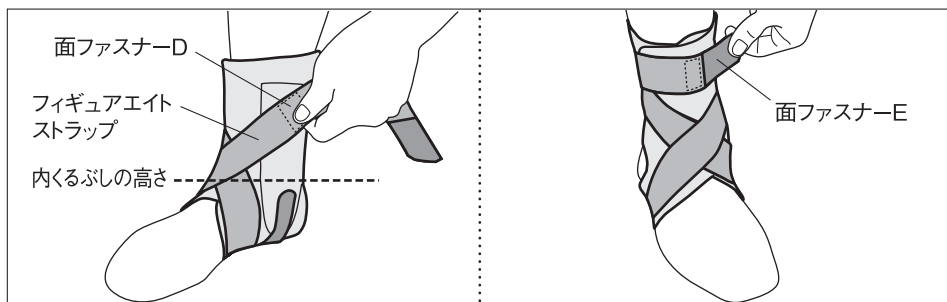

- 7** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時 (FRTPガードをガードポケットの中に入れて右足に装着した場合)



【前から見た図】



【内側から見た図】



【外側から見た図】





【後ろから見た図】

FRTPガードをガードポケットの外につけて右足に装着する場合


※本品は、FRTPガードをガードポケットの外につけて使用することができます。

- 1** サポーター本体およびフィギュアエイトストラップの面ファスナーと、ヒールストラップを取り外します。
FRTPガードをガードポケットから取り出し、ガードポケット面ファスナーをポケット内側に折り返してとめます。

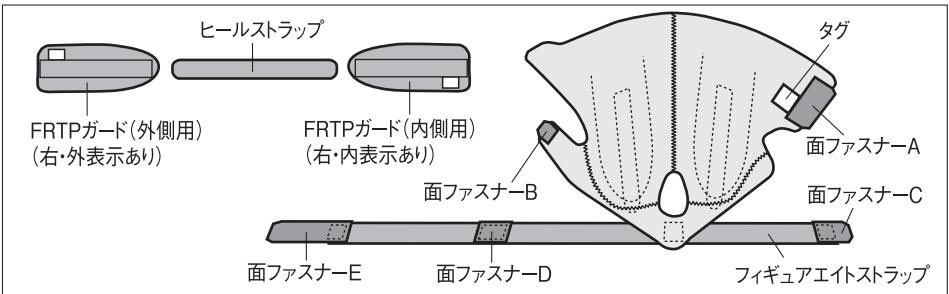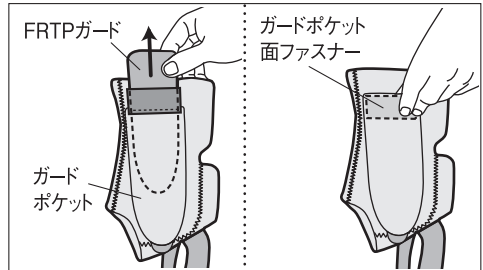


- 2 ~ 4** 【FRTPガードをガードポケットの中に入れて右足に装着する場合】の装着手順 **2 ~ 4**までを行います。


- 5** 内くるぶしおよび外くるぶしの位置を目安に、FRTPガードをサポートに取りつけます。くるぶしと、ガードのくぼみ部分を合わせます。

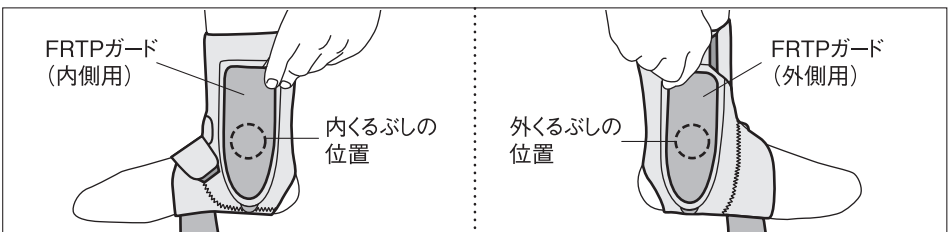


- 6** ヒールストラップを内側のFRTPガードの下端にとめ、足底を通し、たるみがないように外側のFRTPガードの下端にとめます。

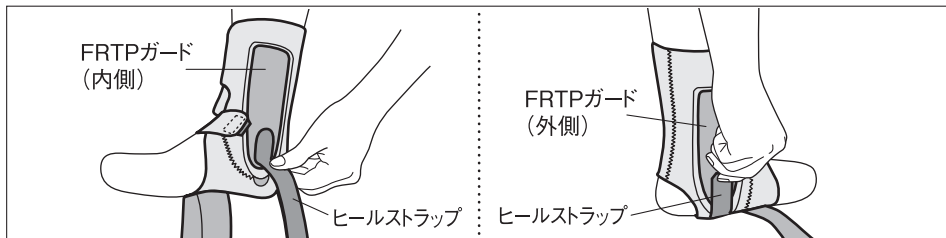

- 7** 内側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーCを外くるぶしより高い位置のFRTPガードの上にとめます。

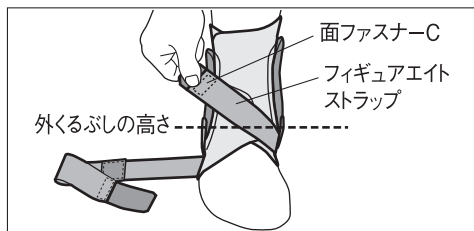


- 8** 外側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーDを内くるぶしより高い位置のFRTPガードの上にとめます。そのままフィギュアエイトストラップを足首の後ろ側へまわし、面ファスナーEをとめます。

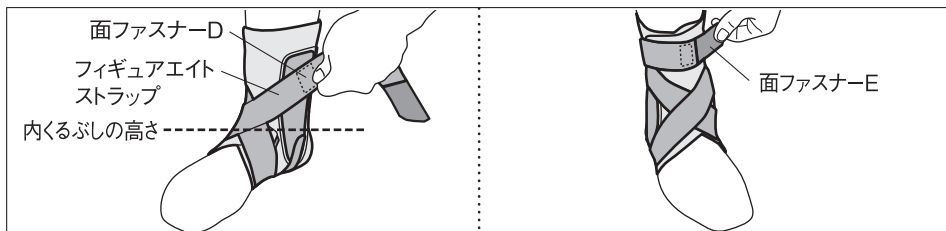

- 9** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時 (FRTPガードをガードポケットの外につけて右足に装着した場合)

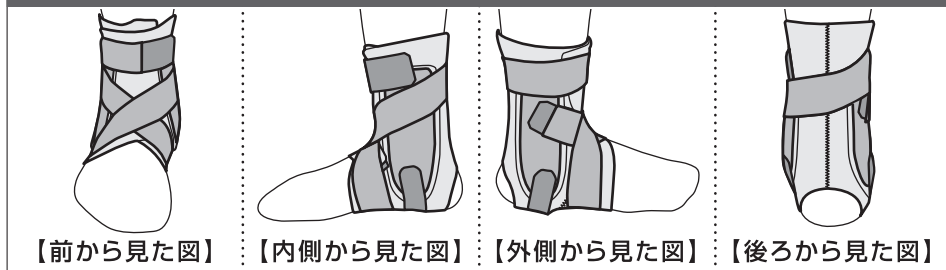


装着手順/左足用(P.8-11)

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。


FRTPガードをガードポケットの中に入れて左足に装着する場合

※通常、FRTPガードはガードポケットの中に挿入された状態で梱包されています。


- 1 サポーター本体およびフィギュアイトストラップの面ファスナーと、ヒールストラップを取り外します。本品はタグのある方が上で体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

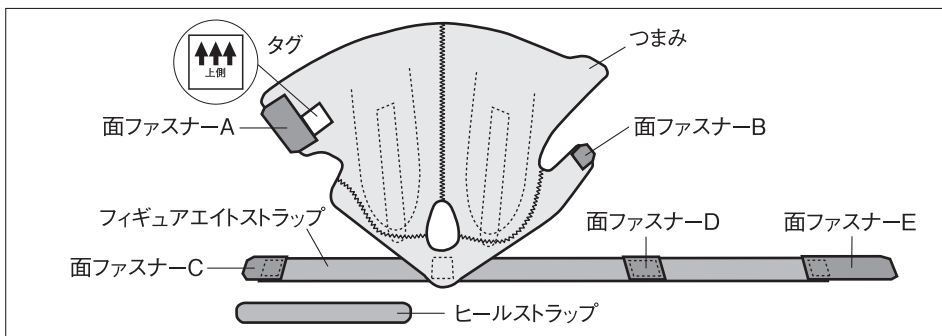


- 2 かかとをサポーター本体のヒールホールに合わせて履き込みます。その後、足首を直角にして、足の裏全体を床につけた状態で、面ファスナー-Aとつまみを持ち、足首に巻きつけるようにしてとめます。

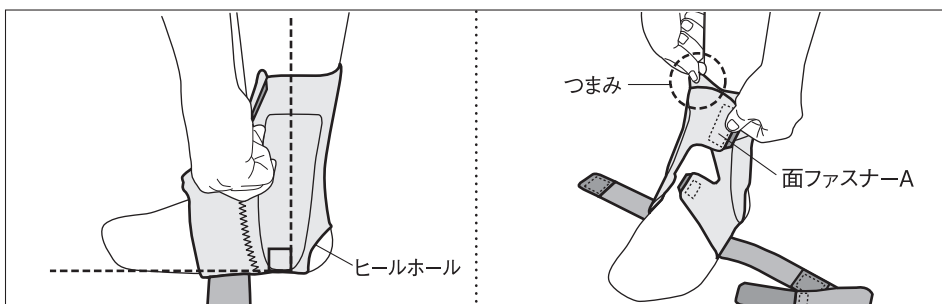


- 3 足の裏全体を床につけた状態で、面ファスナー-Bを持ち、甲部分に巻きつけるようにしてとめます。この際、足の裏部分の生地にしわがよらないように、つま先側にしっかりと引っ張りながらとめます。

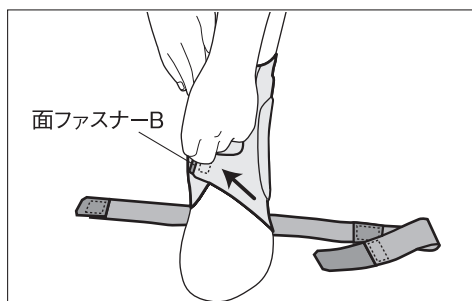


- 4** ヒールストラップを内側のガードポケットの下端にとめ、足底を通し、たるみがないように外側のガードポケットの下端にとめます。この際、ガードポケット下の目印を目安にしてとめます。

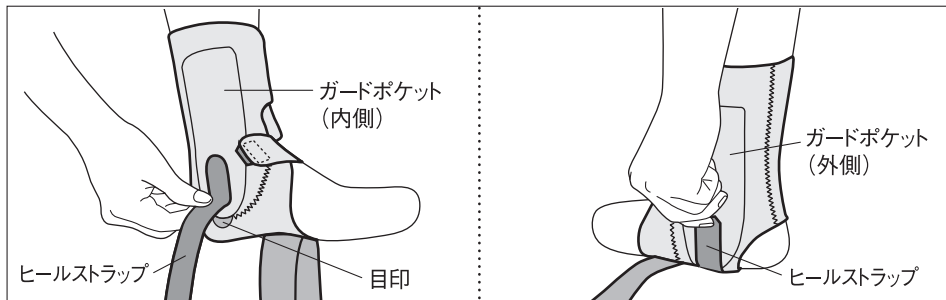

- 5** 内側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーCを外くるぶしより高い位置のガードポケットの上にとめます。

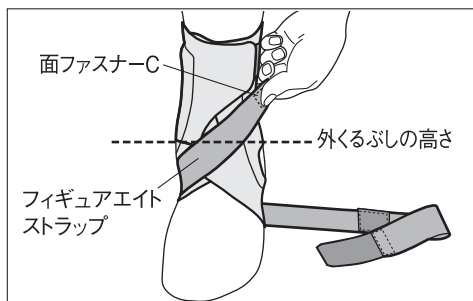

- 6** 外側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーDを内くるぶしより高い位置のガードポケットの上にとめます。そのまま、フィギュアエイトストラップを足首の後ろ側へまわし、面ファスナーEをとめます。

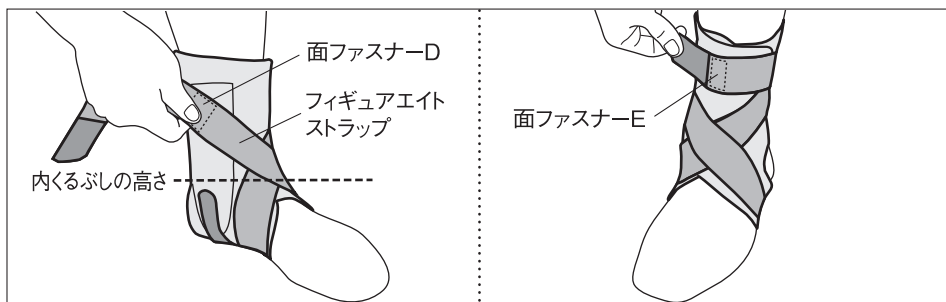


- 7** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。


装着完了時 (FRTPガードをガードポケットの中に入れて左足に装着した場合)



【前から見た図】

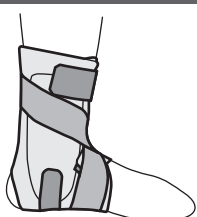

【内側から見た図】

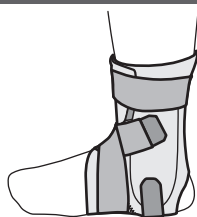

【外側から見た図】





【後ろから見た図】

FRTPガードをガードポケットの外につけて左足に装着する場合


※本品は、FRTPガードをガードポケットの外につけて使用することができます。

- 1** サポーター本体およびフィギュアエイトストラップの面ファスナーと、ヒールストラップを取り外します。
FRTPガードをガードポケットから取り出し、ガードポケット面ファスナーをポケット内側に折り返してとめます。

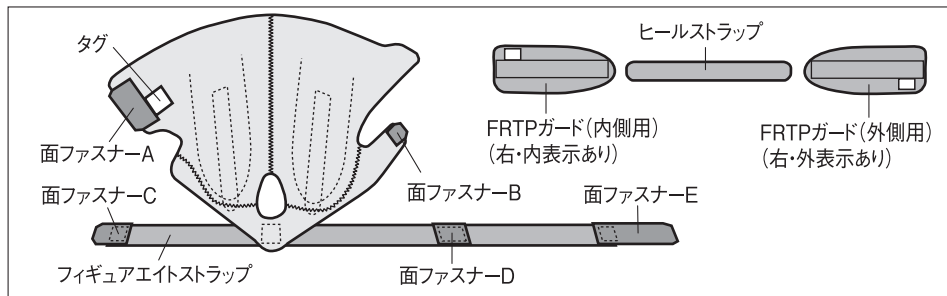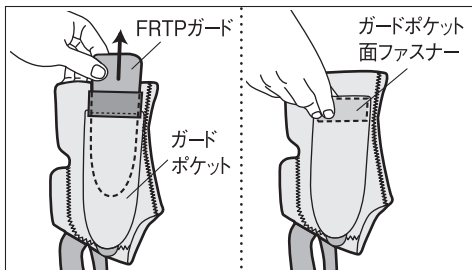


- 2 ~ 4** 【FRTPガードをガードポケットの中に入れて左足に装着する場合】の装着手順 **2 ~ 4** までを行います。


- 5** 内くるぶしおよび外くるぶしの位置を目安に、FRTPガードをサポーターに取りつけます。くるぶしと、ガードのくぼみ部分を合わせます。

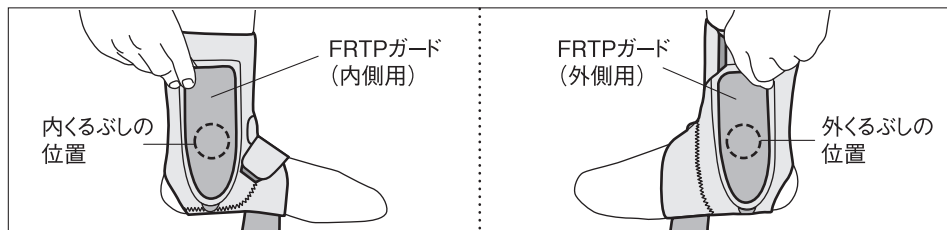


- 6** ヒールストラップを内側のFRTPガードの下端にとめ、足底を通し、たるみがないように外側のFRTPガードの下端にとめます。

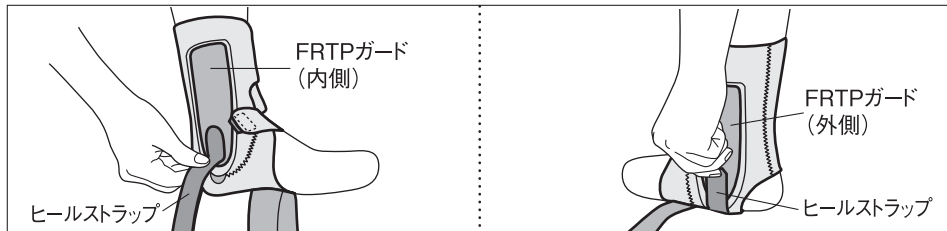

- 7** 内側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーCを外くるぶしより高い位置のFRTPガードの上にとめます。

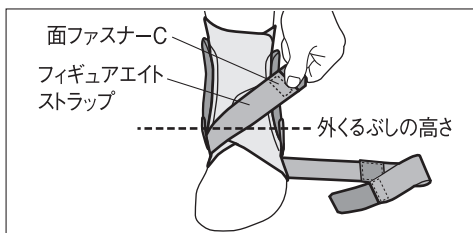


- 8** 外側のフィギュアエイトストラップを足の甲へまわし、面ファスナーDを内くるぶしより高い位置のFRTPガードの上にとめます。そのままフィギュアエイトストラップを足首の後ろ側へまわし、面ファスナーEをとめます。

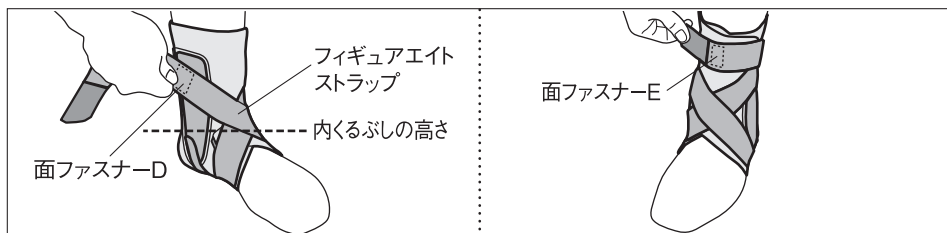

- 9** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時 (FRTPガードをガードポケットの外につけて左足に装着した場合)

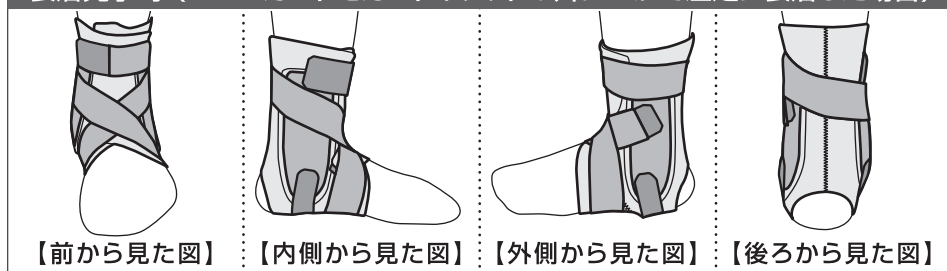

素 材

素 材	
繊維	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
繊維以外	ポリウレタン、ポリエステル

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ		適用範囲(靴サイズ)	1箱入数
右S	左S	19cm～22cm	1コ
右M	左M	22cm～25cm	1コ
右L	左L	25cm～28cm	1コ
右LL	左LL	28cm～31cm	1コ

●サイズの選び方

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2017.07(改版)

168699