

Faciliaid Supporter

ファシリエイドサポーター

肩

〈肩関節用サポーター〉

——— 使用説明書 ———

このたびは本品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

用 途

肩関節のサポート

はじめにお読みください

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本品は左右兼用です。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

ご使用にあたって

- 本体ストラップのメッシュ生地面に面ファスナーをつけないでください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

使用上の注意—必ずお読みください—

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

 **警告**……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

 **注意**……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容



本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は医師に相談してください。

- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。

- 肩関節以外の部位に使用しないでください。
- サイズの合った製品を使用してください（サイズ表は本使用説明書のP.8にあります）。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。
- 長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
- 上下、表裏を正しく使用してください。
- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体や本体ストラップをきつく締めすぎないでください。

 警告	●使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから、正しく装着し直してください。 ●本品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ●使い捨てカイロで肩関節を温める際には、必ず医師の指示に従ってください。 ●使い捨てカイロで肩関節を温める際には、低温やけどなどに注意し、使い捨てカイロの取扱説明書に従い安全にご使用ください。 ●本品の加工、改造、修理を行わないでください。 ●本品は個人用の製品です。処方された方以外は使用しないでください。
	本品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 ●つけごころが悪いなど違和感がある場合。 ●装着部に怪我、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

 注意	面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。 本品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。 本品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に移り染む場合があります。 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。
--	---


お手入れ方法

 注意	色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に移り染む場合があります。 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。
--	--


- 本品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 洗濯の際は、面ファスナーをサポート本体または本体ストラップにとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

各部の名称


※本品は左右兼用です。図は右肩に装着しています。

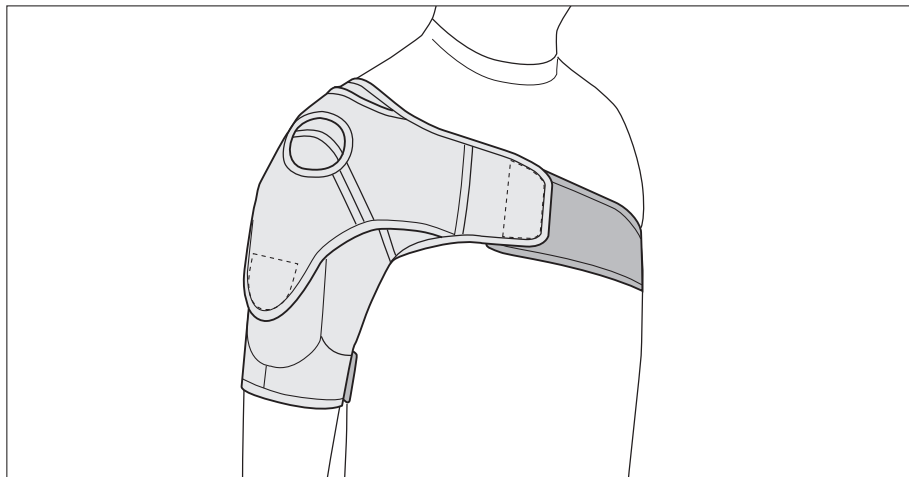

【製品前面(右肩に装着する場合)】

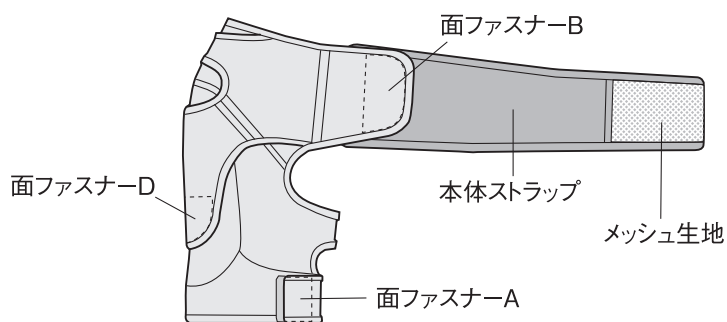


【製品後面(右肩に装着する場合)】

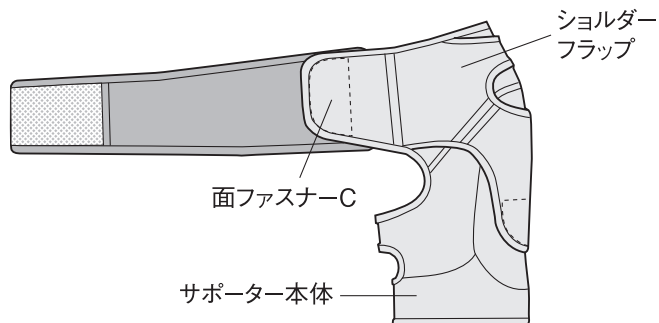

装着手順

- 装着前に本使用説明書P.2～3の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右肩の場合です。左肩に装着する場合も同じように装着してください。


- 1** サポーター本体の面ファスナーAおよびBを取り外します。また、ショルダーフラップの丸い穴部分の中心に、サポーター本体の縫い目がくるように面ファスナーDの位置を調整します。

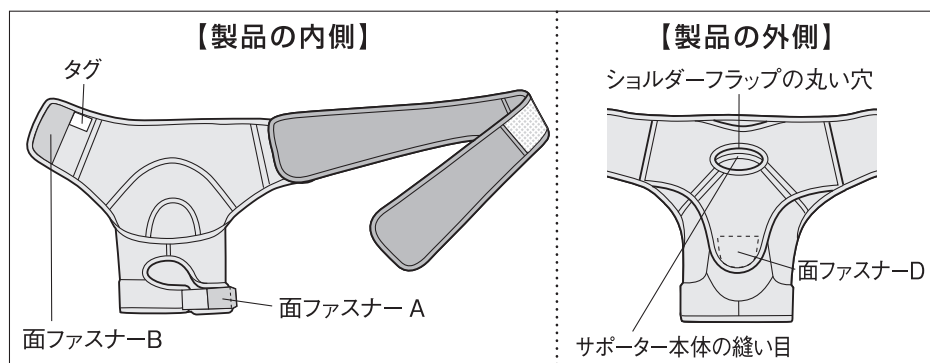

タグがついている方が上で内側になります。

※左肩に装着する場合


サポーター本体の面ファスナーAおよびCを取り外します。

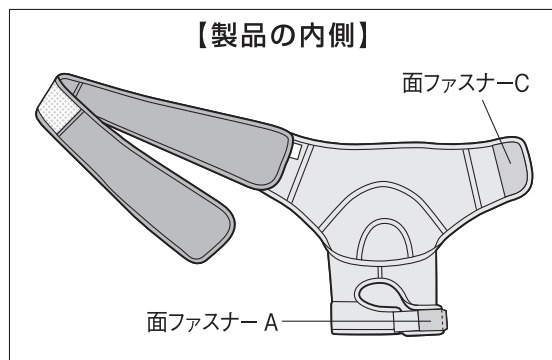

- 2** サポーター本体の筒状の部分に腕を通し、ショルダーフラップの丸い穴部分が肩峰(肩の出っ張り部分)にくるまでサポーターを引き上げます。その後、面ファスナーAをとめます。




- 3** 本体ストラップを背中から腋下(わきの下)を通して前面まで引き上げます。このとき、本体ストラップの中心と体の中心が合っているかを確認します。合っていない場合は、面ファスナーCを外して長さを調節します。

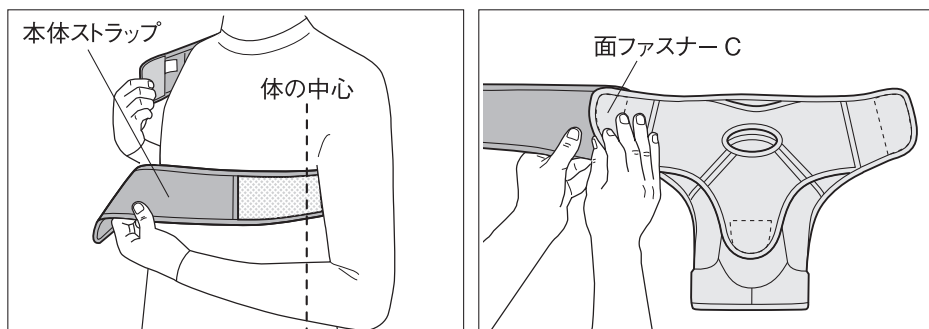

- 4** サポーター本体と本体ストラップを、サポーター本体が体にフィットするまで引っ張り、面ファスナーBを本体ストラップにとめます。



5 面ファスナーDのとめ位置を変えることで、サポーターのフィット感を調節できます。

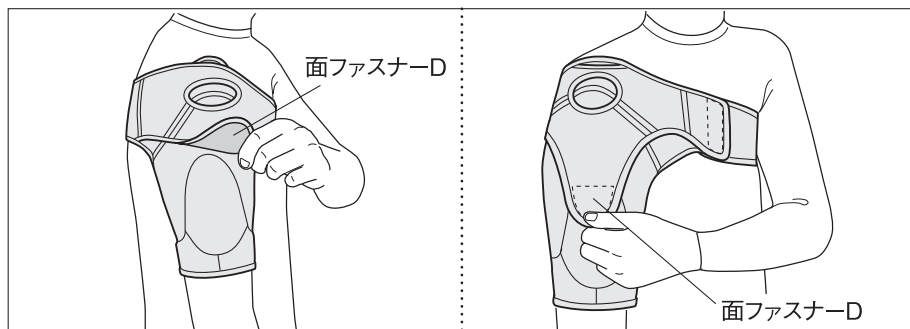


6 サポーターのゆりみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

装着完了時（右肩の場合）



使い捨てカイロで肩関節を温める際には、以下の手順でサポーターに挿入してください。

※使い捨てカイロの取扱説明書に従い安全にご使用ください。

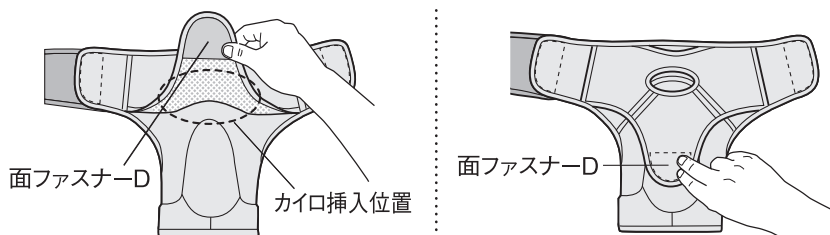

面ファスナーDを外し、サポーター本体とショルダーフラップの間に使い捨てカイロを挿入し、面ファスナーDをとめます。

※使い捨てカイロはサポーター本体とショルダーフラップの間に挿入し、直接肌に触れないようにしてください。また、使い捨てカイロが強く押しつけられないように、サポーター本体およびショルダーフラップの締め方を調節してください。


素 材

素 材	
繊維	ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
繊維以外	ポリウレタン

※お願い…本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

サイズ表

サイズ	適用範囲(肩の付け根の太さ)	1 箱入数
S	34cm～41cm	1コ
M	41cm～48cm	1コ
L	48cm～55cm	1コ

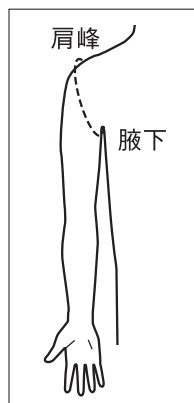

●サイズの選び方

肩の付け根の太さに合わせて選んでください。肩の付け根の太さは腕の力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る周囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2017.07(改版)
168665