

逐次型空気圧式マッサージ器

ケアスロン®

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。



主な用途：空気圧で圧迫することにより下肢の静脈の血行を促進




製品基本構成



セット内容：本体、ホース
※ケアスロン(品番551200)にはブーツは付属しません。

別売品

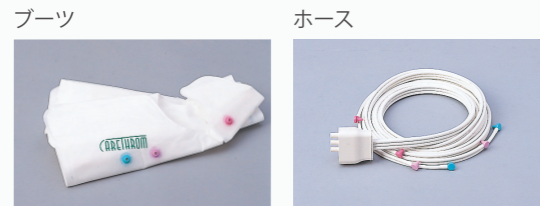


特長

長期臥床時などの静脈還流の促進をサポート。

空気圧による圧迫で、下肢の静脈還流をサポート。

空気圧により足先から下腿部へ徐々に圧迫し静脈還流をサポートします。

※圧力設定は5段階、除圧時間は3段階で選択可能です。

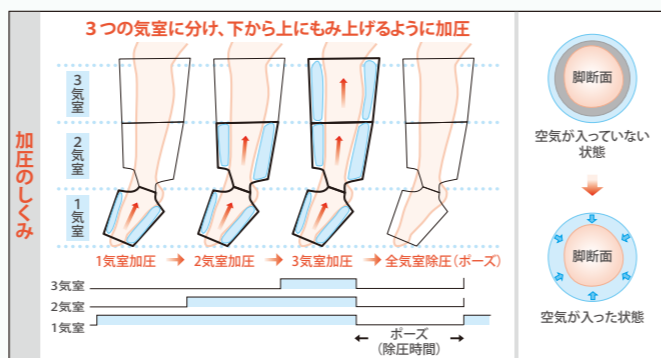

圧力設定(5段階)

表示圧力	1気室	2・3気室
2.7(20)	5.3(40)	2.7(20)
4.0(30)	6.7(50)	4.0(30)
5.3(40)	8.0(60)	5.3(40)
6.7(50)	9.3(70)	6.7(50)
8.0(60)	10.7(80)	8.0(60)

※末梢循環還流の効果を高めるため、1気室(足部)は2気室/3気室より圧力を20mmHg高く設定されています。


除圧時間(3段階)

もみあげサイクル(参考)	
ホース(除圧時間)	1サイクル
5秒	約22秒
30秒	約47秒
60秒	約77秒

※ブーツ装着具合や設定圧力、除圧時間によってもみあげサイクルが変わります。

簡易設置を考慮したホース接続&専用フック。

ホースやブーツは差し込むだけの簡単接続。また、付属のフックでベッド脇などに設置することができます。

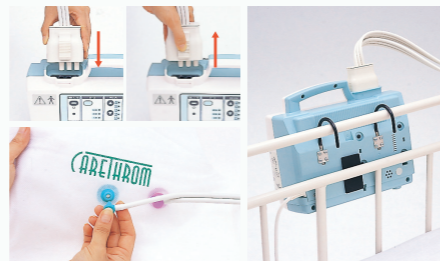

簡単操作で使いやすいパネルボタン仕様。

圧迫レベルや除圧時間の設定はパネルのボタンを押すだけで設定できます。



就寝時などの快適性を妨げない低騒音。(作動音:約30dB)



小型軽量で持ち運びしやすい形状。



快適清潔に使えるシングルユースのブーツ(別売品)。

ブーツは患者様ごとに使い分けができるシングルユースで清潔に使用できます。



ケアスロン

品番	1箱入数
551200	1台

※ケアスロン(品番551200)にはブーツは付属しません。

別売品

ブーツ		ホース	
品番	1箱入数	品番	1箱入数
552201	2枚1セット	552211	1本
552202	2枚5セット(10枚)		

販売名	ケアスロン®		
一般的名称	逐次型空気圧式マッサージ器(UMDNコード:16837000)		
類別	機械器具12 理学診療用器具		
医療機器分類	管理医療機器		
特定保守管理医療機器	該当		
医療機器認証番号	218AHBZX0006000		
本体寸法	H233mm×W282mm×D119mm(フック含まず)		
本体質量	3.5kg		
ブーツ寸法	ブーツ丈:380mm/足部最大周囲:355mm(使用最大寸法:305mm)/下腿部最大周囲:460mm(使用最大寸法:410mm)		
ブーツ質量	0.15kg(2本)		
定格入力	AC100V 50/60Hz 8.5/9.5W 23VA		
電撃に対する保護の形式および程度	クラスII B形		
加圧方式	徐々に加圧		
圧迫詳細:1	徐々に加圧 サイクル:約22~77秒(設定圧力/除圧時間などで異なる) ホールド時間:5秒、30秒、60秒		
圧力設定:2	圧迫5段階 足部:5.3~10.7kPa(40~80mmHg 10mmHg刻み) 下腿部:2.7~8.0kPa(20~60mmHg 10mmHg刻み) ※下腿部は足部よりマイナス20mmHg		
環境条件	周囲温度:10~40℃ 相対湿度:30~75% 気圧:70~106kPa		

製造販売業者:日東工器株式会社

警告

- ＜使用方法＞
- 使用の際(初期セットしたとき、又は再セットしたとき)には使用前点検として、下肢の末梢から中枢に向かって順番に加圧・除圧されることを確認すること。[この順序が間違っていると本品の長時間使用により、区画症候群等の合併症を起こすおそれがある]
- 必ず市販のストッキングを装着のうえ、使用すること。[ブーツが直接皮膚に触れる状態で使用すると接触性皮膚炎などを起こすおそれがある]
- 使用中、腓骨頭部分に圧迫物がないことを確認すること。[硬いものはもちろんのこと、枕などの軟らかい圧迫物であっても、長時間圧迫が加わり続けると、圧迫の強弱にかかわらず総腓骨神経麻痺などを起こすおそれがある]

禁忌・禁止(次の患者には使用しないこと)

- ＜適用対象(患者)＞
- 鬱血性の心臓疾患、深部静脈血栓症、血栓性静脈炎、肺血栓症、四肢が無感覚もしくはそれらの疑いがある患者。
- 広範囲な下肢の浮腫または鬱血性心不全による肺浮腫が見られる患者。
- 重症な動脈硬化症または虚血性疾患の患者。
- 極度の下肢変形がみられる患者。
- 蜂窩織炎、静脈炎、壊疽、火傷、皮膚炎などがある患者。

＜使用方法＞

エアプラグまたはホース先から複数のホースが抜けた場合は、販売店へ点検・修理を依頼のこと。絶対に再挿入して使用しないこと。[抜けたホースを挿し直すとき、それぞれの挿入位置を間違えるおそれがあり、挿入位置を間違えて使用すると、ブーツの加圧順序が変わり、本品の長時間使用により、区画症候群などの合併症を起こすおそれがある。]

販売業者

日本シグマックス株式会社

本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

- 予告なく製品の仕様が変わることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。

