

医療用弾性スリーブ リンパディーバ

圧迫圧(手首部分) 27-40hPa (20-30mmHg) 価格:1枚/¥7,700(税込)

● シックベージュ

品番	サイズ	手首周囲	前腕中央部周囲	上腕中央部周囲	1箱入数	サイズの色分け
530001	S	14.6cm 19.0cm	17.8cm 23.0cm	21.6cm 39.4cm	1枚	きいろ
530002	M	16.5cm 21.6cm	22.0cm 29.2cm	27.0cm 45.0cm	1枚	みずいろ
530003	L	19.0cm 23.5cm	28.9cm 34.3cm	32.4cm 50.5cm	1枚	みどり

● オニキスブラック

品番	サイズ	手首周囲	前腕中央部周囲	上腕中央部周囲	1箱入数	サイズの色分け
530101	S	14.6cm 19.0cm	17.8cm 23.0cm	21.6cm 39.4cm	1枚	きいろ
530102	M	16.5cm 21.6cm	22.0cm 29.2cm	27.0cm 45.0cm	1枚	みずいろ
530103	L	19.0cm 23.5cm	28.9cm 34.3cm	32.4cm 50.5cm	1枚	みどり

サイズの色分け

バンド部裏側にあるサイズ表示ラインの色でサイズを確認できます。
(写真はSサイズ)



【サイズの選び方】

①手首(骨の突起部分上)の周囲を計り、上の表の「手首周囲」に当てはめて適用サイズを選んでください。


※計測した手首周囲が2サイズにまたがる場合は、小さい方のサイズを選んでください。

※手首周囲がどのサイズにも当てはまらない場合には、本製品は適用できません。

②前腕中央部(手首と肘関節の中間)及び上腕中央部(肘関節と脇の下)の周囲を計ります。①で選択した適用サイズにおける「前腕中央部周囲」及び「上腕中央部周囲」の適用範囲を上表で確認し、計測した値がいずれも適用範囲内に収まっていることを確認してください。

※①で選択したサイズに前腕及び上腕周囲が当てはまらない(手首のサイズと前腕及び上腕のサイズが異なる)場合は、医師の指示に従って、適用サイズを決めてください。

※前腕及び上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合には、本製品は適用できません。

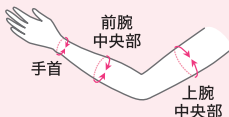

製造販売業者

日本シグマックス株式会社

本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)

受付時間:9時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。

リンパディーバ

医療用弾性スリーブ



- しなやかな素材で **優しい着用感**
- 速乾性・通気性が良く **ムレにくい**
- 伸縮性に優れた **快適なフィット感**


SIGMAX

リンパディーバは、着け心地にこだわった、 医療用弾性スリーブ(医療機器)です。



段階的圧迫設計

手首部分から体幹に向かって、段階的に圧迫圧を弱めていく段階的圧迫設計で、上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防するよう静脈還流をサポートします。

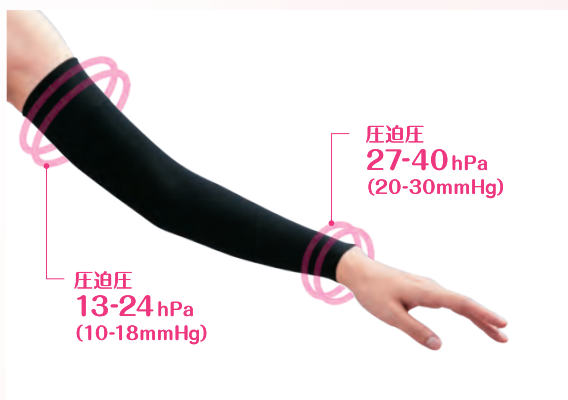

着けやすく、優しい着用感

しなやかな伸縮性に富む素材を使用しているため、装着しやすく、着用感がとても優しく快適です。

ムレにくく、着用時の快適さをキープ

速乾性、通気性に優れた素材を使用しているため、ムレにくく快適。360度ストレッチ加工で、上肢の動きを妨げることなくサポートします。

肌に優しい素材と仕様

素材にアロエベラ成分を配合。縫い目のないシームレス仕様で、肌に優しくフィットします。

快適性を追求した設計

日本人の腕にマッチする長さで、過剰な圧がかからないよう工夫しました。

Color : ベージュ、ブラックの2色を用意。
お好みでお選びいただけます。



リンパディーバ社とは

リンパディーバ社は、アメリカ フィラデルフィアに住む乳がん患者である2人の女性、レイチェル・トロクセルとロビン・ミラーが創始した会社です。2人は乳がん手術後、副作用でリンパ浮腫を発症しました。医師から、腕の腫れには圧迫帯が最も効果的だと勧められ、2人は圧迫帯を探しましたが、きめが粗く、重くて暑苦しい、ベージュの包帯のようなものしか見つかりませんでした。

圧迫帯の品揃えの少なさに愕然とし、不満を感じた2人は、ファッションデザイナーのクリスティン・ダッドレーに会い、もっとおしゃれで使いやすい圧迫帯の開発を進めました。

2007年のはじめ、乳がんの再発を知ったレイチェルは、治療を受けながらリンパディーバ社での活動を続け、その活動が彼女の辛い時期の支えと喜びになりました。

その後レイチェルは他界しましたが、乳がん術後患者のQOL-生活の質-を向上させたいという彼女の信念と思いは、今もリンパディーバ社の精神に受け継がれています。



販売名 リンパディーバ
一般名称 弾性ストッキング (JMDNコード:31724000)
医療機器分類 一般医療機器
医療機器届出番号 13B2X00187000005
製造販売業者 日本シグマックス株式会社