

# RECORE トレーニングベルト

RECORE トレーニングベルトは体幹カフと手動の空気圧調整機構が一体となった製品です。電源を必要とせずRECOREと同様の理論での体幹トレーニングができます。

RECOREとは空気圧を用いた体幹トレーニング装置です。体幹に巻いたカフ(体幹カフ)からの圧力に対して、押し返す力を発揮することで、体幹筋群\*のトレーニングになります。

\*本カタログに記載される体幹筋群とは、腹直筋、腹斜筋、腹横筋、骨盤底筋、横隔膜を指しています。



## 製品特長

### 座ったままで体幹筋群のトレーニングが可能

座位や立位、臥位など楽な姿勢で使用でき、腰部に痛みのある方や体力・筋力のない方でも無理のない範囲で継続してご利用いただくことができます。



### 手動のポンプで簡単に空気圧調整が可能

ポンプを繰り返し握ることでトレーニングベルトに空気が入り、調整バルブのネジを緩めるだけで空気を抜くことができます。




### 電源不要で場所を選ばずトレーニングが可能

院内(リハビリテーション室、外来、病棟など)でも幅広く使用でき、自宅でのセルフエクササイズも可能です。



# 体幹トレーニング装置 RECOREとの連動や組み合わせ

## RECORE

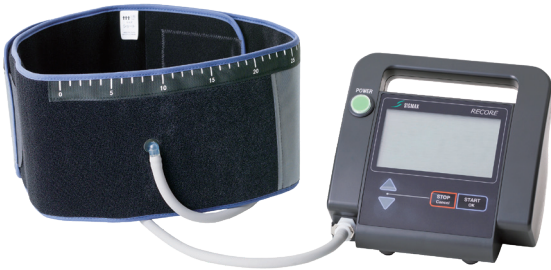

- 体幹筋力の数値化
- 画面表示に合わせたトレーニングができる (バイオフィードバック)
- 経時変化の把握によるモチベーション維持・向上

## RECORE トレーニングベルト



- トレーニング機能に特化し、時間と場所を選ばず、多くの患者様に対応可能
- 細かい設定が必要無く、すぐに使用できる
- 機能を絞り、価格を抑えたため複数個用意しやすい

### ⚠ 禁忌・禁止

以下の症状のある(または疑いのある)方には使用しないでください。  
 ●妊娠している方 ●血栓症の方 ●心臓疾患のある方 ●脳卒中の既往がある方 ●動脈瘤(脳動脈瘤、大動脈瘤など)のある方 ●腹壁ヘルニアのある方 ●脊椎腫瘍や脊椎感染症、急性の椎体骨折を罹患している方

・本品は腹部用です。

●首や顔などにベルトを巻かないでください。 ●腹部以外にベルトを巻くと、怪我をするおそれがあります。

### ⚠ 注意

以下の症状がある(または疑いのある)方は医師に相談のうえ、使用してください。

●高血圧症の方 ●呼吸器疾患の方 ●静脈瘤の方 ●胸腹部手術歴のある方 ●脊椎手術歴のある方 ●胸囲に皮膚炎、皮膚の創傷のある方 ●胸囲に皮膚感染症のある方 ●胸囲周辺に筋損傷のある方 ●体温が 38℃以上の方 ●脊椎に異常がある方 ●腰椎分離症の疑いがある方 ●20歳未満の方 ●認知症の所見が認められる方 ●悪性腫瘍のある方

### 本体情報

商品名	品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
RECORE トレーニングベルト	736210	ショート	55cm～ 85cm	1コ
	736220	ロング	85cm～115cm	1コ

### 製品仕様

	ショート	ロング
本体寸法	長さ約1178mm×幅約150mm	長さ約1488mm×幅約150mm
重量	約335g	約385g



RECORE トレーニングベルト特集ページはこちら ▶



## 日本シグマックス株式会社

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)  
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>

●予告なく製品の仕様変更になることがあります。

●カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。

●各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。

●各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。