

医療用品05 副木

一般医療機器 手・指用副木 16210000

アクティムーブ ライゾフォルテ

【禁忌・禁止】

手関節又は手の骨折がある場合、リンパ流の低下又は手と指の循環障害を患っている場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 製品の概要

本品は、慢性又は急性の症状に伴う痛み及び母指関節の炎症の為の母指用装具であり、手根中手(CMC)関節及び第一中手指節(MCP1)関節を固定して母指を安静保持する。四指と手首の動きを妨げずに母指内転を制限する構造となっている。柔軟性のある金属芯により、本体部分を個々の手の形状に合わせることができる。

2. 構成品

本品は以下の構成品からなる。


No.	各部の名称
①	ライゾフォルテ本体(金属芯含む)
②	下部固定用ストラップ
③	上部固定用ストラップ
④	母指用ストラップ

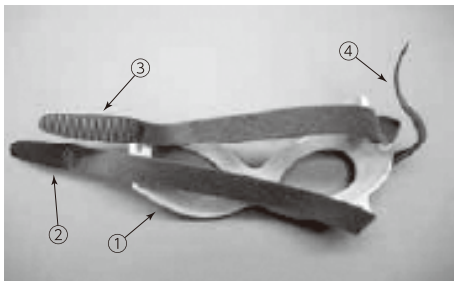

寸法、重量

本品は右手用・左手用がある。

規格	サイズ
S	6.8~8.0cm
M	8.0~9.0cm
L	9.0~10.0cm

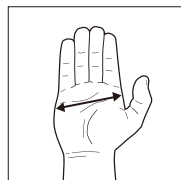

3. 原理

母指関節の痛み及び炎症の為の母指用装具であり、アルミマグネシウム合金芯にエラストマーを成型した枠とそれをはめたときにできる枠、手指の隙間を調節するストラップにより、手根中手(CMC)関節及び第一中手指節(MCP1)関節を固定して母指を安静保持する。四指と手首の動きを妨げずに母指内転を制限する構造である。


【使用目的又は効果】

母指の過剰拡張(オーバーストレッチ)等により生じるUCL損傷患者の母指の損傷における急性期、慢性の痛み治療、術後の治療のために母指を固定する器具である。

【使用方法等】

本品は水の中でも使用でき、また簡単に乾かすことが可能である。


1. アクティムーブ ライゾフォルテを手袋のようにはめ、母指をサポートに通す。

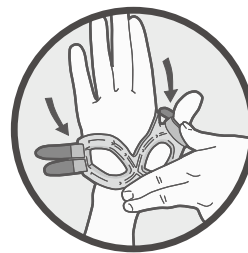


2. 母指用ストラップを母指の周りで閉じる。
※各ストラップは片手で簡単に操作できる。



3. 上下ストラップを手首の周りで閉じる。

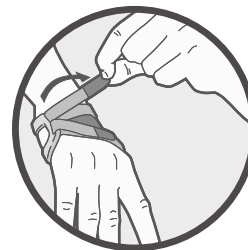

4. 手の周りの各ストラップを適度に調整し閉じる。

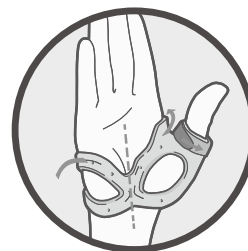

【使用上の注意】

痛みや不快感を感じる場合や皮膚が変色した場合、装着中に腫れが認められる場合は、アクティムーブ ライゾフォルテの使用を直ちに止め、医師にお問い合わせください。

【保管方法及び有効期間等】

アクティムーブ ライゾフォルテは、手洗いができる（最大水温 40℃）。器具には、漂白剤、ドライクリーニング、又は乾燥機を使用しないこと。洗浄する前にすべてのストラップを閉じること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

***製造販売業者**

業者名：株式会社エスジーティー

住 所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-24-1

****外国製造業者**

業者名：Simple Manufacturing DG Ltd.

国 名：中国

販売業者

業者名：日本シグマックス株式会社

電 話：0800-222-6122（お客様窓口）