

○

下肢静脈還流のサポートに。

# CV STOCKING

CVストッキング

○

医療用 弾性ストッキング






# CVストッキングは、 下肢静脈還流をサポートする、 医療用の弾性ストッキングです。

- 【用途】 ・ 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防  
・ 静脈還流の促進

下肢の静脈に障害がおきると、血液やリンパ液のうっ滞が発生します。

下肢静脈弁の障害や、静脈そのものの閉塞(下肢静脈疾患)により、静脈の還流が阻害されると、血液やリンパ液のうっ滞が発生します。

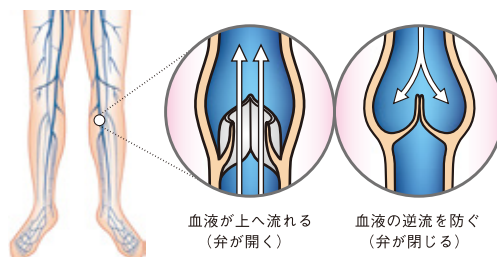

弾性ストッキングを用いた圧迫療法は、静脈還流の促進につながります。

足首から大腿部にかけて段階的に圧迫圧を調整した「段階的圧迫法」により設計された弾性ストッキングは、静脈還流の促進、静脈血・リンパ液のうっ滞軽減・予防をサポートします。




## CVストッキングは、 段階的圧迫設計で、下肢の静脈還流をサポートします。

「足首」「ふくらはぎ」「大腿」の各部位に適度な圧迫圧がかかるよう、それぞれ繊維や編み方を使い分けています。

静脈は血液を心臓へ戻す役割を持っていますが、足の血液は重力に逆らって心臓方向へと戻らなければならないために多くの負担がかかります。そこでCVストッキングは「段階的圧迫法」に基づき、足首から上部にいくにつれて圧迫圧が徐々に弱くなるように設計。これによって、うっ滞した血液を心臓に向かって戻しやすくし、静脈還流をサポートします。

| 圧迫レベル | 足首               | ふくらはぎ            | 大腿               |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| ライト   | 21.3hPa/16.0mmHg | 14.7hPa/11.0mmHg | 10.0hPa/7.5mmHg  |
| ノーマル  | 28.7hPa/21.5mmHg | 19.3hPa/14.5mmHg | 13.3hPa/10.0mmHg |

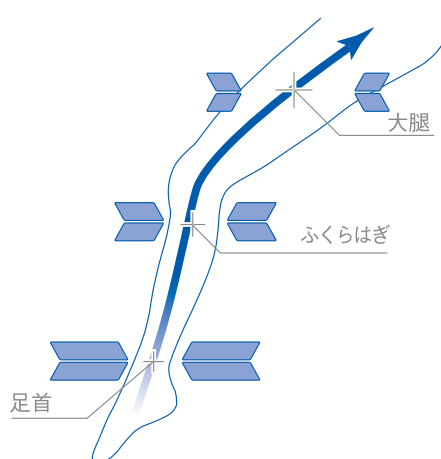

# 日本人の体型を考慮した製品形状

日本人の体型にあった形状をデータに基づいて割り出し、基本構造やサイズに応用しています。

下肢静脈疾患における圧迫療法では、自分の脚に合った製品を使用することが最も重要となります。CVストッキングは約2万人の日本人の体型データ\*をもとに、サイズ展開をはじめ、足幅や足長などの細かなディテールに至るまで、日本人の体型に適した仕様になりました。  
(※外部調査機関による計測データより)



# 毎日履き続けるためのさまざまな快適機能

細部に至るまで日常生活における快適な履きやすさを追求しました。

あらゆるシーンに合わせやすい、生地タイプ&カラー。

ベージュ 黒 黒(膝下ソックス)

CVストッキングは、ストッキング生地とソックス生地の2種類を用意。ストッキング生地には、ベージュと黒の2色があります(ソックス生地は黒のみ)。

踵部分のフィット性を高めるための仕様を採用。

編み方向をY字型に交差させる構造を採用しました(膝下ソックス)。

伸縮素材

踵部分に特に伸縮性のある編み方を施し、ぴったりフィットするように設計しています(股下、膝下)。

大腿部には、ズレ落ちを防ぐシリコンドットを装備(股下)。

股下には大腿部にズレ落ちを防ぐシリコンドットを採用。確かな装着位置を維持します。



# CVストッキングラインナップ

汎用性の高い股下タイプと膝下タイプがあります。

また、ストッキング生地の「股下」「膝下」にはベージュと黒の2色を用意、「膝下ソックス」は黒のみになります。長さ、生地、色など用途に合わせてお選びいただけます。

| 形状                      | 股下            | 膝下            | 膝下ソックス |
|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| 圧迫レベル                   |               |               |        |
| おだやかな圧迫圧の<br><b>ライト</b> | <br>ベージュ<br>黒 | <br>ベージュ<br>黒 | <br>黒  |
| 適度な圧迫圧の<br><b>ノーマル</b>  | <br>ベージュ<br>黒 | <br>ベージュ<br>黒 | <br>黒  |

識別カラー 履き口を折り返した裏側に色のついたラインが入っています。


| タイプ    | 圧迫レベル | サイズ | ライン色 |
|--------|-------|-----|------|
| 股下・膝下  | ライト   | S   | きいろ  |
|        |       | M   | しろ   |
|        |       | L   | あお   |
|        | ノーマル  | S   | ちゃいろ |
|        |       | M   | みずいろ |
|        |       | L   | みどり  |
| 膝下ソックス | ライト   | S   | きいろ  |
|        |       | M   | しろ   |
|        |       | L   | みどり  |
|        | ノーマル  | S   | むらさき |
|        |       | M   | あお   |
|        |       | L   | ちゃいろ |



※写真は M サイズの例

## サイズの選び方

右図の3ヶ所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」を基準にしてサイズを選んでください。(膝下、膝下ソックスの場合、右図の①②の2ヶ所を計測)。

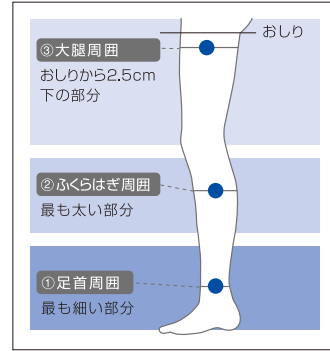

### サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。  
 <差が1サイズ以内の場合>----- 「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。  
 <差が2サイズ以上の場合>----- 適用できません。
- 膝下および膝下ソックスの場合、「①足首周囲」が25.0cm、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cmを超える場合は適用できません。
- 股下の場合、「①足首周囲」が25.0cm、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cm、「③大腿周囲」が74.0cmを超える場合は適用できません。

| 圧迫レベル/<br>圧迫圧(足首)           | タイプ    | 品番     | カラー/<br>サイズ | 適用範囲          |               |               | ライン色 |
|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                             |        |        |             | ①足首周囲         | ②ふくらはぎ周囲      | ③大腿周囲         |      |
| ライト<br>21.3hPa<br>16.0mmHg  | 股下     | 525201 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm | 40.0cm～56.0cm | きいろ  |
|                             |        | 525202 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm | 48.0cm～64.0cm | しろ   |
|                             |        | 525203 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm | 58.0cm～74.0cm | あお   |
|                             |        | 525211 | ベージュS       | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm | 40.0cm～56.0cm | きいろ  |
|                             |        | 525212 | ベージュM       | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm | 48.0cm～64.0cm | しろ   |
|                             |        | 525213 | ベージュL       | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm | 58.0cm～74.0cm | あお   |
|                             | 膝下     | 525101 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | きいろ  |
|                             |        | 525102 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | しろ   |
|                             |        | 525103 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | あお   |
|                             |        | 525111 | ベージュS       | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | きいろ  |
|                             |        | 525112 | ベージュM       | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | しろ   |
|                             |        | 525113 | ベージュL       | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | あお   |
|                             | 膝下ソックス | 525001 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | きいろ  |
|                             |        | 525002 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | しろ   |
|                             |        | 525003 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | みどり  |
| ノーマル<br>28.7hPa<br>21.5mmHg | 股下     | 526201 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm | 40.0cm～56.0cm | ちゃいろ |
|                             |        | 526202 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm | 48.0cm～64.0cm | みずいろ |
|                             |        | 526203 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm | 58.0cm～74.0cm | みどり  |
|                             |        | 526211 | ベージュS       | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm | 40.0cm～56.0cm | ちゃいろ |
|                             |        | 526212 | ベージュM       | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm | 48.0cm～64.0cm | みずいろ |
|                             |        | 526213 | ベージュL       | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm | 58.0cm～74.0cm | みどり  |
|                             | 膝下     | 526101 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | ちゃいろ |
|                             |        | 526102 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | みずいろ |
|                             |        | 526103 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | みどり  |
|                             |        | 526111 | ベージュS       | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | ちゃいろ |
|                             |        | 526112 | ベージュM       | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | みずいろ |
|                             |        | 526113 | ベージュL       | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | みどり  |
|                             | 膝下ソックス | 526001 | 黒S          | 17.5cm～20.0cm | 25.5cm～33.0cm |               | むらさき |
|                             |        | 526002 | 黒M          | 20.0cm～22.5cm | 30.5cm～38.0cm |               | あお   |
|                             |        | 526003 | 黒L          | 22.5cm～25.0cm | 35.5cm～43.0cm |               | ちゃいろ |

販売名:CVストッキング  
 一般的名称:弾性ストッキング(JMDNコード:31724000)  
 医療機器分類:一般医療機器  
 医療機器届出番号:13B2X00187000001

製造販売業者:

## 日本シグマックス株式会社

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
本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1  
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
 受付時間:9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。