

医療用品05 副木

一般医療機器 手・指用副木 16210000


ヘバーデンリング

【禁忌・禁止】

- 1.骨折や腱の断裂等のケガに対して使用しないこと。
- 2.手指の第一関節(DIP関節)の固定以外の用途で使用しないこと。
[症状がひどくなったり、ケガをしたりする可能性があるため。]
- 3.本品を装着したままで磁気共鳴診断装置(MRI装置)を使用しないこと。
[発熱しやけどをするおそれがあるため。]

【使用方法等】

各部の名称

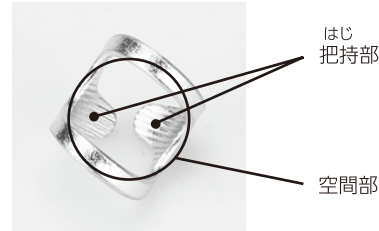

【形状・構造及び原理等】


1. 構造

本品は錫合金で構成され、3S・SS・S・M・Lの5種類のサイズがあります。

【材質】

錫、銀

2. 種類、寸法

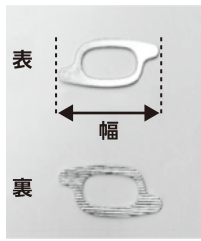

種類	幅 (mm)	厚み (mm)
3S	42±0.5	1.4±0.2
SS	48.5±0.5	1.7±0.2
S	55±0.5	
M	57±0.5	
L	62±0.5	

サイズの選び方

試着を行ってサイズを選んでください。

試着によるサイズ確認が難しい場合は、手指の第一関節の周囲をメジャー等で測り、各サイズの製品幅に近いサイズを選んでください。第一関節の周囲よりも少し大きい (+2～3mm 程度) サイズを推奨しています。

3. 包装

1個/1箱

4. 原理

錫合金製のリングは形状調整が可能であり、手指の第一関節の形状に合わせて装着することができます。

【使用目的又は効果】

手指の第一関節の固定をします。

第一関節の動きが大きい親指（母指）での使用は推奨しません。

[作業中等にリングが抜ける頻度が高いため。]

装着イメージ


手の甲側




手のひら側




1. 挿入法

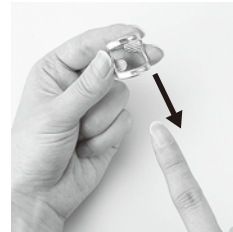

- ①リングを装着対象の指に向かって矢印の方向に挿入します。

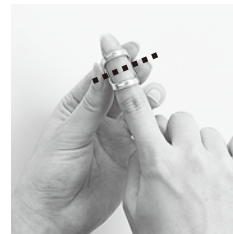


- ②指の第一関節が空間部の真ん中になるように装着します。

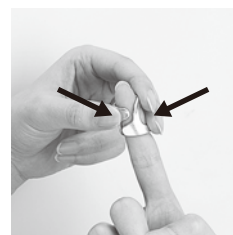


- ③リングの把持部を閉めて、指の形に合うように調整します。

2. 圧着法


※腫れがひどく挿入法での装着が難しい場合はこちらの方法で装着してください。

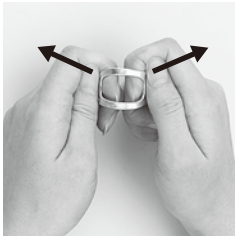

はじ
①リングの把持部を外側に開きます。

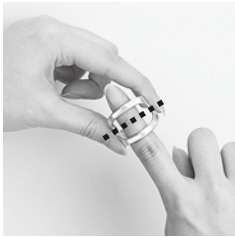

②リングを広げた状態で、指の第一関節が空間部の真ん中になるように上から圧着します。

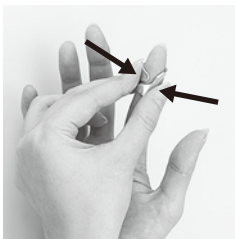

はじ
③リングの把持部を閉めて、指の形に合うように調整します。

【使用上の注意】

- 1) リングの白くなっている部分は、製造上でできてしまうものであり、品質には影響はありません。
- 2) できるだけ手を安静にできるときに使用してください。
[本品を装着しながら手を使用する作業等をした場合、リングが緩くなり外れやすくなるため]
- 3) 本品は関節をある程度制動するものであり、関節を完全に固定したり、変形した関節を矯正したりすることはできません。
- 4) 装着によりリングが変形した場合は、付属のスティックに巻きつけて形を整えてください。
- 5) 装着により、少しずつ機能が劣化します。緩くなったり、破損がみられたりする場合は、新しいリングに交換してください。
- 6) リングの開閉は最小限にしてください。
[リングの早期劣化・変形が起こりやすくなる可能性があります。]
- 7) リングは、心地よく関節が安定する程度に締め、過度に締めすぎないでください。
[神経麻痺や血行障害を引き起こすおそれがあります。]
- 8) 装着により、手指にしびれが出たり、爪が白くなったりする場合は、リングを緩めるか、使用を中止してください。
- 9) 過度な折り曲げは行わないでください。
[亀裂や破損の原因となります。]
- 10) さびや破損のないことを確認してから使用してください。
- 11) リングが破損した場合、ただちに使用を中止してください。
- 12) 肌の弱い方は金属アレルギーに注意してください。
- 13) 使用中に発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状が現れた場合には、ただちに使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 使用頻度や使用方法により異なりますが、1～3ヶ月を目途に交換してください。
- ・ 錫の特性により、氷点下(0℃以下)で変形するおそれがあります。氷点下(0℃以下)での保管は避けてください。
- ・ 熱伝導率が高いため、環境に応じて、本品も熱くなったり冷たくなったりします。火傷や凍傷には十分に注意してください。特に、火気の近くでの使用・保管や、サウナでの使用は避けてください。
- ・ 高温、多湿を避けて保管してください。上記の方法で保管した場合でも、変色する場合があります。
- ・ 保管する際は、付属のスティックにリングを巻きつけて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 柔らかいスポンジを用いて、台所用中性洗剤で洗うことができます。
- ・ 光沢が鈍くなってきたときは、重曹をペースト状にして磨いてください。
- ・ 柔らかく傷つきやすいため、たわし等でこすらないでください。また、クレンザーでの研磨もしないでください。傷がつく場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本シグマックス株式会社
連絡先 電話：0800-222-6122