



日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

お問い合わせ先

TEL.0120-945-125

(通話料無料)

受付時間 10:00~17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)

<https://amoena-sx.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- 掲載の製品商品は、実際の製品と多少違う場合があります。  
また、本カタログに掲載の価格等は2024年6月時点のものです。  
諸事情により変更することがあります。ご了承ください。

©日本シグマックス株式会社  
本誌掲載記事・写真・イラストなどの無断転記および複写を禁じます。



## 乳がん体験者の方々と 歩み続けて

アモエナは1975年ドイツで創業。  
世界中の乳がんを術後の女性の為のシリコンパッド、  
下着などの製品を送り続けるブランドです。  
世界80か国以上、のべ50万人以上の女性が愛用しています。

### こだわり 1: 自然なやわらかさのシリコンパッド

乳房に限りなく近い感触のやわらかいシリコン樹脂を独自  
に開発・配合。

女性一人ひとりの体つきが違うように、形・サイズにおいて  
多様に対応できる製品を揃えています。

### こだわり 2: 高品質を保持

品質・環境に関する国際規格、ISO90001・14001を認証  
取得。耐久性に優れ、高品質な商品を作り続けています。

### こだわり 3: 計算されたデザイン

アモエナの乳がん術後用ブラジャーは自然なつけ心地。  
乳がん術後用シリコンパッドをしっかりと支え安心してつ  
けていただけるように、デザインされています。

アモエナはつけ心地の良さと安心感から、世界中の女性から  
支持されるブランドへと成長してまいりました。  
アモエナ製品でご自身のボディーイメージ、自信、そして何より  
自分らしさを取り戻していただくことが私共の願いです。



AMOENA  
Breast Care



## Contents

04	手術後のブラジャーやパッドの選び方について	14	アモエナのブラジャー
06	アモエナのシリコンパッド	15	【ブラジャー】イサドラ(新発売) / ナンシー
08	シリコンパッドチャート表	16	【ブラジャー】ララ / イサベル
10	【シリコンパッド】アダプトエア(新発売)	17	サイズの選び方
11	【シリコンパッド】コンタクト	18	ご購入について
12	【シリコンパッド】エナジーライト / ナチュラ	19	アモエナ公式オンラインショップのご案内
13	【シリコンパッド】エッセンシャル / バランスナチュラ	20	アモエナブラストケア製品リスト

# AMOENA Breast Care

## 手術後のブラジャーやパッドの選び方について

ピンクリボンアドバイザー監修

下着やパッドは手術後の回復状態に合わせて変えていきましょう。  
心配なときは、当社のピンクリボンアドバイザーに直接相談が可能です！  
できるだけ試着をして、サイズや着け心地を確認しながら、  
自分のからだと気持ちに合うものを見つけましょう。

### 手術直後～痛みが和らぐまで

術後、痛みなどで腕があまり大きく動かせない場合があります。医療従事者が介入しやすいもの、また自分に負担のないものを選びましょう。

#### ①乳房全摘出手術

下着イメージ	パッドイメージ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●着脱しやすい前開き</li> <li>●肌あたりの優しい素材</li> <li>●胸元の開きが小さく、締め付けのない仕様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●軽量パッド (ウレタン・スポンジ・綿など)</li> <li>●肌あたりの優しい素材</li> <li>●大きなパッドではなく、補整できる薄いパッドも使用可能</li> </ul>

#### ②乳房温存手術 / ③乳房再建手術

下着イメージ	パッドイメージ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●着脱しやすい前開き</li> <li>●肌あたりの優しい素材</li> <li>●胸元の開きが小さく、締め付けのない仕様</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左右差が気になるときは補整できる薄いパッドも使用可能</li> </ul>

### 腫れや痛みが落ち着いたら

通常の生活に戻ると、からだを動かすことが増えます。適度にホールド力があるブラジャーと、ある程度重さがあるシリコンパッドが、ブラジャーのずり上がりを防ぎます。

#### ①乳房全摘出手術：全摘出手術用のパッドは大きく2種に分けられます。

##### 1) 直接肌につけるパッド

下着イメージ	パッドイメージ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●乳がん術後用ブラジャーを推奨</li> <li>●今まで使用していたブラジャーも使用可能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●シリコンパッド</li> <li>※直接肌につける際は必ずブラジャー装着が必須</li> <li>※直接肌に着ける際は、術後約半年経過、もしくは医療従事者の指示を仰いでください。</li> </ul>

##### 2) ブラジャーに入れて使用するパッド

下着イメージ	パッドイメージ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●乳がん術後用ブラジャーを推奨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●シリコンパッド</li> <li>●軽量パッド (ウレタン・スポンジ・綿など)</li> </ul>

#### ②乳房温存手術 / ③乳房再建手術

下着イメージ	パッドイメージ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●乳がん術後用ブラジャーを推奨</li> <li>●今まで使用していたブラジャーも使用可能※1</li> <li>※1 再建後の方は乳房の形が変化するため、医療従事者の指示に従い、体に合ったブラジャーをご使用ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●部分補整する薄型パッド (シリコン・ウレタンなど)</li> </ul>


#### | シリコンパッドの厚み



# AMOENA Silicone Pad

## アモエナのシリコンパッド

体にはやさしくフィットしながら、  
しっかりボディラインを補整します。

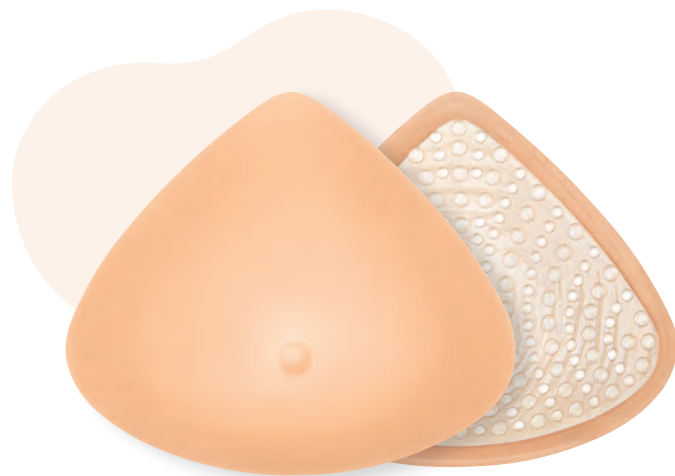

※写真のシリコンパッドは 382 コンタクト 3Sです(11ページ掲載)。

## アモエナのシリコンパッドは3タイプ

### 直接肌につけるタイプ

前傾姿勢でもシリコンパッドが肌から離れず安定した  
フィット感。

胸壁に貼り付けて使うと専用のブラジャー以外も使用  
可能。重さが気になる方、下着のおしゃれを楽しみたい  
方におすすめです。



コンタクト

### ブラジャーに入れて使うタイプ

乳がん術後用ブラジャーのポケットに入れ  
て使用。様々な形・重さ・機能のあるシリコン  
パッドをご用意しています。



エナジー



ナチュラル



エッセンシャル



アダプトエア

### 部分補整するタイプ

温存手術や再建手術を受けられた方で、左右の乳房バラ  
ンスを補整したい方に。薄型のシリコンパッド。



バランス

A Cold  
Winter Days

## amoenaシリコンパッドの コンフォートプラス **comfort+**

シリコンパッドをより快適に使用いただくために開発された  
コンフォートプラス **comfort+** のご紹介です。

※コンフォートプラス **comfort+** を採用しているシリコンパッドには商品紹介ページに  
ロゴを表示しています。

### コンフォートプラス **comfort+** とは

温度調整素材 Outlast® をシリコンに配合し、  
熱くなり過ぎず、冷たくなり過ぎず、快適な温度  
(31~33°C)を保ちます。

**comfort+**

温度調整素材  
Outlast® 配合  
シリコン



(コンタクト 3Sの場合)

### Outlast® テクノロジーとは

Outlast® は宇宙の激しい温度変化の中でも一定の温度を保ち、NASAの飛行士を守る素材  
として開発されました。

※Outlast® は、Outlast Technologies inc.の登録商標です。

### コンフォートプラス温度変化 **C+=コンフォートプラス**

(注)使用シリコンパッドはコンタクト 3S

コンフォートプラス仕様品(右)と従来仕様品(左)に同時に熱を加えると...

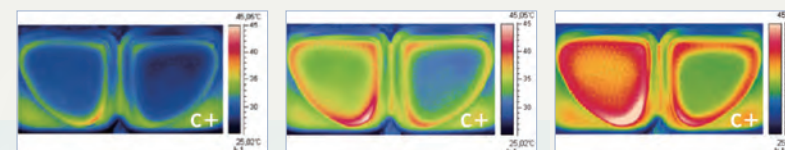


図1  
コンフォートプラスと従来品とも、20°Cの状態。

図2  
熱を加えてもコンフォートプラスは、従来品に比べて温度が高くなりくい。

図3  
さらに熱を加え時間が経過しても、コンフォートプラスは快適な温度を保つ。

コンフォートプラス仕様品と従来仕様品の温度が高い状態から、自然に温度を下げると...

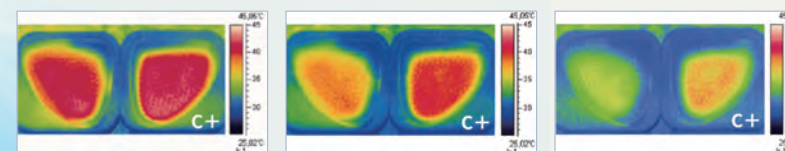


図4  
コンフォートプラスの温度が上がるまで熱を加え、2つのシリコンパッドが同じ温度の状態。

図5  
コンフォートプラスは従来品に比べ、温度の下がり方が緩やか。

図6  
コンフォートプラスは、従来品に比べわずかな温度変化にとどまっている。

(アモエナ社調べ)

Hot  
Summer Days

## アモエナの乳がん術後用シリコンパッドは お好みやライフスタイルに合わせて選べます

**ボリュームを調整したい方に**  
全摘  
**アダプトエア**  
Adapt Air

軽さ lightness ★★★★★  
ムレにくさ breathable ★★★★★☆  
カバー力 coverage ★★★★★☆  
Comfort+の有無 Comfort+ ●  
おすすめ recommend ★★★★★

**肌に着けて使用したい方に**  
全摘  
**コンタクト**  
Contact

軽さ lightness ★★★★★☆  
ムレにくさ breathable ★★★★★☆  
カバー力 coverage ★★★★★☆  
Comfort+の有無 Comfort+ ●  
おすすめ recommend ★★★★★☆

**快適性を重視したい方に**  
全摘  
**エナジーライト**  
Energy

軽さ lightness ★★★★★  
ムレにくさ breathable ★★★★★  
カバー力 coverage ★★★★★☆  
Comfort+の有無 Comfort+ ●  
おすすめ recommend ★★★★★

**自然な見た目を好む方に**  
全摘  
**ナチュラ**  
Natura

軽さ lightness ★★★★★☆  
ムレにくさ breathable ★★★★★☆  
カバー力 coverage ★★★★★☆  
Comfort+の有無 Comfort+ ●  
おすすめ recommend ★★★★★☆

**カバー力を重視したい方に**  
全摘  
**エッセンシャル**  
Essential

軽さ lightness ★★★★★☆  
ムレにくさ breathable ★★★★★☆  
カバー力 coverage ★★★★★★  
Comfort+の有無 Comfort+ —  
おすすめ recommend ★★★★★☆

**部分補整したい方に**  
温存/再建  
**バランス**  
Balance

軽さ lightness ★★★★★☆  
ムレにくさ breathable ★★★★★☆  
カバー力 coverage ★★★★★☆  
Comfort+の有無 Comfort+ ●  
おすすめ recommend 温存/再建専用



### 製品名と数字とアルファベットについて

製品名と最後にある 1S や 2E などの数字とアルファベットの組み合わせについて、**最初の数字**は乳頭の位置を表します。その後続く**アルファベット**は形を表します。

例：ナチュラ 1S は、ナチュラ製品で、乳頭が中央より低い位置にくる左右対称型の製品

乳頭の位置	<b>1 Shallow</b> シャロー (乳頭が中央より低い位置)	<b>2 Average</b> アベレージ (乳頭が中央の位置)	<b>3 Full</b> フル (乳頭が中央より高い位置)
形状	<b>S</b> ymmetrical シンメトリカル (左右対称型)	<b>E</b> xtra エクストラシェイプ (特殊型)	<b>U</b> niversal ユニバーサル (万能型)
	<b>1S</b>	<b>2E</b>	<b>2U</b>
			<b>3S</b>

### シリコンパッドのお手入れ方法

ご使用後はサッと水洗いするだけお手入れ簡単!

**STEP1**

水またはぬるま湯で表面をやさしく水洗い。

**STEP2**

汚れがある場合は中性洗剤をぬるま湯に溶かして、手で洗い。中性洗剤が残らないようにぬるま湯ですすぐ。

**STEP3**

乾いたタオルで水分をやさしく拭き取る。


※コンタクトの粘着部分は毎回のご使用ごとに専用のブラシで洗い、自然乾燥してください。

# Adapt Air Silicone Pad

## アダプトエア

様々な胸壁形状に適応可能

comfort+

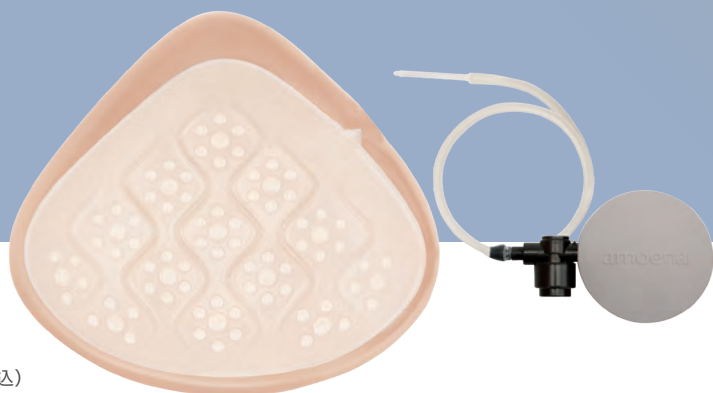

326 アダプトエアエクストラライト 2SN

サイズ 1~8 | 価格 1セット/箱 ¥55,000 (税込)

特徴 1

### 超軽量シリコンNo.1。

(アモエナのシリコンパッド内)

- 軽量で肩や首への負担を軽減。  
※コンタクト、エッセンシャルより約40%軽量。
- シリコンのやわらかさを維持しながら、下着がずり上がらない重さでシリコンパッドの軽量化を実現。

特徴 2

### ボリューム調整可能。

- ブラジャーの形状によってボリューム調整することで、左右対称なシルエットを表現。
- 個々の胸壁に合わせてボリューム調整できるので、ブラジャーと胸壁との隙間がなく体にフィット。

特徴 3

### 温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能。

### Technology

専用のポンプを使って空気を出し入れすることで、いつでも簡単にボリュームを調整可能。また一度空気を入れるとそのままの状態を維持します。



### Customer's VOICE

私はむくみがひどいので、朝・夕でバストの大きさが変わってくるんです。今まではタオルを出し入れして調節していましたが、「アダプトエア」は空気で調整できるのがいいですね。

- 50代 -

### アクセサリ

#### アダプトエア用ポンプ

アダプトエアのボリュームを調整するために空気を出し入れする専用のポンプ。  
※初回1個付いています。  
¥3,080 (税込) /1個



### セット内容


シリコンパッド1個、専用ケース1個、ポンプ1個、使用説明書、ご愛用のしおり

# Contact Silicone Pad

## コンタクト

あなたの体の一部のように

comfort+

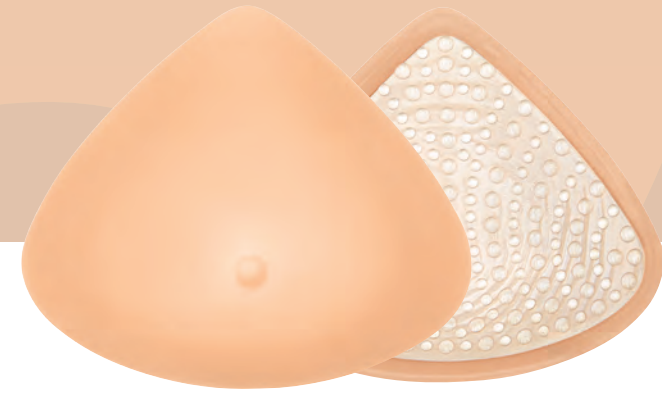

382 コンタクト 3S

サイズ 0~9 | 価格 1セット/箱 ¥51,700 (税込)

特徴 1

### 温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能。

特徴 2

### 2通りの使い方ができる多機能なシリコンパッド。

#### ● 使い方その①

胸壁に直接貼り付けることができる。(推奨:術後半年経過後、もしくは医療者の装着許可を得た方)



- 前傾姿勢でも胸壁と乳がん術後用シリコンパッドが離れず安定したフィット感。
- ポケットの無い市販のブラジャーも使用可能。

#### ● 使い方その②

付属品のバックグリップを粘着面に貼るとブラ



ジャーに入れて使うタイプとして使用可能。

- 術後の経過が浅い場合や肌の粘着面がすぐに洗えない場合、ブラジャーに入れて使うタイプとして使用できる。

### こんな方におすすめ

- 動きにより乳がん術後用シリコンパッドが肌から離れることに不安感のある方。
- 乳がん術後用シリコンパッドの重みを負担に感じる方。
- 下着のおしゃれを自由に楽しみたい方。


### セット内容

シリコンパッド1個、バックグリップ1枚、予備プロテクトフィルム(粘着面保護フィルム)2枚、アモエナブラシ1本、専用ケース1個、ご愛用のしおり(裏面:コンタクト使用説明書)

※毎回のご使用ごとに本製品を洗っていただくことが大切です。洗うことで再び粘着力が戻ります。※本製品は大量に汗をかいた時や水泳中は粘着力が低下します。その際は挿入型としてポケット付きの専用ブラジャーや水着とともにご使用ください。※必ずブラジャーをしてください。

### Technology

粘着性シリコンによるパール状の粘着面が肌にぴったりフィット。温度調整機能を有するコンフォートプラス層は、シリコンパッドの温度変化を抑え、快適な装着感をサポート。

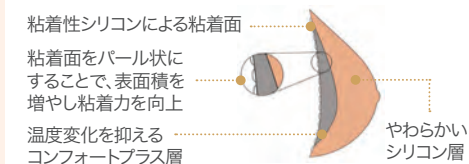

### Customer's VOICE

大変気に入っております。  
全摘手術から2年、何とかして術前のブラジャーを使う方法はないだろうかと思ったのが、コンタクトに興味を持った理由です。  
術前のブラジャーが簡単に使えますし、仕事中はパッドを貼り付けていることを忘れてしまいます。  
数ヶ月使ってみて、冬は冷たいという感じもなく、夏は多少汗をかきますが、それほど気になりません。  
手入れも思ったより楽です。

- 40代 -

### アクセサリ

#### バックグリップ

コンタクト3Sを肌に直接つけずブラジャーに入れて使う場合に粘着面に貼って使用します。  
※初回1枚付いています。  
サイズ:0~9号 ¥1,320 (税込) /1枚



#### アモエナ ブラシ


コンタクトの粘着面に影響を与えないように開発された専用洗浄ブラシ。※初回1個付いています。  
¥1,100 (税込) /1個



# Energy Silicone Pad

## エナジーライト よりよい快適性と装着感を

comfort+

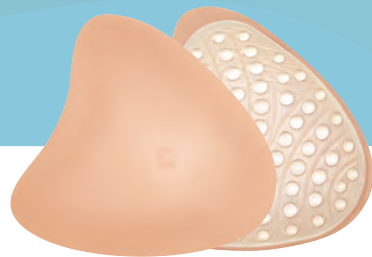

341 エナジーライト 2U | サイズ 1~9 | 価格 1セット/箱  
 1~4 ¥38,500 (税込)  
 5~9 ¥40,150 (税込)

- 特徴 1** 快適性No.1。(アモエナのシリコンパッド内)
- 肌側を立体的パール形状に加工し、計算された配列にすることで、通気性を確保。
  - 温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能。
- 特徴 2** 軽量シリコンを採用。肩や首への負担を軽減。

### こんな方におすすめ


- 肩凝りなどで重みを負担に感じる方。
- 治療によるほてりやのぼせ、エクササイズなどの暑さによるシリコンパッドの温度変化を抑えたい方。
- 脇の下のリンパ節を切除したあとが気になる方。

### Customer's VOICE

エナジーライトを購入する決め手は通気性と温度調整素材コンフォートプラスでした。汗っかきな私にとって、快適性が高いことが一番!今までのシリコンパッドよりかなり快適に過ごせてます。 - 50代 -

### Technology

軽量シリコン(外側)、コンフォートプラスシリコン(内側)、パール面(肌側)の3層構造。従来のコンフォートプラス製品よりも30%多く温度調整素材を配合し、より快適に装着可能。肌面はパール形状で接触面積を少なくし、通気性を確保。

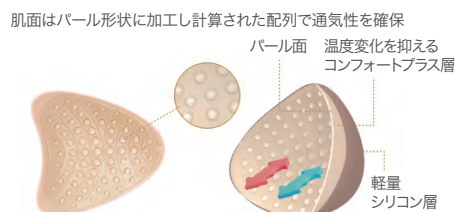

従来のcomfort+シリコンパッドよりも温度調整素材を30%多く配合、温度変化を抑え快適な装着感をサポート。

### セット内容

シリコンパッド1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり

# Essential Silicone Pad

## エッセンシャル ボディバランスと安心感を



エッセンシャル 2E | サイズ 0~9 | 価格 1セット/箱 ¥28,600 (税込)

- 特徴 1** カバー力No.1。(アモエナのシリコンパッド内)
- 横向きに使用すると脇の下まで、縦向きに使用すると鎖骨下までカバー可能。
- 特徴 2** 切除した重みにより近いシリコンパッド。

### こんな方におすすめ

- 脇の下や鎖骨下のリンパ節を切除した方。
- ハリのあるバストラインをお好みの方。

### Customer's VOICE

腋窩リンパ節切除しており、脇部分がかかなり凹んでいるので、横にして使うとしっかり補整されて凹みが気になりません。 - 60代 -

### Technology

1層の軽量シリコンからできており、やわらかい感触。表層のソフトなフィルムが、自然な外観を再現。



### セット内容

シリコンパッド1個、ご愛用のしおり

# Natura Silicone Pad

## ナチュラ 自然な見た目と動き

comfort+



396 ナチュラ 1S | サイズ 1~9 | 価格 1セット/箱 ¥33,000 (税込)

- 特徴 1** やわらかさNo.1。(アモエナのシリコンパッド内)
- より本物のバストに近い自然な揺れと感触。
- 特徴 2** 自然な見た目。
- バストのトップが中央より低い位置にあり、自然なバストを再現。
  - 体を横にした時にも自然に表現可能。

### こんな方におすすめ

- やわらかい感触をお好みの方。
- 自然な形をお好みの方。


### Customer's VOICE

やわらかさと健側と同様に下垂する感じがとても自然です。出かける際、左右差が気にならなくなりました。 - 70代 -

- 特徴 3** 温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能。

### Technology

表層にはやわらかいシリコンを使用し、自然な見た目と動きを再現。裏層の軽量シリコンは少しコシがあり、シリコンパッドの形を安定させるとともに、温度変化を抑える温度調整素材を配合。シリコンパッドの温度変化を抑え、快適な装着感をサポート。

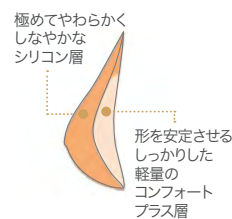

### セット内容

シリコンパッド1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり

# Balance Silicone Pad

## バランスナチュラ 乳房温存術や、乳房再建術を受けられた方へ

comfort+



220 バランスナチュラ MD | サイズ 3,5,7 | 価格 1セット/箱 ¥16,500 (税込)

- 特徴 1** 乳房温存手術後や乳房再建手術後の補整用のシリコンパッド。

- 特徴 2** 温度調整素材「コンフォートプラス」配合。温度変化を抑え快適な温度で使用可能。

### こんな方におすすめ


- 乳房温存術や乳房再建術を受けられた方で、左右の乳房の差異にお悩みの方。
  - ブラジャーのカップが綺麗な形にならずお悩みの方。
  - ボリュームにお悩みの方。
- ※補整範囲によっては、乳房全摘出手術用のシリコンパッドで、よりきれいに補整できる場合があります。

### Customer's VOICE

温存で、左右差があります。今まで軽いパッドで補整していましたが、不自然な感じがして気になっていました。試着したときこれだ!と思いました。今では欠かせないパッドです。 - 40代 -

### Technology

表層にはやわらかい薄型のシリコンを使用。裏層のシリコンにはシリコンパッドの温度変化を抑える温度調整素材を配合することにより、快適な装着感をサポート。

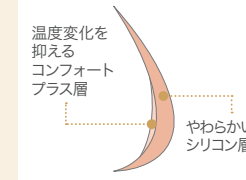

### セット内容

シリコンパッド1個、専用ケース1個、ご愛用のしおり


# AMOENA Brassiere

## アモエナのブラジャー


アモエナの乳がん術後用ブラジャーは自然なつけ心地です。

乳がん術後用シリコンパッドをしっかりと支え安心してつけていただけるように、デザインされています。

アモエナの乳がん術後用ブラジャーは  
ノンワイヤーでもしっかり支えます。

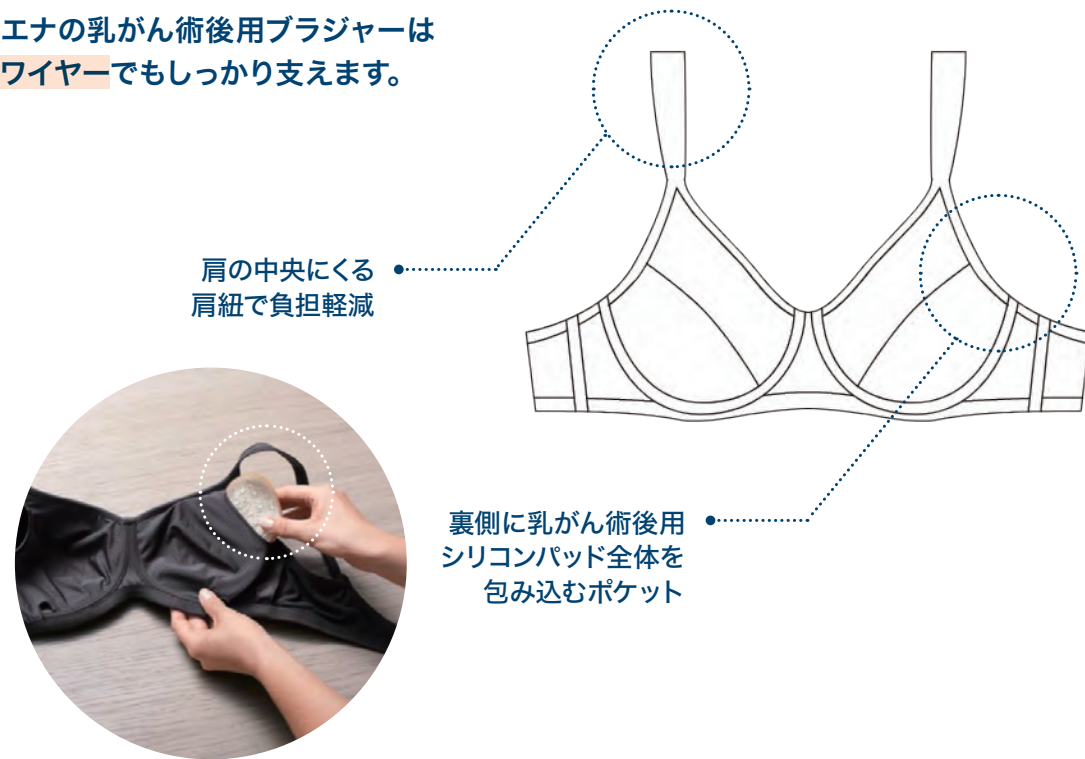

NEW

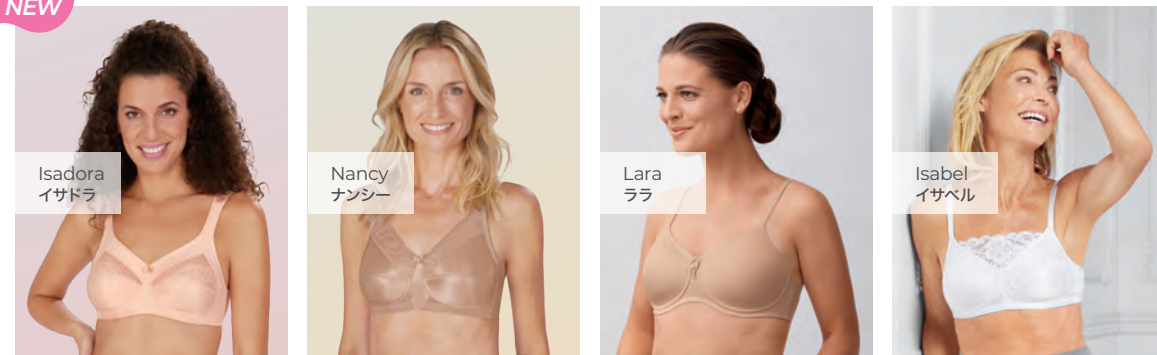

# Isadora Brassiere NEW

## イサドラ シリコンパッドしっかりサポートブラ



イサドラ ブラッシュ 44804

- 特徴 1** シリコンパッドをしっかり支える設計。
- 幅広のパッド入りストラップを採用。シリコンパッドをしっかり支え、重さを分散し、肩の負担を軽減。

- 特徴 2** 快適な装着感。
- 3つのパーツで構成されたカップにより、優れたサポート力とフィット感を実現。
  - 刺繍部分にメッシュ生地を採用。軽やかな印象と、通気性を確保。
  - ポケットの内側に柔らかい生地を使用することで肌当たりの良さを実現。



FRONT

BACK

「イサドラ」におすすめの乳がん術後用シリコンパッド

### CONTACT

シリコンパッドのラインナップで一番重量を感じるCONTACTですが(ブラジャーに入れて使う場合)、イサドラのバットつきストラップで肩への負担を軽減し、快適に装着可能です。



- |     |       |                        |
|-----|-------|------------------------|
| サイズ | 75A~C | 色<br>ブラッシュ             |
|     | 80A~D |                        |
|     | 85A~D |                        |
|     | 90A~C |                        |
|     |       | 価格 1枚/箱<br>¥6,930 (税込) |

# Nancy Brassiere

## ナンシー ムレ感軽減サポートブラ



ナンシー ライトサンド 1151

- 特徴 1** ムレを軽減。
- ブラジャーのポケット部分に通気性の良い吸汗速乾素材を採用。シリコンパッド使用時のムレを抑えます。

- 特徴 2** シリコンパッドをしっかり支える設計。
- 幅広ストラップを採用。シリコンパッドをしっかり支え、重さを分散し、肩の負担を軽減。



FRONT

BACK

「ナンシー」におすすめの乳がん術後用シリコンパッド

### ENERGY-LIGHT

温度変化を抑えるコンフォートプラスを配合したENERGY-LIGHTと吸汗速乾素材採用のナンシーのコラボは快適性に特化。ムレが気になる方におすすめです。



- |     |       |                        |
|-----|-------|------------------------|
| サイズ | 75B~C | 色<br>ライトサンド            |
|     | 80B~D |                        |
|     | 85B~D |                        |
|     | 90B~D |                        |
|     | 95B~C |                        |
|     |       | 価格 1枚/箱<br>¥5,940 (税込) |



# Lara Brassiere

ララ モールドカップ形状のTシャツブラ

特徴  
1

## 透けにくい仕様。

- 身体になじむ色と形で、Tシャツなどの薄手のアウターにもひびきにくい仕様になっています。

特徴  
2

## モールドカップ仕様。

- モールドカップ仕様で、バストの形を美しく表現。



FRONT

BACK



ララ ヌードベージュ 0674

### 「ララ」におすすめの乳がん術後用シリコンパッド

#### ナチュラ

ナチュラは下部が丸みを帯びており、この形状がララの特長であるモールドカップ(バストの形に合わせて成形したカップ)に最適です。身に着けるだけで簡単にきれいなバストラインを作れます。



サイズ

70A~C

75AA~C

80AA~C

85AA~C

90AA~C

色

ヌードベージュ

価格 1枚/箱

¥5,940 (税込)

# Isabel Brassiere

イサベル キャミソールブラ

特徴  
1

## キャミソール型の乳がん術後用ブラジャー。

- 伸縮素材のレースが胸の高い位置までくるので、胸元をしっかりカバー。
- 前傾姿勢になったときも胸壁にフィット。

特徴  
2

## シリコンパッドをしっかり支える設計。

- シリコンパッドをしっかり支える為、前側のアンダーラインは伸縮しない素材を採用。



FRONT

BACK



イサベル ホワイト 2118



イサベル ブラック 2118

### 「イサベル」におすすめの乳がん術後用シリコンパッド

#### アダプトエア

美しいレースが胸の高い位置までくるイサベルは胸壁の隙間ができにくく、アダプトエアとのフィット感をさらに高めます。



サイズ

70A~B

75AA~75D

80AA~80D

85AA~85D

90A~C

色

ホワイト

ブラック

価格 1枚/箱

¥4,950 (税込)


# AMOENA Silicone Pad & Brassiere

## サイズの選び方

ブラジャーとシリコンパッドのサイズの選び方は順番があります。

- 1 ブラジャーのサイズ決定
- 2 シリコンパッドサイズ決定

【例】アンダーバスト81cm、トップバスト95cmの場合

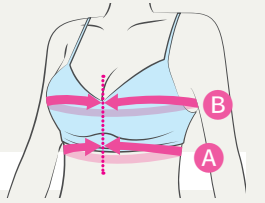

### ブラジャーのサイズの決め方

- 1 アンダーバストが81cm → 表を見ると「アンダーバスト周囲」が78-82の範囲内であることから、「80」となります。
- 2 トップバスト95cm → 表を見ると「トップバスト周囲」は94-96の範囲内なので、「B」となります。
- 3 ①、②より、ブラジャーのサイズは「80B」となります。

※初めてアモエナブラジャーを購入される場合は、80B、80C、85A、85Bを注文し、試着されることをお勧めします。

### ブラジャーのサイズ選びについて

※ご用意いただきたいもの：メジャー、ブラジャーもしくはインナー(現在使用されているもので構いません)

- 1 アンダーバストサイズを計測する **A**  
胸の中心から一周メジャーで計測します。
- 2 トップバストサイズを計測する **B**  
胸の中心から一番高い部分を経由し **B** のように計測します。

※計測するときはどうしても下を向いてしまいがちです。できるだけ前を向いて正しく計測しましょう。

※術側は、ブラジャーやインナーのカップ形状を維持したまま計測してください。

### シリコンパッドのサイズの決め方

ブラジャーのサイズが決まったら、「シリコンパッドサイズ表」を見ます。※今回はブラジャーサイズ80Bで確認します。ブラジャーサイズ「B」を右に見ていき、「80」と表示されている列の一番下の数字がシリコンパッドのサイズです。ブラジャーサイズが「80B」の場合、サイズは「5」となります。

※初めてアモエナのシリコンパッドを購入される場合は、5号と6号を試着されることをお勧めします。

### シリコンパッドのサイズ選びについて

購入前に試着し、使用感をご確認いただくことを推奨しております。

※アダプトエアはボリューム調整可能な製品です。表とは異なる場合がございます。

ブラジャーサイズ表	アンダーバスト周囲	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97
	アンダーバストサイズ	70	75	80	85	90	95
シリコンパッドサイズ表	カップサイズ	トップバスト周囲					
	AA	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107
	A	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109
	B	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111
	C	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113
D	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	

シリコンパッドサイズ表	ブラジャーサイズ	AA	70	75	80	85	90	95			
		A		70	75	80	85	90	95		
		B			70	75	80	85	90	95	
		C				70	75	80	85	90	95
	D					70	75	80	85	90	
シリコンパッドサイズ		0・1	2	3	4	5	6	7	8	9	

# AMOENA Breast Care

## ご購入について

アモエナ製品のご購入は、取扱代理店からの販売とアモエナ公式オンラインショップでの販売がございます。取扱代理店では、専門スタッフによる製品説明やフィッティングを行ったのちに、ご購入いただくことができます。

### | 取扱代理店でのご購入について

全国の取扱代理店にて購入いただけます。

「アモエナ公式オンラインショップ」ホームページに「代理店一覧」を掲載しておりますので下記URLよりご覧いただき、各取扱代理店までお問い合わせをお願いいたします。取扱代理店がご不明な場合は、弊社までお問い合わせください。

なお、ご購入に際しては、ご購入前のフィッティングをお勧めしております。

#### 製品のご試着について | フィッティングをお勧めしています！



シリコンパッド、ブラジャーはともに長くお使いいただく製品であり、お客様お一人おひとりの身体へのフィッティングがとても大切です。ご購入にあたり専門スタッフによるフィッティングをご希望の場合は、取扱代理店までお問い合わせください。

※地域によっては取扱代理店でのフィッティングを承ることができない場合がございます。予めご了承ください。  
※取扱代理店でのフィッティングが難しい場合は、弊社までお問い合わせください。

#### 取扱代理店はこちら

「アモエナ公式オンラインショップ」代理店一覧  
URL <https://amoena-sx.jp/hpgen/HPB/entries/4.html>

右の二次元コードより  
アモエナ公式オンラインショップへ  
アクセスしてください。



### | アモエナ公式オンラインショップのご案内

アモエナ公式オンラインショップでは当カタログに記載のある、商品を取り扱っております。

製品特長やよくあるご質問、術後のケアコラムなども掲載しております。ぜひご覧ください。

公式LINEでピンクリボンアドバイザーに直接相談ができます。  
お気軽にお問い合わせください。

右下の二次元コードよりお友達登録できます。  
ぜひアクセスしてください。

<https://lin.ee/2eagFlc>  
LINE ID: @388gvdfn



#### お問い合わせはこちら

お住まいの近くに取扱代理店がない、  
転居によりこれまでの取扱代理店の利用が難しくなったなどの場合は、下記までお問い合わせください。

 SIGMAX 日本シグマックス株式会社



お客様  
窓口

TEL.0120-945-125 (通話料無料)  
受付時間: 10時~17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く




# AMOENA Silicone Pad

乳がん術後用シリコンパッド


Adapt Air ブラジャーに入れて使うタイプ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>326 アダプトエア エクストラライト 2SN</b> 	851001	4026275117362	1	¥55,000
	851002	4026275117379	2	
	851003	4026275117386	3	
	851004	4026275117393	4	
	851005	4026275117409	5	
	851006	4026275117416	6	
	851007	4026275117423	7	
	851008	4026275117430	8	
<b>アダプトエア用ポンプ</b> 	895200	4026275371191	—	¥3,080

Contact 直接肌につけるタイプ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>382 コンタクト 3S</b> 	802200	4026275371580	0	¥51,700
	802201	4026275371597	1	
	802202	4026275371603	2	
	802203	4026275371610	3	
	802204	4026275371627	4	
	802205	4026275371634	5	
	802206	4026275371641	6	
	802207	4026275371658	7	
	802208	4026275371665	8	
	802209	4026275371672	9	
<b>バックングストリップ (コンタクト3S用)</b> 	892200	4026275106366	0~2	¥1,320
	892203	4026275106373	3~4	
	892205	4026275106380	5~6	
	892207	4026275106397	7~8	
	892209	4026275107059	9	
<b>アモエナ ブラシ</b> 	890001	4026275214115	—	¥1,100

Energy ブラジャーに入れて使うタイプ

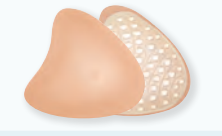商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>341 エナジーライト 2U</b> 	811201	4026275573052	1	¥38,500
	811202	4026275573069	2	
	811203	4026275573076	3	
	811204	4026275573083	4	¥40,150
	811205	4026275573090	5	
	811206	4026275573106	6	
	811207	4026275573113	7	
	811208	4026275573120	8	
	811209	4026275573137	9	


Natura ブラジャーに入れて使うタイプ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>396 ナチュラ 1S</b> 	822201	4026275473109	1	¥33,000
	822202	4026275473116	2	
	822203	4026275473123	3	
	822204	4026275473130	4	
	822205	4026275473147	5	
	822206	4026275473154	6	
	822207	4026275473161	7	
	822208	4026275473178	8	
	822209	4026275473185	9	

Essential ブラジャーに入れて使うタイプ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>エッセンシャル 2E</b> 	842200	4946452056744	0	¥28,600
	842201	4946452056751	1	
	842202	4946452056768	2	
	842203	4946452056775	3	
	842204	4946452056782	4	
	842205	4946452056799	5	
	842206	4946452056805	6	
	842207	4946452056812	7	
	842208	4946452056829	8	
	842209	4946452056836	9	


Balance 部分補整するタイプ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>220 バランスナチュラ MD</b> 	865203	4026275241951	3	¥16,500
	865205	4026275241975	5	
	865207	4026275241999	7	

# AMOENA Brassiere

専用下着


## Isadora シリコンパッドしっかりサポートブラ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>イサドラ</b> ブラッシュ 44804 	886121	4026275485713	75A	¥6,930
	886122	4026275485812	75B	
	886123	4026275485904	75C	
	886131	4026275485720	80A	
	886132	4026275485829	80B	
	886133	4026275485911	80C	
	886134	4026275486000	80D	
	886141	4026275485737	85A	
	886142	4026275485836	85B	
	886143	4026275485928	85C	
	886144	4026275486017	85D	
	886151	4026275485744	90A	
	886152	4026275485843	90B	
	886153	4026275485935	90C	

## Nancy ムレ感軽減サポートブラ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>ナンシー</b> ライトサンド 1151 	885122	4026275025759	75B	¥5,940
	885123	4026275025810	75C	
	885132	4026275025766	80B	
	885133	4026275025827	80C	
	885134	4026275025926	80D	
	885142	4026275025773	85B	
	885143	4026275025834	85C	
	885144	4026275025933	85D	
	885152	4026275025780	90B	
	885153	4026275025841	90C	
	885154	4026275025940	90D	
	885162	4026275025797	95B	
	885163	4026275025858	95C	

## Lara モールドカップ形状のTシャツブラ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)
<b>ララ</b> ノードベージュ 0674 	883111	4026275319728	70A	¥5,940
	883112	4026275319735	70B	
	883113	4026275319742	70C	
	883120	4026275347691	75AA	
	883121	4026275319759	75A	
	883122	4026275319766	75B	
	883123	4026275319773	75C	
	883130	4026275347707	80AA	
	883131	4026275319780	80A	
	883132	4026275319797	80B	
	883133	4026275319803	80C	
	883140	4026275347714	85AA	
	883141	4026275319810	85A	
	883142	4026275319827	85B	
	883143	4026275319834	85C	
	883150	4026275347721	90AA	
	883151	4026275319841	90A	
	883152	4026275319858	90B	
	883153	4026275319865	90C	

## Isabel キャミソールブラ

商品名	品番	JANコード	サイズ	標準小売価格(税込)	
<b>イサベル</b> ホワイテ 2118 	882211	0747122181117	70A	¥4,950	
	882212	0747122181216	70B		
	882220	0747122182015	75AA		
	882221	0747122182114	75A		
	882222	0747122182213	75B		
	882223	0747122182312	75C		
	882224	0747122182411	75D		
	882230	0747122183012	80AA		
	882231	0747122183111	80A		
	882232	0747122183210	80B		
	882233	0747122183319	80C		
	882234	0747122183418	80D		
	882240	0747122184019	85AA		
	882241	0747122184118	85A		
	882242	0747122184217	85B		
	882243	0747122184316	85C		
	882244	0747122184415	85D		
	882251	0747122185115	90A		
	882252	0747122185214	90B		
	882253	0747122185313	90C		
	<b>イサベル</b> ブラック 2118 	882111	4946452032908		70A
		882112	4946452032915		70B
		882120	4946452032922		75AA
		882121	4946452032939		75A
		882122	4946452032946		75B
882123		4946452032953	75C		
882124		4946452032960	75D		
882130		4946452032977	80AA		
882131		4946452032984	80A		
882132		4946452032991	80B		
882133		4946452033004	80C		
882134		4946452033011	80D		
882140		4946452033028	85AA		
882141		4946452033035	85A		
882142		4946452033042	85B		
882143	4946452033059	85C			
882144	4946452033066	85D			
882151	4946452033073	90A			
882152	4946452033080	90B			
882153	4946452033097	90C			