

使用方法と注意事項

※ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みください。

アクセラス2 使用方法

01



【使用プローブの確認】

医師から指示された本数をご使用ください。1本のみ使用の場合は、左右どちらか1本を引き抜いてください。

02



【プローブの固定】

プローブ固定バンドのプローブ装着部の穴の中心に医師のつけたマークがくるように合わせ装着します。黒リングにバンドを通してから面ファスナーで固定します。

※バンドが長すぎる場合は、はさみで切ってください。

03



【プローブ装着】

治療用ゲルのボトルから約2cmを目安に絞り出し(約1~2ml)、照射面全体に塗り広げてください。

04



プローブコード位置とキャップの切り込み位置を確認し、プローブを挿入してください。

05



フタは“カチッ”と音がするまで、確実に閉めてください。

※超音波は空気中では伝わらないため、プローブを肌に密着させるようにしてください。

06



【治療の開始】

「POWER/OK」ボタンを押し、電源を入れてください。

07



「△/▽」ボタンで医師から指示のあった出力を選択し、「POWER/OK」ボタンを押します。

※条件固定モードの場合は出力の選択はありません。

08



フリーモードの場合

条件固定モードの場合

「△/▽」ボタンで「治療」を選択し、「POWER/OK」ボタンを押すと治療がスタートします。

09



治療中は画面に残り時間が表示されます。治療終了までプローブがずれないように安静に過ごしてください。

※「一時停止」と表示されていますが、残り時間が表示され、表示時間が1秒ごとに減少、5秒ごとにピッと音が鳴っている場合は可動しています。

10



治療が終了するとアラーム音が鳴り、機器の動作が終了します。

※左図が表示されてから3秒後に自動的に電源がOFFになります。

11



【機器のお手入れ】

治療が終わりましたら、プローブとプローブ固定バンドについている治療用ゲルをティッシュペーパーなどでふき取ってください。

プローブ固定バンドの連結方法

(2方向より照射する場合)





一方のバンドをもう一方のリングに通し、プローブ装着部が適切な位置に来るよう長さを調節してください。バンド部分が長すぎる場合は、はさみで切ってください。

アクセラス2 音声ガイダンスの設定

アクセラス2は音声ガイダンス機能を設定できます。ON/OFFは下記手順をご確認ください。

- ①メイン画面で「設定」を選択します。
- ②「表示・音」を選択し、モニターの明るさと操作音量を設定します。
- ③最後に音声ガイダンスの使用を「はい」「いいえ」で選択します。

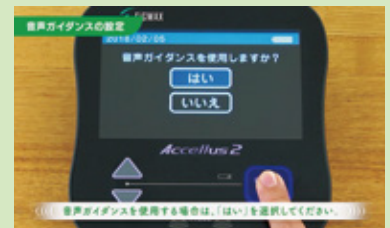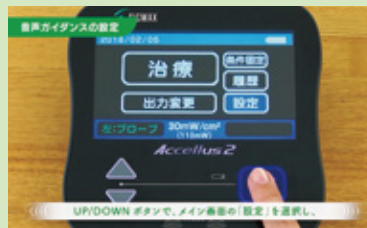

※言語の設定では日本語、英語、中文(簡体字)の選択が可能です。音声ガイダンス対応は日本語のみです。

アクセラス2 充電方法


本体液晶画面右上の電池マークの表示 が少なくなってきましたら下記の手順にて本体の充電を行ってください。

- ①本体に付属のアクセラス2用ACアダプタを接続し、充電を開始します。
充電中は電源LEDがオレンジ色に点灯します。
※はじめて使用するときおよびバッテリーの充電残量が低下した際には、充電を行ってください。
- ②充電が完了すると、電源LEDが緑色に点灯します。
※バッテリーを使い切った状態で、充電時間は約120～180分です。
- ③本製品は充電しながらも本体の操作および治療は可能です。
充電を終了させ、保管する際はアクセラス2用ACアダプタを抜いてください。



電源LED: ①充電時/オレンジに点灯
②充電完了時/緑色に点灯

①充電時/オレンジに点灯

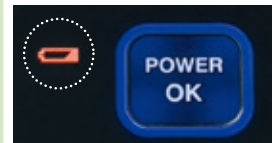

②充電完了時/緑色に点灯

